


Anleitung wie Sie zum Seitenset gelangen


Anleitung für Nutzer:innen von Grid 3



Um zu dem Seitenset zu gelangen, müssen Sie Ihr Gerät zunächst mit dem Internet verbinden.
Klicken Sie oben links auf „Menü“ und dann „Seitensets hinzufügen“.

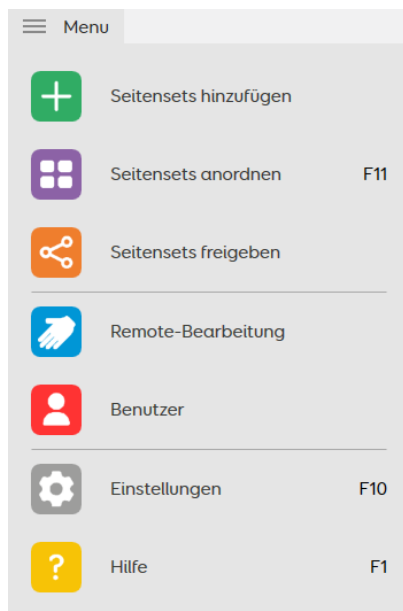

Wählen Sie unten rechts „Online Grids“ aus.

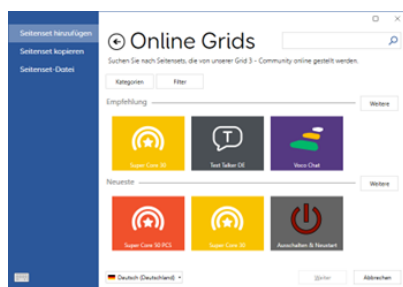


Das Seitenset finden Sie in den Bereichen „Empfehlung“ oder „Neueste“, bestätigen Sie anschließend mit „Weiter“.
Alternativ geben Sie Schlagwörter in die Suchfunktion ein.


Anleitung für Nutzer:innen von Grid for iPad



Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen dann „Seitensets hinzufügen“.

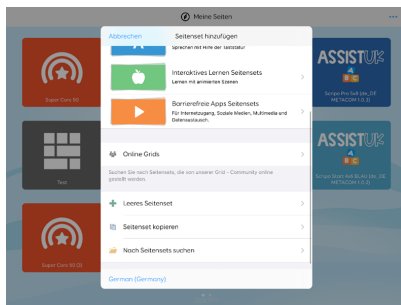

Scrollen Sie herunter und wählen Sie „Online Grids“ aus.

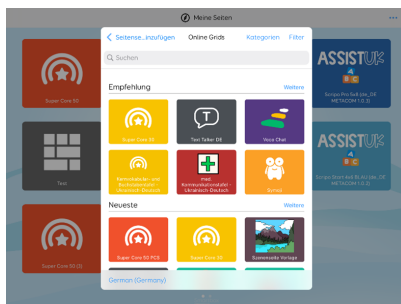

Das Seitenset finden Sie in den Bereichen „Empfehlung“ oder „Neueste“, bestätigen Sie anschließend mit „Weiter“.

Hinweis: Sie können alternativ auch über die Lupe mit Schlagwörtern nach dem Seitenset suchen.

Falls Sie das Seitenset nicht finden, tippen Sie auf Filter (oben rechts) und wählen Sie „alle Plattformen“.