

# Anpassen Ihrer ElevenLabs-Stimme

In Grid können Sie, sobald die ElevenLabs-Stimme eingebunden ist auf erweiterte Einstellungen zugreifen und diese anpassen. Nachdem Sie Ihre ElevenLabs-Stimme ausgewählt haben, können Sie den Button „Erweitert“ auswählen.

In den erweiterten Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Eigenschaften der Stimme anzupassen.

**Stabilität** – Dies bestimmt den Ausdruck der Stimme. Ein niedrigerer Wert führt zu einer lebendigeren Stimme, während ein höherer Wert die Stimme monotoner machen wird.

**Ähnlichkeit** – Dies bestimmt, wie genau die Stimme der Originalaudioaufnahme entspricht. Wenn der Wert zu hoch ist, kann dies zu mehr Inkonsistenzen in der Stimme führen, z. B. zusätzliche „ähms“, „uhs“ und Störungen.

**Stil-Übertreibung** – Dies bestimmt die Variation im Stil der Stimme. Wenn der Wert hoch ist, wird die Stimme mehr Variation aufweisen, aber dies kann zu zusätzlichen Inkonsistenzen führen.

Außerdem können Sie in den erweiterten Einstellungen das Modell ändern. Standardmäßig ist in Grid das Modell auf „Eleven Multilingual v2“ eingestellt. Wir empfehlen, es auf diesem Modell zu belassen, aber Sie können das Modell ändern, wenn es für Ihre Stimme besser klingt, da nicht alle Sprachen in allen Modellen unterstützt werden.