

Bearbeitungsmodus in Grid for iPad ausstellen

Nutzer:innen können Inhalte versehentlich verändern – zum Beispiel, wenn sie unbeabsichtigt den Bearbeitungsmodus öffnen.

Hier finden Sie eine Anleitung, den Bearbeitungsmodus auszustellen.

1. Grid for iPad verlassen
2. Öffnen Sie die Einstellungen auf dem iPad
3. Scrollen Sie in der linken Leiste bis zu Apps
4. Nun werden Ihnen alle Apps aufgelistet. Wählen Sie Grid for iPad
5. Den Schieberegler bei „Optionen anzeigen“ auf „Aus“ (grau) stellen

