

Wählen Sie Ihren Wortschatz

Beim erstmaligen Einsatz von Super Core besteht die Möglichkeit, zwischen einer Version für Kinder sowie einer Version für Jugendliche und Erwachsene zu wählen. Dadurch lässt sich das Vokabular auswählen, das den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzerin bzw. des jeweiligen Nutzers am besten entspricht.

Dies bedeutet auch, dass ein Benutzer mit zunehmendem Alter die Möglichkeit hat, seinen Wortschatz zu erweitern. Der Kernwortschatz und der erweiterte Kern bleiben zwischen beiden Versionen gleich. Die Hauptunterschiede liegen in den dynamischen Spalten und den Themenseiten.

Kind



- Häufig verwendetes Kernvokabular
- Schwerpunkt auf lustigen und vertrauten Spielaktivitäten, z.B. Seifenblasen und Autos
- Abgespeicherte Nachrichten für eine schnelle Kommunikation
- Vokabular für tägliche Routinen, z.B. Waschen und Anziehen
- Kinderfreundlicher Wortschatz für viele andere von Themen

Teenager und Erwachsener



- Hochfrequentes Kernvokabular
- Fokus auf Aktivitäten des täglichen Lebens und der Freizeit, z.B. abhängen

- Individualisierbare Phrasen für mehr Unabhängigkeit
- Zusätzliche Themen für Erwachsene, z.B. Pflege
- Spezifisches erwachsenengerechtes Vokabular, z.B. Schimpfwörter

Sobald Sie Ihre Version ausgewählt haben, werden Sie zu Ihrer Startseite weitergeleitet. Super Core wird daraufhin jedes Mal, wenn Sie es verwenden, mit dieser Startseite geöffnet. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt auf spezifisches, erwachsenengerechtes Vokabular umstellen wollen, können Sie dies über die Option *Einstellungen* und anschließend *Vokabular ändern* vornehmen.