


Voco Chat benutzen

Vokabular wählen

In Voco Chat sind zwei Vokabularstufen verfügbar – eine für Kinder und eine für Teenager und Erwachsene. Wenn Sie Voco Chat zum ersten Mal öffnen, können Sie wählen, welche Vokabularstufe Sie verwenden möchten, und es werden Ihnen weitere Informationen über die wichtigsten Unterschiede zu Verfügung gestellt.

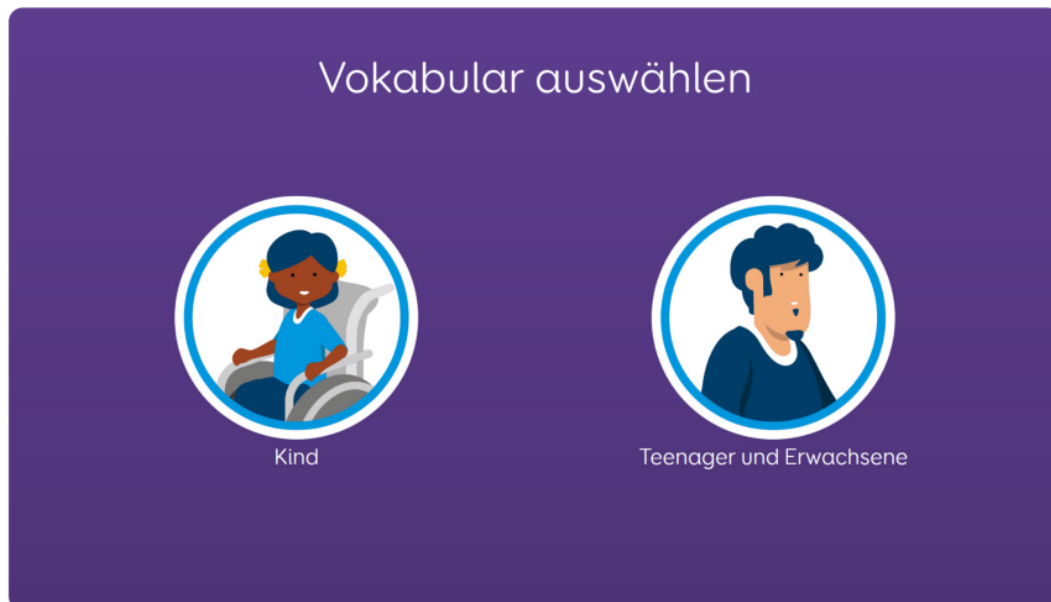

Das **Kindervokabular** beinhaltet spezifische Themen für Kinder (z. B. Spielsachen, Spielplatz, Zaubern) und Vokabular zum Spielen (z. B. Seifenblasen, Autos).

Das **Vokabular für Teenager und Erwachsene** beinhaltet spezifische Themen für Erwachsene (z.B. Beziehungen, Bankwesen, Schimpfwörter) und Vokabular für Freizeit und unabhängige Aktivitäten (z.B. Kneipe, Sport, Gärtnern).

Seiten mit personalisierten Informationen wie **Über mich** und Personen sind in beiden Vokabularstufen vorhanden, sodass Nutzer:innen leicht zwischen den Vokabularstufen wechseln können, ohne diese personalisierten Informationen zu verlieren.

Die Vokabularstufe kann jederzeit leicht geändert werden, indem Sie zu **Mein**

Werkzeugkasten → Einstellungen → Mehr gehen und dann 'Vokabular ändern' auswählen.