

Das Smartbox-Konto

Mit einem Smartbox-Konto können verschiedene Funktionen in Grid genutzt werden wie die Remote-Bearbeitung, die Online-Synchronisation von Nutzerdaten sowie das Teilen von Seitensets als Online-Grids.

Erstellen eines Smartbox-Kontos

Wechseln Sie in die Einstellungen (F10), wählen Sie Konten und dann Smartbox. Um ein neues Konto anzulegen, wählen Sie Erstellen. Geben Sie dann die erforderlichen Daten ein und bestätigen mit Benutzerkonto erstellen.

Sara

Eingabeeinstellungen

Sprachausgabe

Schreiben

Symbole

Konten

Kontakte

Internet

Seitenset

Telefon

Computer

Umfeldsteuerung

Lizenzen

← Ihr Smartbox-Konto

Erstellen Sie Ihr Smartbox-Konto, um sich auf mehreren Geräten anzumelden und Seitensets mit der Online-Grids-Community zu teilen

E-Mail-Adresse
sara.brenner@rehavista.de

Wählen Sie Ihr Passwort
.....

Wiederholen Sie Ihr Passwort
.....

☐ Nein ☒ Halten Sie mich mit Neuigkeiten über Grid 3 und Smartbox auf dem Laufenden

Durch An klicken von Benutzerkonto erstellen stimmen Sie [Nutzungsbedingungen](#) and [Datenschutzrichtlinie](#) zu.

Benutzerkonto erstellen Abbrechen

Am Smartbox-Konto anmelden


Wechseln Sie in die Einstellungen (F10), wählen Sie Konten und dann Smartbox. Hier können Sie Ihr vorhandenes Smartbox-Konto Anmelden.

Verbinden eines Kontos bei Dropbox

Dropbox ist ein frei verfügbarer Dienst, über den man Daten online speichern und zwischen Geräten synchronisieren kann. Grid verwendet Dropbox für die Remote-Bearbeitung. Wählen Sie in

den Konten Dropbox – Verbinden.

Sollten Sie schon eine Dropbox eingerichtet haben, verbinden Sie an dieser Stelle einfach Ihr Dropbox-Konto. Sie können aber auch von hier aus ein Dropbox-Konto erstellen.

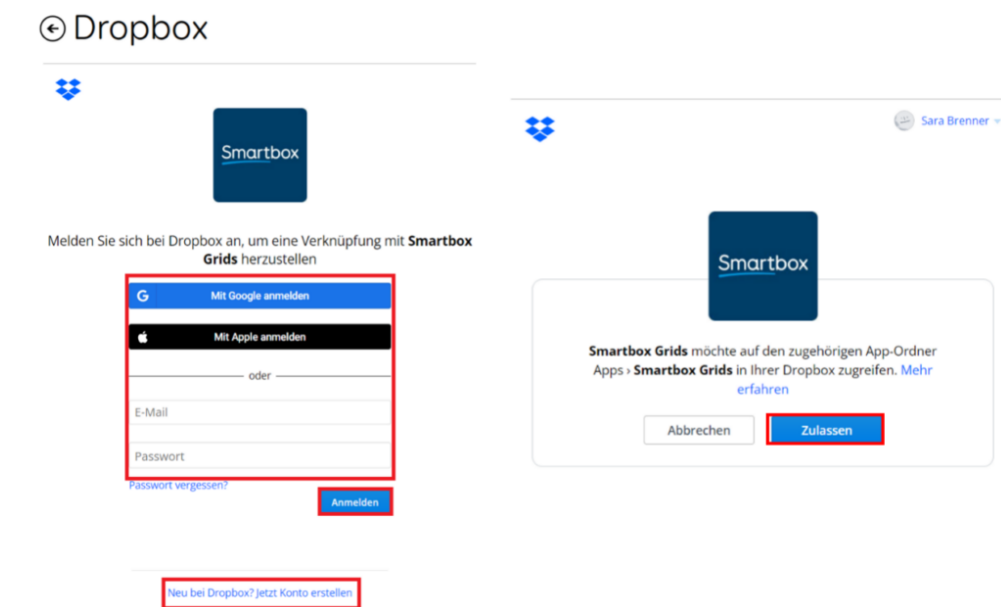

Nach erfolgreicher Verknüpfung Ihres Dropbox-Kontos in Grid 3 müssen Sie noch Zulassen, dass

die Software auf den eigenen Ordner in der Dropbox zugreifen darf. Dort werden die Seitensets zur

Remote-Bearbeitung gespeichert.

Jetzt ist Dropbox erfolgreich mit Grid 3 verknüpft und Sie können die Remote-Bearbeitung einrichten!

Remote-Bearbeitung einrichten

Um jemandem die Remote-Bearbeitung Ihrer Seitensets zu ermöglichen, sind Registrierungen für

ein Smartbox- sowie ein Dropbox-Konto erforderlich. Die Remote-Bearbeitung ermöglicht es anderen Personen (z.B. PädagogInnen, TherapeutInnen), Ihre Seitensets von einem anderen Computer aus zu bearbeiten. Um jemandem die Remote-Bearbeitung zu ermöglichen, gehen Sie in

die Einstellungen – Konten – Remote – Bearbeiter. Geben Sie die E-Mail-Adresse des/der gewünschten Bearbeitenden ein und klicken Sie Hinzufügen.

Diese Person erhält daraufhin eine E-Mail mit dem Hinweis, dass sie als Remote-Bearbeiter:in für

Ihre Seitensets freigeschaltet ist und wird gebeten, Grid zu installieren und ein Smartbox-Konto zu erstellen.

Hinweis: Man benötigt keine Grid-Lizenz, um die Seitensets von jemand anderem zu bearbeiten!

Die Seitensets von anderen Grid-NutzerInnen bearbeiten

Wenn Sie die Berechtigung zur Remote-Bearbeitung per E-Mail erhalten haben, starten Sie Grid

(falls erforderlich laden Sie sich die Software zunächst herunter, der Link ist in der E-Mail zu finden).

Wählen Sie Remote-Bearbeitung auf dem Startbildschirm und loggen sich in Ihr Smartbox-Konto

ein. Falls Sie noch kein Smartbox-Konto haben, können Sie hier auch eines anlegen.

Anmelden'." data-bbox="68 632 663 817"/>

Es erscheint eine Liste mit NutzerInnen, die Ihnen die Freigabe zur Remote-Bearbeitung gegeben

haben. Wählen Sie den gewünschten Nutzer / die gewünschte Nutzerin aus. Sie gelangen zu Meine

Seiten des Nutzers / der Nutzerin. Von dort aus können Sie Seitensets hinzufügen und bearbeiten.

Hinweis: Bei bestehender Internetverbindung werden Ihre Änderungen sofort übertragen. Sollte

sich der/die Nutzer:in jedoch gerade im bearbeiteten Seitenset befinden, erhält er/sie eine Meldung,

dass eine aktuellere Version des Seitensets verfügbar ist. Die Änderungen werden dann beim erneuten Öffnen des Seitensets übertragen.