

Dynamische Spalten

Super Core verwendet dynamische Spalten, um Kernwörter mit aktivitätsspezifischem Vokabular zu kombinieren, das sich auf reale Situationen, Alltagsroutinen und Spielaktivitäten bezieht.

Diese beiden Spalten ermöglichen den Wechsel zu verschiedenen nützlichen Seiten, die jeweils Wörter zur Kommunikation über tägliche Aktivitäten, Gefühle, Orte, Positionen, Zeit, Schule und mehr enthalten.



Super Core 50

Vokabular für Jugendliche und Erwachsene

Dynamische Spalten



spielen Mit der Eisenbahn spielen

Aktivitäten

Die Aktivitäten "Alltag"/"alltäglich" und "Spielen" bzw. "Freizeit" enthalten Wörter und Redewendungen für Alltagsroutinen und Spielaktivitäten. Sie werden neben dem Kernvokabular angezeigt und bieten dem Lernenden die Möglichkeit, auf funktionale, vertraute und unterhaltsame Weise mit dem Lernen und Kommunizieren zu beginnen.

Die aufgeführten Alltagsaktivitäten sind oft Teil der Routine eines Kindes, wie z. B. sich anziehen, unterwegs sein und schlafen.

Im Vokabular für Kinder gibt es eine Reihe von Spielaktivitäten, vom sensorischen Spielen mit Seifenblasen, Luftballons und Sand bis hin zum kreativen Spielen mit Bausteinen, Basteln und Zeichnen, Rollen und Fantasiespiel sowie (Vor-)Lesen.

Im Vokabular für Jugendliche und Erwachsene finden sich an dieser Stelle viele Freizeitaktivitäten, einschließlich "abhängen", "gamen", "Sport" und "Musik".

Alltagsaktivitäten



Spielaktivitäten



Diese Seiten enthalten auch verschiedene nützliche Redewendungen zu den jeweiligen Aktivitäten. Fragen wie „Können wir in den Park gehen?“ oder Informationen wie „Das Wasser zu heiß ist“ beim Waschen können so schnell kommuniziert werden.



Ausflüge Schnelle Sätze für Ausflüge

Tipp: Tipp: Die Aktivitätenseiten „Spielen“ umfassen alle dieselben Phrasen, um Sicherheit im Umgang mit ihnen zu geben (z. B. „Ich möchte spielen“, „Ich bin dran“, „Spielst du mit mir?“ im Vokabular Kind und „Ich kann das“ oder „Ich weiss nicht“ im Teenager/Erachsenen-Nutzer). Dies kann dem Lernenden helfen, erfolgreich mit allen im Umfeld zu interagieren

Phrasen Übersicht



Super Core 50 Vokabular für Jugendliche und Erwachsene

Im Vokabular für Jugendliche und Erwachsene befinden sich umfangreichere Phrasen für Alltag und Freizeit. Zur Personalisierung können diese Sätze auf einfache Art bearbeitet und ergänzt werden.

Bilden Sie dazu wie üblich einen Satz im Mitteilungsfenster und klicken Sie auf das Feld "Satz hinzufügen".

Über das Feld "Satz löschen" und einen Klick auf das Feld mit dem jeweiligen Satz können Sätze entfernt werden.