

Einrichtung des Smartphones

1. Entwickleroptionen aktivieren


- Gehe zu den Einstellungen
- Suche nach der Einstellung „Build-Nummer“



- Tippe siebenmal auf die Buildnummer, um den Entwicklermodus zu aktivieren.

2. USB-Debugging aktivieren

- Gehe zu den Einstellungen
- Suche nach der Einstellung „USB-Debugging“

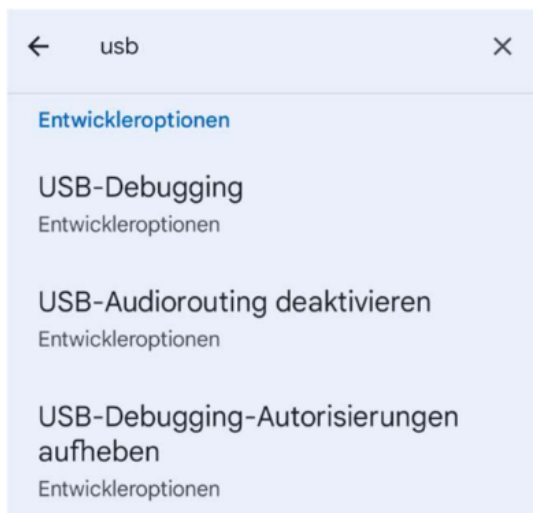

- USB-Debugging aktivieren

3. Verbinde dein Android-Handy über ein USB-Kabel mit dem PC

- Beim ersten Start von DroidPilot auf diesem PC USB-Debugging immer erlauben

