

Einstellungen zum Datenschutz

Mit dem Grid 3 Update v97 wurde ein neuer Einstellungsbereich hinzugefügt: die Einstellungen zum Datenschutz.

Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen, zu steuern, wie Grid 3 Ihre Daten speichert und verwendet. Sie bestehen aus vier auswählbaren Optionen.

Chatverlauf

Wenn diese Option aktiviert ist, merkt sich Grid, was Sie eingeben. Wenn Sie Zellen für den Chatverlauf in Ihrem Grid-Set haben, können Sie schnell auf zuvor verwendete Sätze zugreifen.

Standort

Wenn diese Option aktiviert ist und Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist, speichert Grid Standortinformationen zusammen mit Ihrem Chatverlauf. Dies hilft dabei, die Relevanz der vorgeschlagenen Sätze zu verbessern. Die Standortfreigabe kann nur aktiviert werden, wenn auch der Chatverlauf aktiviert ist.

Online-KI-Tools

Grid kann Künstliche Intelligenz nutzen, um Ihnen eine effizientere Kommunikation zu ermöglichen. Solange diese Einstellung aktiviert ist, haben Sie Zugriff auf diese Tools. Wenn sie deaktiviert ist, können KI-Tool-Zellen zwar weiterhin in Ihren Seitensets sichtbar sein, jedoch erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie versuchen, sie zu verwenden – mit dem Hinweis, dass diese Einstellung aktiviert sein muss.

Nutzungsdaten freigeben

Wenn Sie diese Option aktivieren, erlauben Sie Grid anonyme Telemetriedaten über Ihre Nutzung zu sammeln. Diese Informationen können dazu beitragen, Probleme zu lösen und die

Entwicklung neuer Funktionen zu unterstützen.

Unsere Datenschutzerklärung können Sie über den blauen Text am unteren Rand der Einstellungen öffnen und lesen.