

Alltagswörter




Die letzte Spalte blauer Felder ermöglicht NutzerInnen Zugriff zu einer breiten Auswahl kategorisierter Worte für den Alltag. Darunter:

Leute



Hier können NutzerInnen schnell auf die nützlichsten Wörter zugreifen aber auch zu Seiten mit spezifischen Personen blättern, wie Meine Familie und Meine Freunde. Für die NutzerInnen wichtige Personen und Namen werden an dieser Stelle eingegeben.


Es gibt auch Seiten für weitere Personen, wie Mutter, Bruder, Cousin unter Familienwörter, Junge, Frau, Kind unter Leute und Arzt, Receptionist und Putzfrau unter Berufe.

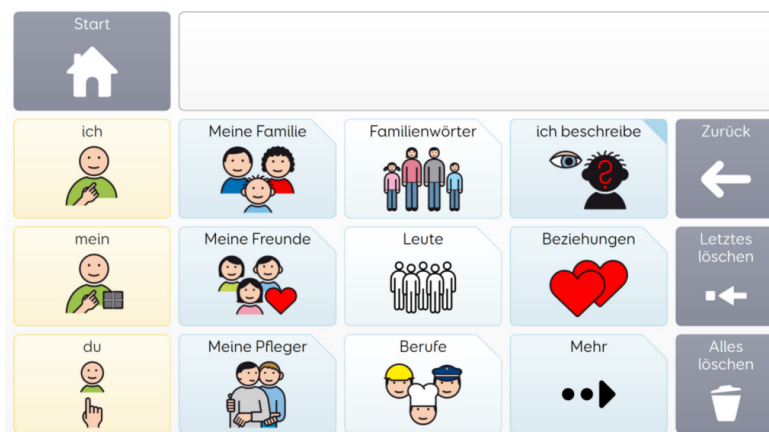


In der letzten Spalte gibt es eine Verknüpfung zu einer Seite, welche NutzerInnen beim Beschreiben von Personen unterstützt, wenn man beispielsweise den Namen einer Person nicht kennt. NutzerInnen können mit Hilfe von Merkmalen wie groß, blonde Haare, Brille die Person hier beschreiben. Es gibt auch eine Verknüpfung zu Beziehungen, wo es Aussagen für romantische oder intime Beziehungen gibt.

Es gibt hier viel Platz, Namen von weiteren Leuten in bestehende oder Beispielskategorien einzufügen. Wenn der NutzerInnen verschiedene Leute in verschiedenen Zusammenhängen treffen, kann man diese Namen zu einer eigenen Kategorie hinzufügen.

Orte

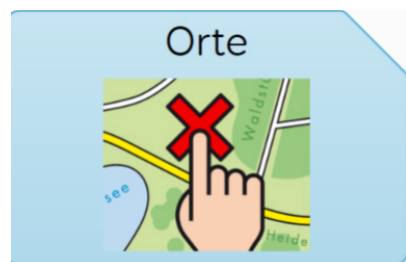

Diese Seite bietet Vokabular in Zusammenhang mit verschiedenen Orten. Von den häufigsten und nützlichsten Wörtern in der ersten Spalte ("gehen", "nach Hause", "hier") bis hin zu anderen kategorisierten Orten, darunter drinnen, draußen, Gebäude und Geschäft. Häufig verwendete Präpositionen – wie "in", "auf", "unter", "hoch", "runter" befinden sich auf der Seite Positionen.

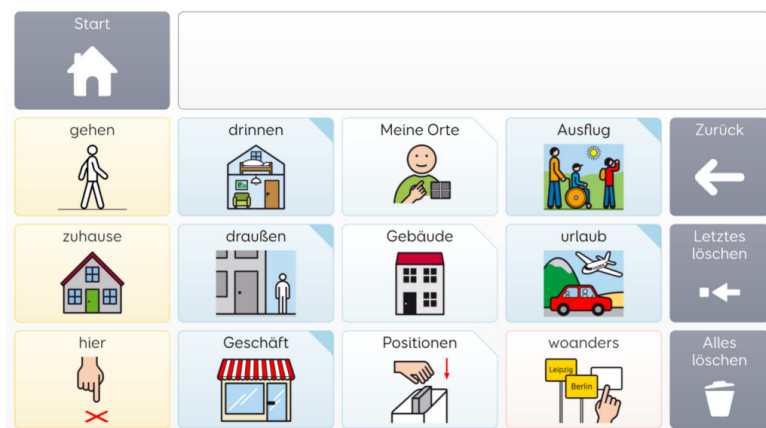


Viele Felder auf der Seite beispielsweise bei Gebäuden oder Geschäft sind weiter verknüpft zu einer **Gesprächsseite** voller nützlicher Wörter, wenn man über diese Orte sprechen möchte.

Zum Beispiel gibt es in Gebäude Verknüpfungen zu Seiten, um über ein Café, ein Krankenhaus oder das Schwimmbad zu sprechen. Im Bereich Geschäft führt jeder spezielle Laden NutzerInnen zu entsprechendem Vokabular zum Einkaufen.




Es gibt Platz, die Lieblings- und besonderen Orte der NutzerInnen unter Meine Orte einzutragen, sowie Vokabular um ein Gespräch über Ausflüge und Urlaub zu führen.

Mehr Wörter

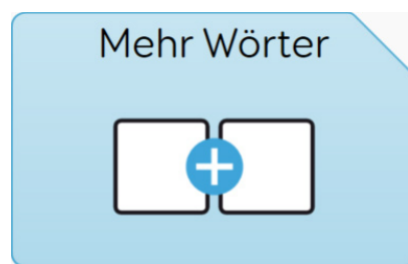

Das letzte Feld auf der Voco Chat Startseite ist das Mehr Wörter Feld. Dieser Bereich ist in drei Spalten nach Themen geordnet.

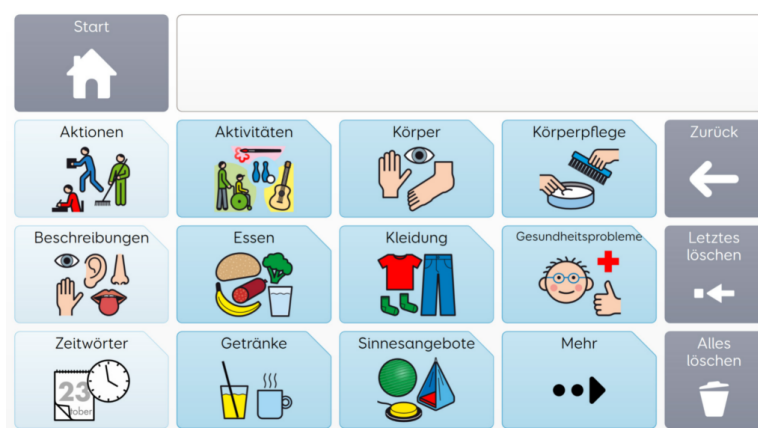

Diese Themen-Seiten sind Gesprächsseiten mit einer Spalte mit Kernvokabular, gefolgt von weiteren Wörtern bezogen auf das jeweilige Thema.



Manche Themen enthalten Verknüpfungen zu weiterem Vokabular wie Kleidung → Unterwäsche.

Viele Themen haben nur einige Beispielfelder und viel freien Platz, sodass NutzerInnen ihr eigenes Vokabular hinzufügen können. Z.B. unter Essen → Frühstück gibt es einige Beispiele bekannter Frühstücksprodukte und viel freien Platz für personalisierte Begriffe.

Über die Mitteilungspfade kann auf alle Themen zugegriffen werden, aber manche NutzerInnen wollen diese Themen vielleicht direkt öffnen, was mit der Verknüpfung über Mehr Wörter möglich ist.