

FAQ

F: Die IntelliGaze-Tastatur überdeckt die Texteingabe in DroidPilot. Wie kann ich meine tatsächliche Texteingabe sichtbar machen?

A: Verwende die Flip-Positionstaste auf der Tastatur, um die Tastatur aus dem Weg zu schieben.

Diese Taste ist nur sichtbar auf der obersten Seite, wenn nur ein Tastaturlayout ausgewählt ist.



F: Wie kann ich die Position des DroidPilot-Fensters nach einer Drehung des Fensters neu zentrieren?

A: Verwende die Maximieren-Schaltfläche in der App-Leiste, um das Fenster zu zentrieren.



F: Wie kann ich mit der Android-Telefon-App Audioanrufe tätigen?

A: Die Spracheingabe für das Telefon erfolgt derzeit nur über die Luft. Stelle den Anruf auf Lautsprecher und platziere das Telefon in der Nähe des Lautsprechers des PCs. Nutze während des aktiven Telefonats deine bevorzugte Kommunikations-Software.

F: Meine Kamera trennt sich während des Betriebs, was kann ich tun?

A: Der Stromverbrauch beim Laden des Telefons kann problematisch sein. Versuche, ein vollständig geladenes Telefon oder eine Powerbank zu verwenden.

F: Wie entsperre ich mein Telefon mit der Augensteuerung?

A: Verwende eine PIN, um den Zugriff auf dein Telefon zu schützen. Drücke den Entsperrknopf in der DroidPilot-App-Leiste. Rufe die IntelliGaze-OSK auf, tippe die PIN ein und drücke Enter.

Der

gespiegelte Bildschirm wird schwarz sein, während der Sperrbildschirm aktiv ist.

F: Der AppMenüknopf der „Rotieren“ funktioniert nicht.

A: Stelle sicher, dass du die automatische Drehung auf deinem Telefon deaktivierst. Der Startbildschirm von Android kann nicht gedreht werden.

F: Maus-Klicks oder Tastaturtasten funktionieren auf meinem Telefon nicht.

A: Aktiviere diese Berechtigung in den Entwickleroptionen deines Telefons.

