

# Fehlerbehebung bei der Fix-Funktion und Benachrichtigungen

Wenn bei der Verwendung der Fix-Funktion ein Problem auftritt, zeigt Grid eine Benachrichtigung an. Die Einzelheiten zu jeder Benachrichtigung sind unten aufgeführt.

Hinweis: Direkt nach der Nutzung von Fix ist die Fix-Zelle vorübergehend nicht verfügbar. Sobald Sie eine Änderung im Schreibbereich vornehmen, wird die Verwendung von Fix wieder möglich.

## Benachrichtigung

Aktivieren Sie die Online-KI-Tools, um diese Funktion zu nutzen – (Einstellungen – Datenschutz)

Keine Internetverbindung

Problem mit der Verbindung zum Onlinedienst

Die Online-Tools werden derzeit gewartet. Bitte versuchen Sie es in 10 Minuten erneut.

Die Online-Tools sind derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es in 10 Minuten erneut.

Bitte aktualisieren Sie Grid, um diese Funktion nutzen zu können.

## Details

Die Online-KI-Tools sind für den aktiven Grid-Benutzer nicht aktiviert. Aktivieren Sie die Einstellung, um Fix zu verwenden.

Das Gerät ist offline oder das Netzwerk erlaubt keinen Zugriff auf den Webdienst.

Es gibt einen Fehler bei der Verbindung zum Webdienst. Überprüfen Sie die Internetverbindung und die zugelassenen Verbindungen.

Der Webdienst befindet sich in einer Wartung.

Der Webdienst hat unerwartete Ausfallzeiten.

Der Webdienst wurde aktualisiert und Grid muss ebenfalls aktualisiert werden, um die Funktion zu nutzen.