

Geführter Zugriff ohne Home-Button


„Geführter Zugriff“ verhindert, dass der/die Nutzer:in ein Programm beendet bzw. zwischen Programmen wechselt.

Das aktuell ausgeführte Programm (z.B. Grid for iPad) kann in diesem Fall nur mit einem Code beendet werden.

Um „Geführter Zugriff“ einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Einstellungen → Bedienungshilfen → (Allgemein) Geführter Zugriff

- „Geführter Zugriff“ aktivieren (Schieberegler nach rechts streichen).
- In den Codeeinstellungen einen Code für „Geführter Zugriff“ festlegen.

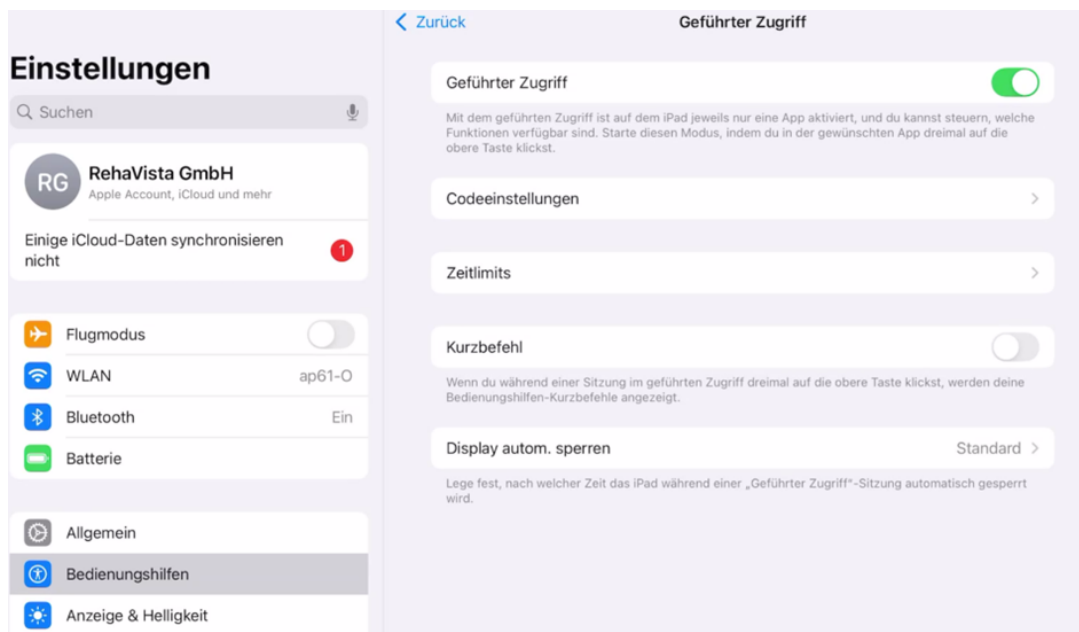

- Die Einstellungen beenden und das Programm öffnen, das in „Geführter Zugriff“ bedient werden soll.
- Drücken Sie 3 x schnell auf den *Ein-/Aus-Knopf* an der Seite des Gerätes. Sie erhalten nun die Möglichkeit den geführten Zugriff über „Optionen“ individuell anzupassen und so z.B. festzulegen, ob die Lautstärketasten genutzt werden dürfen.



Nach der Auswahl von „Starten“ oder „Fortsetzen“ (oben rechts) erscheint kurz die Meldung „Geführter Zugriff gestartet“ auf dem Bildschirm und die gewählte App befindet sich nun im geführten Zugriff.

Geführten Zugriff Starten und Beenden:

Drücken Sie 3 x schnell auf die seitliche Taste (Ein-/Aus Knopf)

HINWEIS: Sie können den geführten Zugriff auch über das iPad Kontrollzentrum starten, (außerhalb des geführten Zugriffs am oberen rechten Bildschirmrand nach unten wischen)

Gerät aus dem geführten Zugriff aufwecken:

Es gibt hier 3 Möglichkeiten:

- Tippen Sie kurz auf die seitliche Taste des Geräts (Ein-Aus-Knopf)
- Tippen Sie kurz auf das Display des Geräts und wischen dann ausgehend von dem weißen Balken am unteren Bildschirmrand von unten nach oben
- Tippen Sie kurz auf das Display des Geräts und wecken das Gerät über den virtuellen Home-Button des „AssistiveTouch“ auf (siehe Spickzettel „AssistiveTouch“).

„Geführter Zugriff“ beenden:

Drücken Sie 3 x schnell den Ein-/Aus-Knopf. Geben Sie Ihren Code ein und wählen Sie oben

links „beenden“. Die Meldung „Geführter Zugriff beendet“ erscheint kurz auf dem Bildschirm.