

GoTalk NOW – Bearbeitungsmodus sperren


Um den Nutzer daran zu hindern, selbstständig in den Bearbeitungsmodus zu wechseln und ggf. unbeabsichtigt Einstellungen zu verändern, empfehlen wir das Einrichten eines Passwortes zum Verlassen des Nutzermodus. In diesem Spickzettel zeigen wir Ihnen, wie es geht:

Rufen Sie den Bereich *Einstellungen* auf dem Startbildschirm von GoTalk NOW auf.




Aktivieren Sie den Menüpunkt *Passwort zum Verlassen des Nutzermodus* und richten ein Passwort ein. Standardmäßig lautet das Passwort „0000“; wir empfehlen, dies in ein sicheres Passwort zu ändern.

Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie mit *Close*. Das gewählte Passwort wird im Menüpunkt *Passwort einrichten* angezeigt.

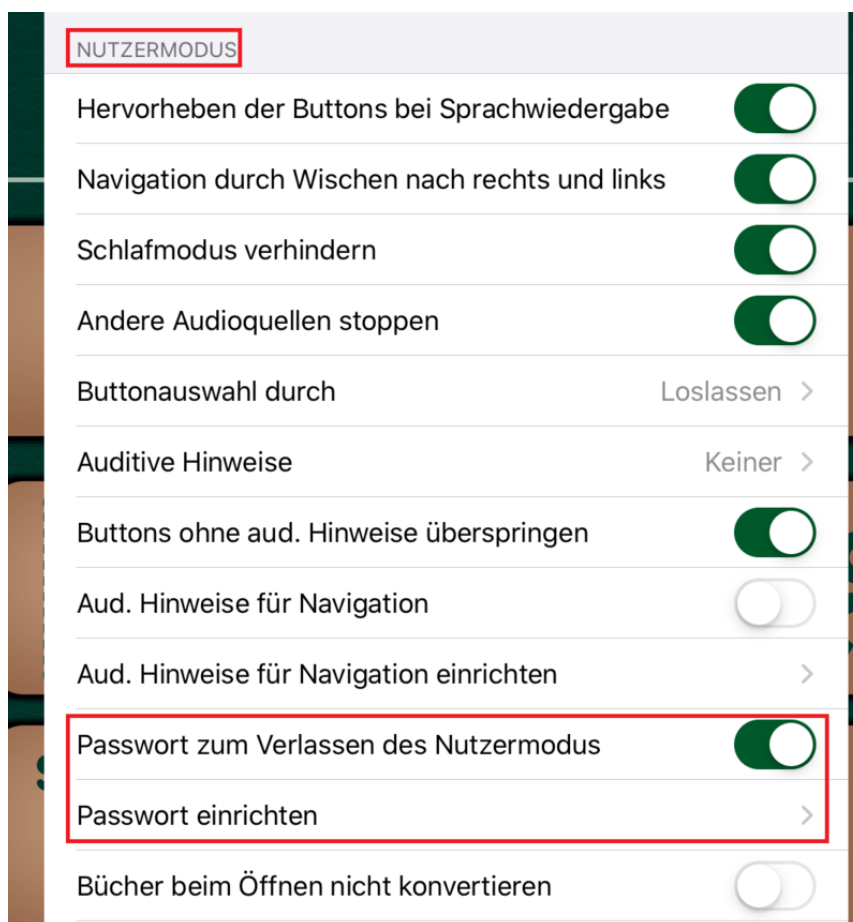

Sobald Sie nun den Nutzermodus verlassen möchten (mit drei Fingern von oben nach unten wischen oder den Homebutton 8 Sekunden gedrückt halten), erscheint ein Feld zur Passworteingabe, wo Sie Ihr gewähltes Passwort eingeben müssen.

Tipp: Sollten Sie das Passwort vergessen haben, verlassen Sie das Programm GoTalk NOW und wechseln Sie in die Einstellungen Ihres iPads. Dort scrollen Sie nach unten zu den installierten Apps und drücken auf GoTalk NOW. Rechts erscheinen nun die GoTalk NOW-Einstellungen. Dort deaktivieren Sie den Menüpunkt Passwort zum Verlassen des Nutzermodus.

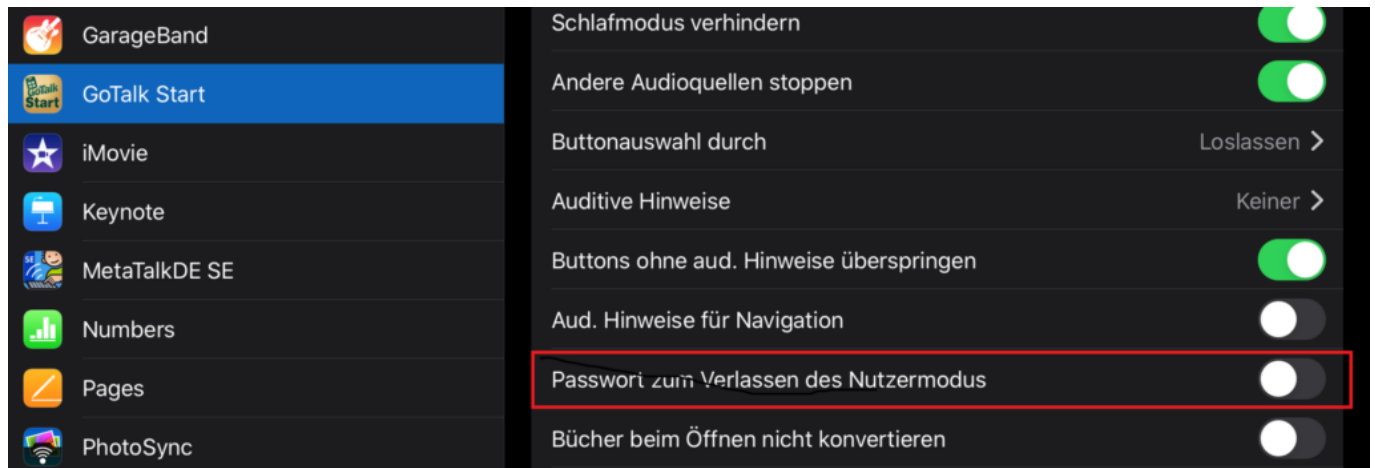

Sobald Sie GoTalk NOW wieder öffnen, erscheint keine Passwortabfrage mehr und Sie haben die Möglichkeit, ein neues Passwort in den Einstellungen zu vergeben bzw. das aktuelle Passwort nachzuschauen.