

GoTalk NOW – Daten per USB-Stick sichern und wiederherstellen

Voraussetzungen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes bereithalten:

- Einen USB-Stick, formatiert als FAT32 oder exFAT (kompatibel mit iPadOS).
- Einen USB-C-auf-USB-Adapter, falls
- Die aktuelle Version der GoTalk App .

Die Dateien-App ist auf Ihrem iPad installiert (standardmäßig bei iPadOS enthalten)


USB-Stick anschließen


- Verbinden Sie den USB-Stick mit dem iPad (ggf. über den Adapter).
- Öffnen Sie die Dateien-App.
- Unter „Speicherorte“ erscheint der USB-Stick (z. B. „Untitled“ oder „SanDisk“).

MetaTalk Vokabular auf den USB-Stick exportieren


- Öffnen Sie die GoTalk -App.
- Wechseln Sie auf die Startseite der App
- Unterhalb von den Schaltflächen “Herunterladen” und “Hilfe” Finden Sie das aktuell verwendete Kommunikationsbuch.



- Tippen Sie nun auf das untenstehende Kommunikationsbuch (in unserem Beispiel ZAK...)
- Es öffnet sich ein Menü, in dem sie bei dem Kommunikationsbuch, was sie sichern möchten auf  tippen.
- Nun Wählen Sie "Komprimiertes Buch teilen" aus.

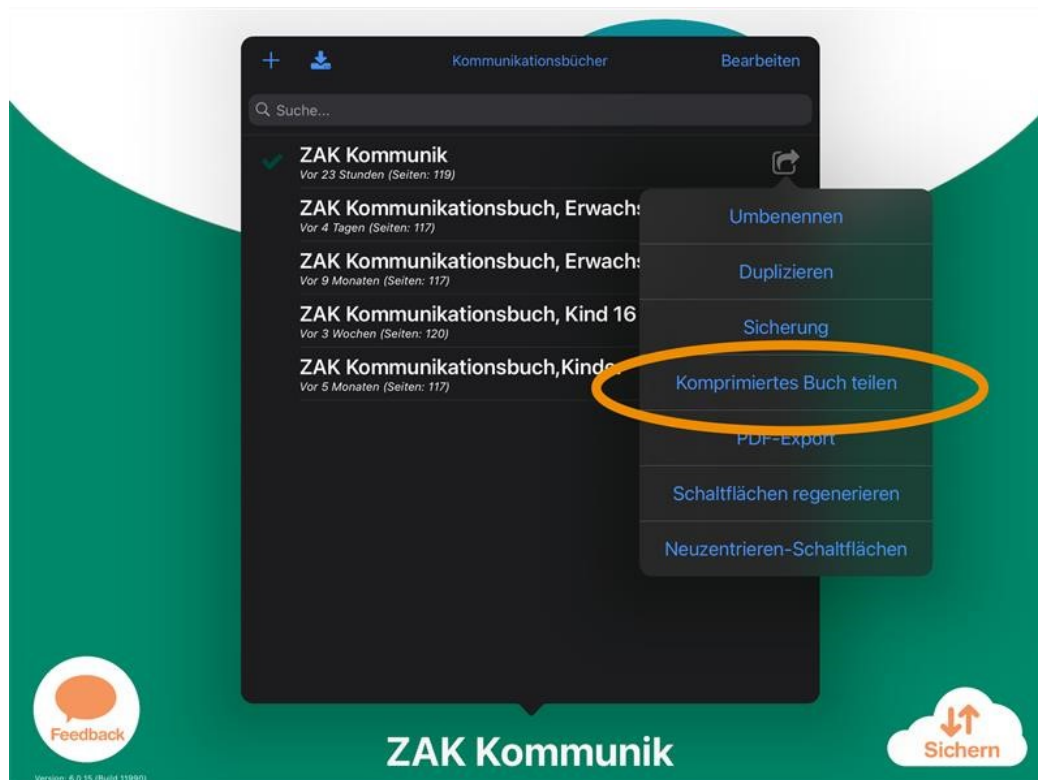


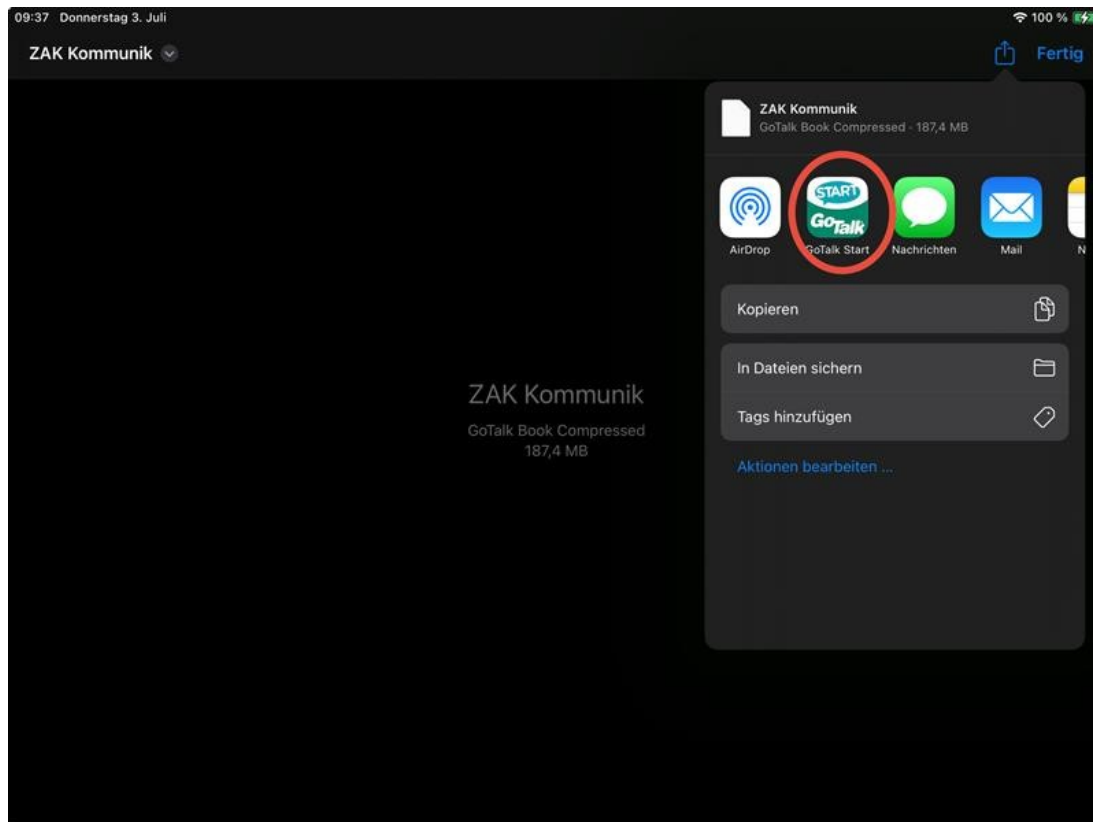
- Wählen Sie nun In Dateien Sichern aus

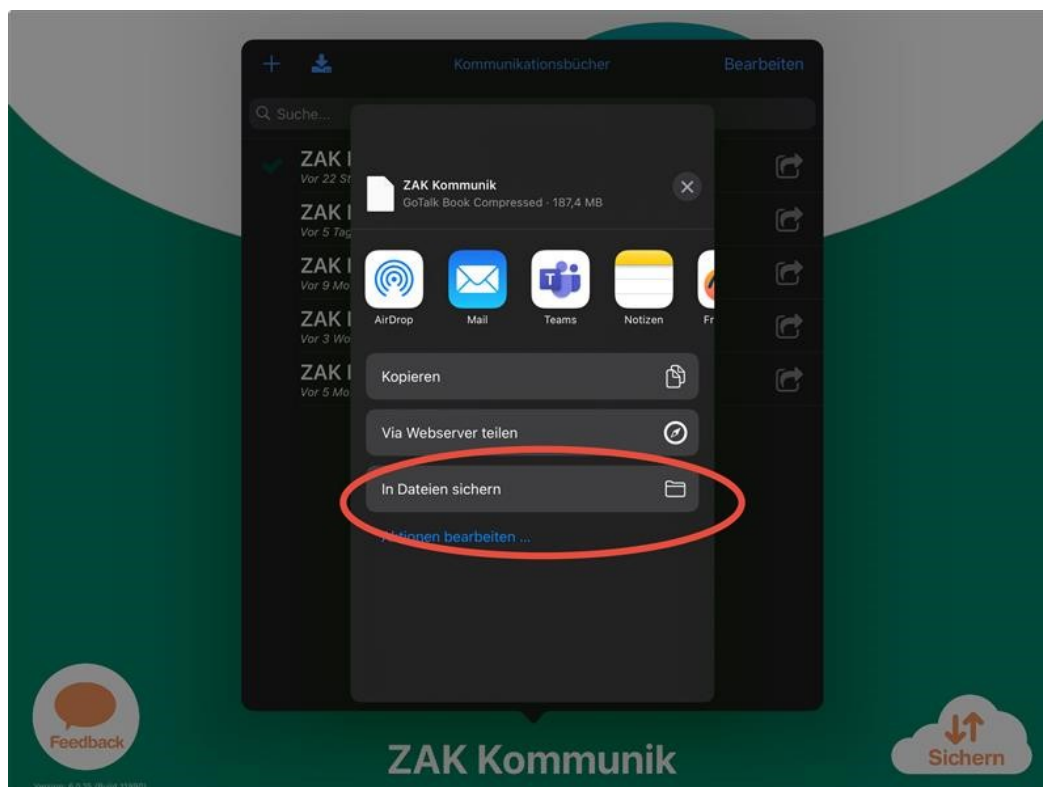


- Wählen Sie hier Ihren USB Stick aus und gehen Sie links auf Sichern.

Datensicherung vom USB-Stick wiederherstellen

- Öffnen Sie die Dateien App
- Wählen Sie den USB-Stick aus und Tippen Sie auf Ihre Sicherung
- Tippen Sie auf das Teilen Symbol 
- Wählen Sie im Kontext Menü GoTalk aus



- Das System wechselt dann automatisch in die GoTalk App.
- Hier können sie einen neuen Namen für das Kommunikationsbuch wählen. Sollte schon ein Buch mit den Namen vorhanden sein, so müssen sie dem Buch einen neuen Namen geben. Anschließend tippen Sie auf Erstellen, um das Buch einzufügen.

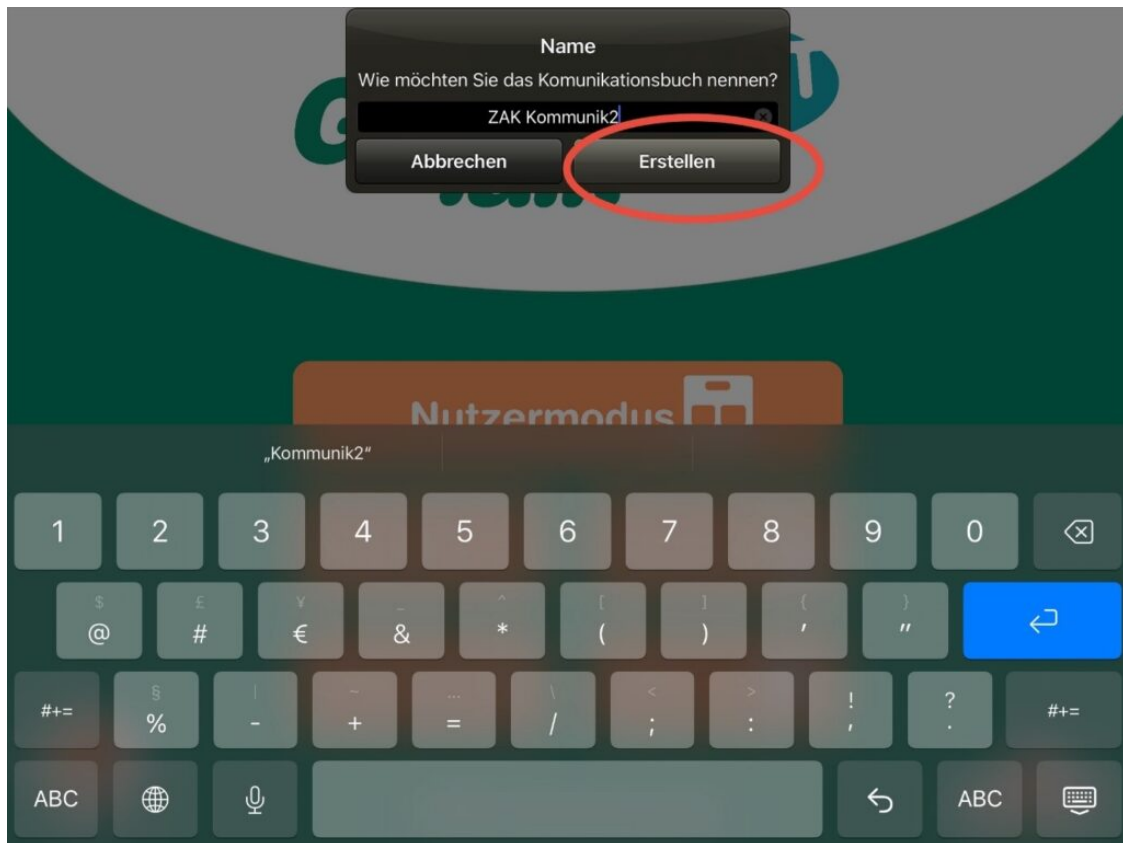

- Das Buch sollte sich nun in ihrem Bücherstapel befinden (siehe oben). Das Buch, was mit einem Haken markiert ist, ist das derzeit aktive Kommunikationsbuch.