

GoTalk NOW – Datensicherung über Dropbox

Eine Möglichkeit zur Sicherung Ihrer erstellten Kommunikationstafeln in der GoTalk NOW-Oberfläche ist die Sicherung in der Dropbox. So können Sie Ihre aktuellen Daten speichern, um sie ggf. wiederherzustellen oder mit anderen zu teilen.

Datensicherung – So geht's

HINWEIS: Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Sie können eine Verbindung über WLAN herstellen, indem Sie diese Funktion in den allgemeinen Einstellungen aktivieren.

Erstellen eines neuen Dropbox-Accounts und Verbinden mit diesem (nur notwendig, wenn KEIN Dropbox-Account vorhanden ist)

1. Wechseln Sie zunächst auf das GoTalk NOW Startmenü (wischen mit drei Fingern oder acht Sekunden „Home-Button“ drücken).
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Kommunikationsbuches am unteren Bildrand → Es öffnet sich das Menü zur Verwaltung der Kommunikationsbücher.
3. Wählen Sie hier bei dem zu sichernden Kommunikationsbuch „Sicherung“ und anschließend „Über Dropbox“.
4. Zum Verbinden mit Ihrem Dropbox-Account wählen Sie „Dropbox Account verlinken“, dann öffnet sich die Dropbox-Seite im Safari-Browser.
5. Wählen Sie hier beim ersten Verwenden „Konto erstellen“ und tragen Sie die entsprechenden Daten (E-Mailadresse und neues, ausgedachtes Kennwort) ein.
6. Bestätigen Sie die Eingabe über „Konto erstellen“, danach wählen Sie „Zulassen“, so dass GoTalk NOW einen Ordner in Ihrer Dropbox erstellt.
7. Das Gerät wechselt automatisch in das Kommunikationsbuch-Menü zurück.
8. Fahren Sie nun mit dem Punkt 3 von „Sicherung in Dropbox erstellen“ fort.

Verbindung mit bestehendem Dropbox-Account herstellen

1. Wechseln Sie zunächst auf das Go-Talk-Start-Menü (wischen mit drei Fingern oder acht Sekunden „Home-Button“ drücken).
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Kommunikationsbuches am unteren Bildrand → Es öffnet

sich das Menü zur Verwaltung der Kommunikationsbücher.

3. Wählen Sie hier bei dem zu sichernden Komm.-Buch „Sicherung“ und anschließend „Über Dropbox“.
4. Zum Verbinden mit Ihrem Dropbox-Account wählen Sie „Dropbox Account verlinken“, dann öffnet sich die Dropbox-Seite im Safari-Browser.
5. Geben Sie Ihre Zugangsdaten zum Dropbox-Account ein und bestätigen Sie mit „Anmelden“.
6. Wählen Sie „Zulassen“, so dass GoTalk NOW einen Ordner in Ihrer Dropbox erstellt.

Sicherung in Dropbox erstellen

1. Wechseln Sie zunächst auf das Go-Talk-Start-Menü (wischen mit drei Fingern oder acht Sekunden „Home-Button“ drücken).
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Kommunikationsbuches am unteren Bildrand → Es öffnet sich das Menü zur Verwaltung der Kommunikationsbücher.
3. Wählen Sie hier bei dem zu sichernden Kommunikationsbuch „Sicherung“ und in der eingeblendeten Auswahl „Über Dropbox“.
4. Gehen Sie auf „Sicherung zu Dropbox“ und
5. Geben Sie einen Namen für die Sicherung ein und bestätigen Sie mit „Erstellen“
 - HINWEIS: Geben Sie bitte für jede neue Sicherung einen neuen Ordernamen („Neu erstellen“) an, damit Sie Ihre Daten übersichtlich verwalten können und sie nicht versehentlich überschreiben.
6. Das Gerät erstellt die Sicherung und nach Fertigstellung gelangen Sie zurück zum Kommunikationsbuch-Menü.

Datenwiederherstellung über Dropbox

1. Wechseln Sie zunächst auf das Go-Talk-Start-Menü (wischen mit drei Fingern oder acht Sekunden Home-Button drücken).
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Kommunikationsbuches am unteren Bildrand → Es öffnet sich das Menü zur Verwaltung der Kommunikationsbücher.
3. Wählen Sie hier „Sicherung“ und in der eingeblendeten Auswahl „Über Dropbox“.
4. Gehen Sie auf „Wiederherstellen von Dropbox“.
 - HINWEIS: Durch diese Wiederherstellung werden die Daten aus der Dropbox in das bestehende Kommunikationsbuch importiert und die Inhalte überschrieben. Für den Fall, dass Sie ein zweites Kommunikationsbuch über die Wiederherstellung auf das

Gerät importieren wollen, folgen Sie der Anleitung „Erstellen eines weiteren Kommunikationsbuches über Dropbox“.

5. Wählen Sie den entsprechenden Ordner, der wiederhergestellt werden soll, dann wird die Wiederherstellung gestartet. Dies kann einige Minuten dauern.

Erstellen eines weiteren Kommunikationsbuches über Dropbox

1. Wechseln Sie zunächst auf das Go-Talk-Start-Menü (wischen mit drei Fingern oder acht Sekunden „Home-Button“ drücken).
2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Kommunikationsbuches am unteren Bildrand → Es öffnet sich das Menü zur Verwaltung der Kommunikationsbücher.
3. Wählen Sie „Neu erstellen“, um ein leeres neues Kommunikationsbuch anzulegen.
4. Geben Sie den Namen des Buches ein und bestätigen Sie mit „Erstellen“.
5. Das neue Buch wird erstellt und die GoTalk NOW-Oberfläche markiert das aktuell geöffnete Buch durch einen Haken an der rechten Seite.
6. Wählen Sie hier „Sicherung“ und in der eingeblendeten Auswahl „Über Dropbox“.
7. Gehen Sie auf „Wiederherstellen von Dropbox“.
8. Wählen Sie den entsprechenden Ordner, der wiederhergestellt werden soll.
9. Die Wiederherstellung wird gestartet, dies kann einige Minuten dauern.