


GoTalk NOW – Datensicherung über iTunes und Airdrop

Um den Verlust von Daten zu verhindern, sollten die Inhalte aus GoTalk NOW regelmäßig gesichert werden. Dieser Spickzettel ist eine Anleitung, um die vorhandenen Inhalte via iTunes oder Airdrop zu sichern. So können erstellte Inhalte einfach geteilt und gesichert werden.

HINWEIS: Zur Nutzung der Methode über iTunes müssen Sie das Programm auf Ihrem Computer installieren. Die Methode Airdrop kommt für Sie nur in Frage, wenn Ihnen noch ein weiteres Apple Gerät zur Verfügung steht (iPad, iPhone etc.).

Über iTunes:

- Schließen Sie das iPad per USB-Kabel an ihrem Computer an (in der Regel über das Kabel, mit dem Sie das Gerät auch aufladen)
- bestätigen Sie auf dem iPad die Aufforderung, dass sie dem Computer vertrauen
- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie *als neues iPad konfigurieren*.
- Klicken Sie nun oben links auf das Geräte Symbol

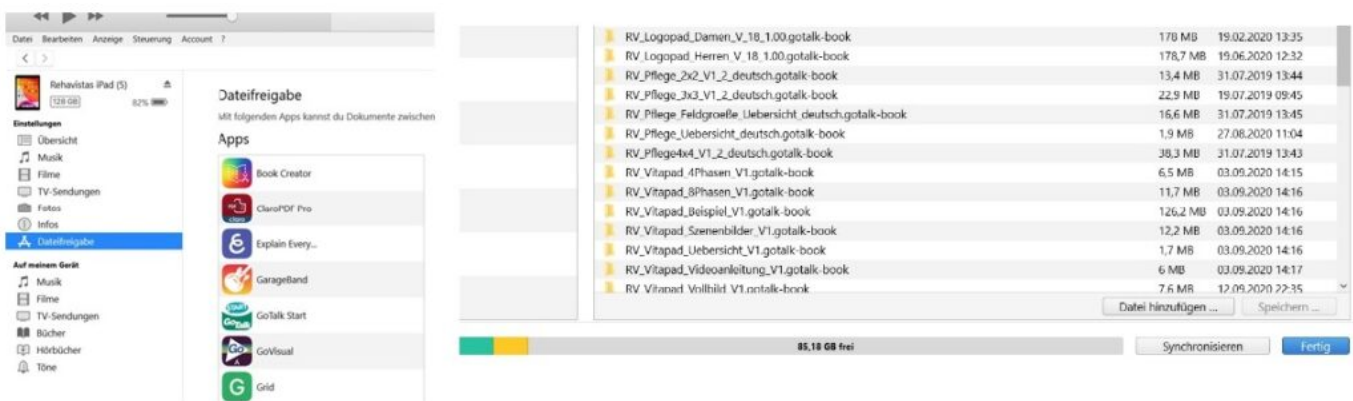

Inhalte können hier per „Drag and drop“ sowohl gesichert als auch hinzugefügt werden.

Nun erscheinen Ihre erstellten Kommunikationsbücher.


- Sie können die Bücher entweder per *Drag and drop* auf ihren Computer ziehen oder unten rechts das Feld „Speichern“ verwenden, um die Kommunikationsbücher an dem gewünschten Ort auf ihrem Computer zu speichern.

Tipp: Sie können Kommunikationsbücher auch wieder leicht auf Ihr Gerät zurückspielen. Schieben Sie das entsprechende Buch einfach per *Drag and drop* in iTunes.

Über Airdrop:

Für diese Methode muss *Airdrop* aktiv sein und *Für jeden* eingestellt sein. Sie finden diesen Punkt in der App *Einstellungen* auf Ihrer Kommunikationshilfe sowie auf dem anderen Apple Gerät. Bei beiden Geräten muss die Einstellung erfolgen.

- Öffnen Sie auf Ihrem Kommunikationsgerät GoTalk NOW und gehen in das Hauptmenü
- Dort klicken Sie unten auf den Namen Ihres Kommunikationsbuchs

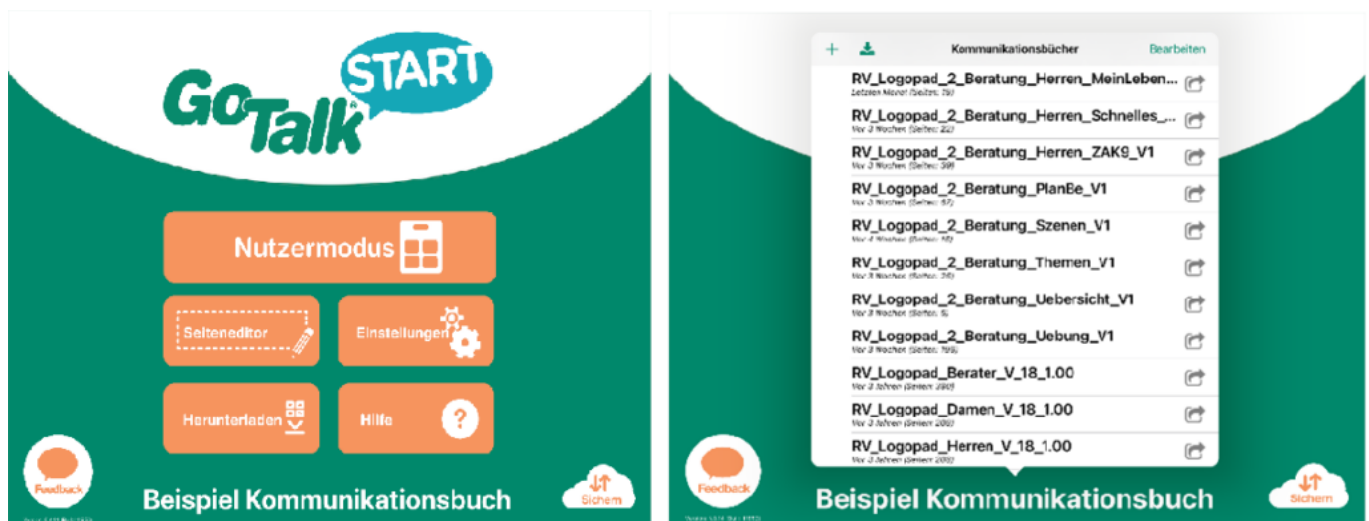

Falls es mehrere Kommunikationsbücher gibt, wählen Sie das entsprechende Buch aus, das Sie sichern möchten. Vor dem gewählten Buch wird ein kleiner Haken erscheinen.

- Klicken Sie nun auf den Pfeil rechts neben dem Buch, was Sie sichern möchten und wählen im auftauchenden Menü *Komprimiertes Buch teilen*
- Jetzt tippen Sie auf das *Airdrop Symbol*. Im sich öffnenden Menü sucht das Gerät nach

anderen Apple Geräten in Reichweite. Tippen Sie auf das entsprechende Gerät und bestätigen Sie die Datenübertragung auf dem empfangenden Gerät. Wenn das empfangende Gerät auch Gotalk hat können Sie das Buch direkt dort sichern. Ansonsten wäre z.B. „Dateien“ ein guter Speicherort.

Ihre Daten sind nun sicher auf dem anderen Gerät.

