

Grid for iPad – Daten per USB-Stick sichern und wiederherstellen


Voraussetzungen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes bereithalten:


- Einen USB-C-Stick, formatiert als FAT32 oder exFAT (kompatibel mit iPadOS)
- Die aktuelle Version der Grid for iPad-App
- Die Dateien-App (standardmäßig auf iPads installiert)

Benutzer sichern


- Tippen Sie oben links auf die drei Punkte (⋮) und wählen Sie „Einstellungen“ aus.

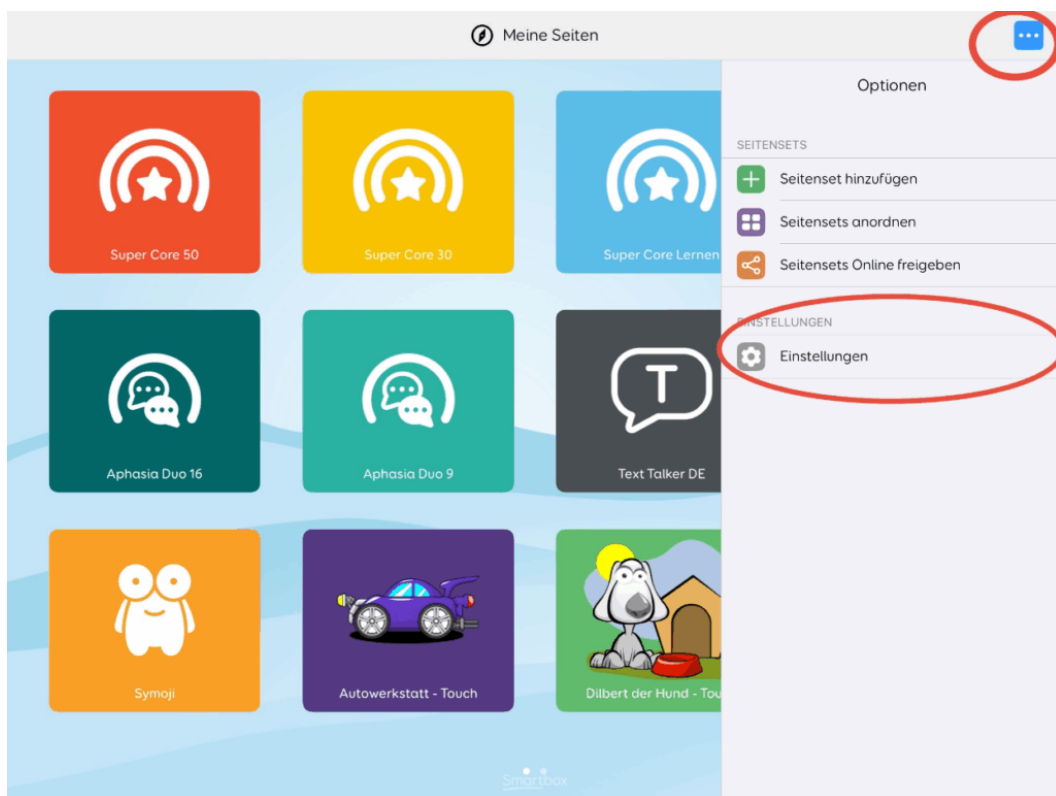


- Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen.
- Wählen Sie „Sicherung, Wiederherstellen & Benutzer löschen“.

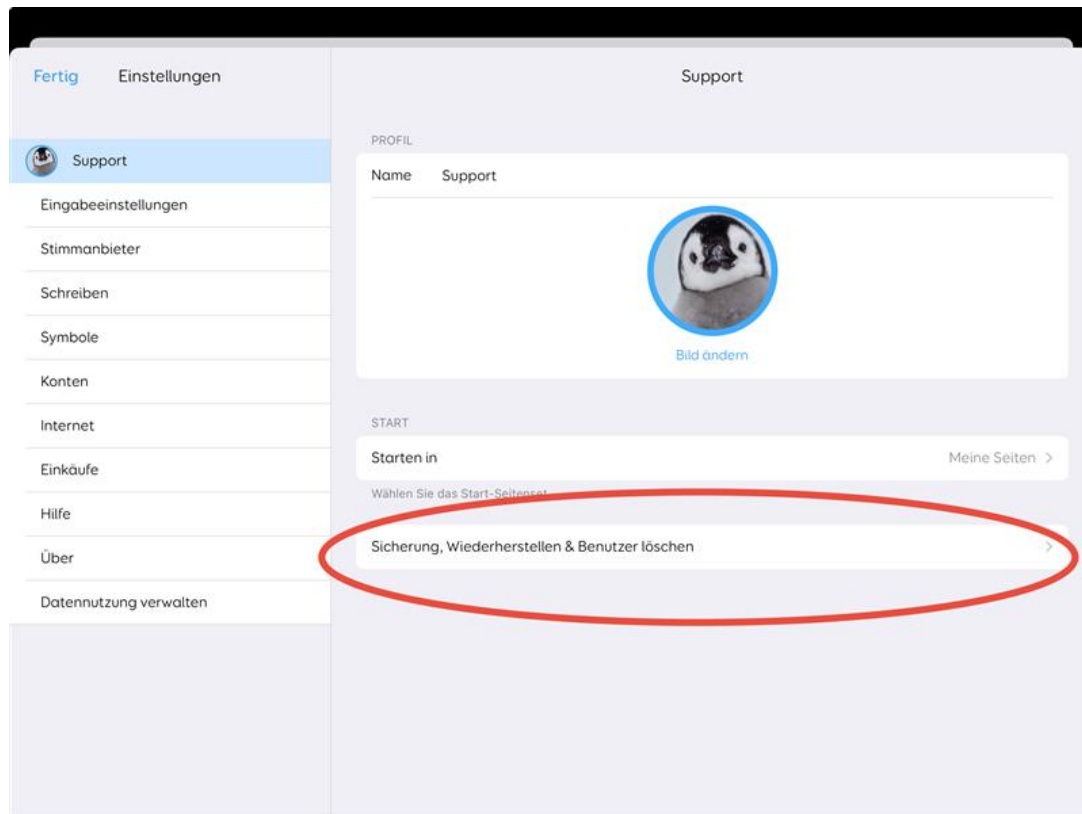

- Tippen Sie auf „Benutzer sichern“.
- Wählen Sie „In Dateien sichern“.

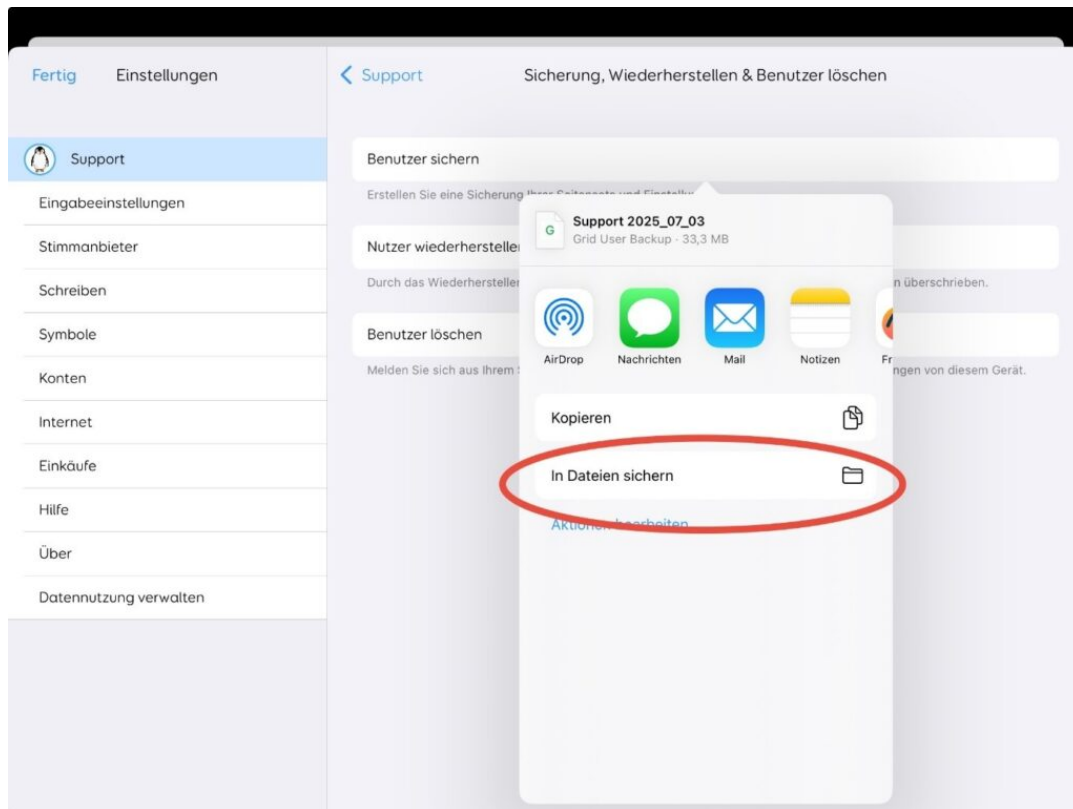


- Wählen Sie den USB-Stick (im Beispiel "INTENSO") aus und tippen Sie auf „Sichern“.

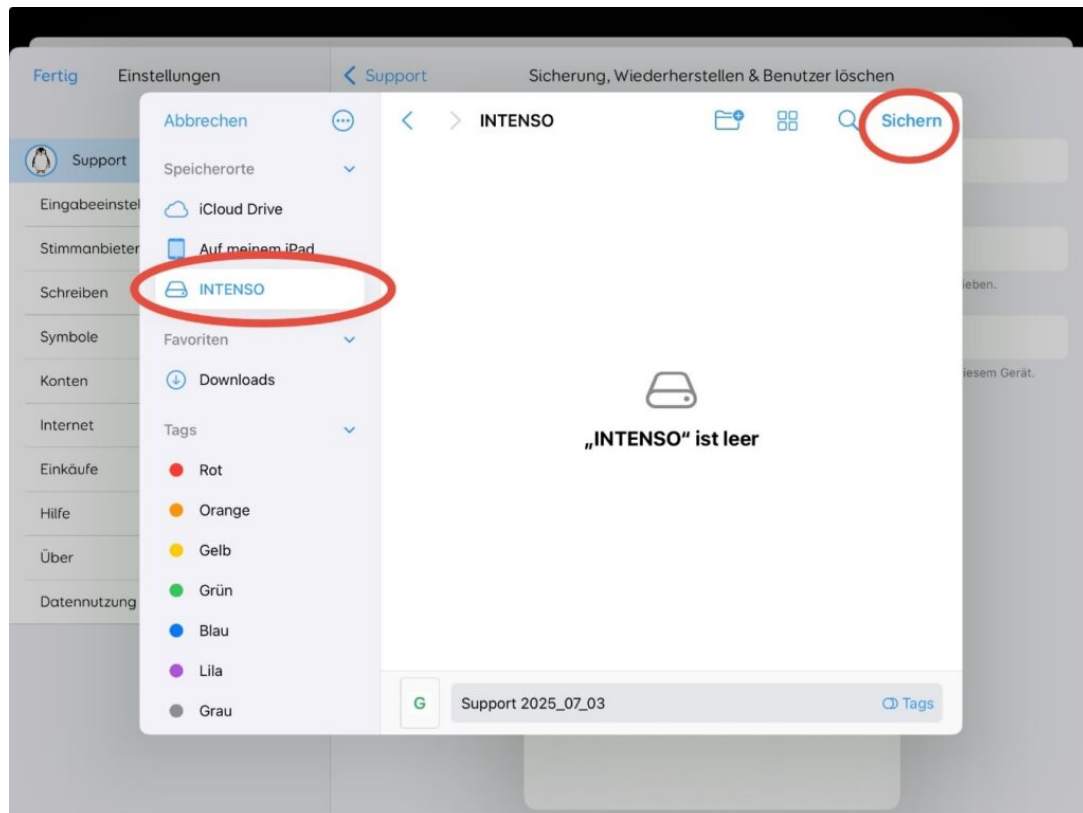


Benutzer wiederherstellen


- Tippen Sie oben links auf die drei Punkte (⋮) und wählen Sie „Einstellungen“ aus.

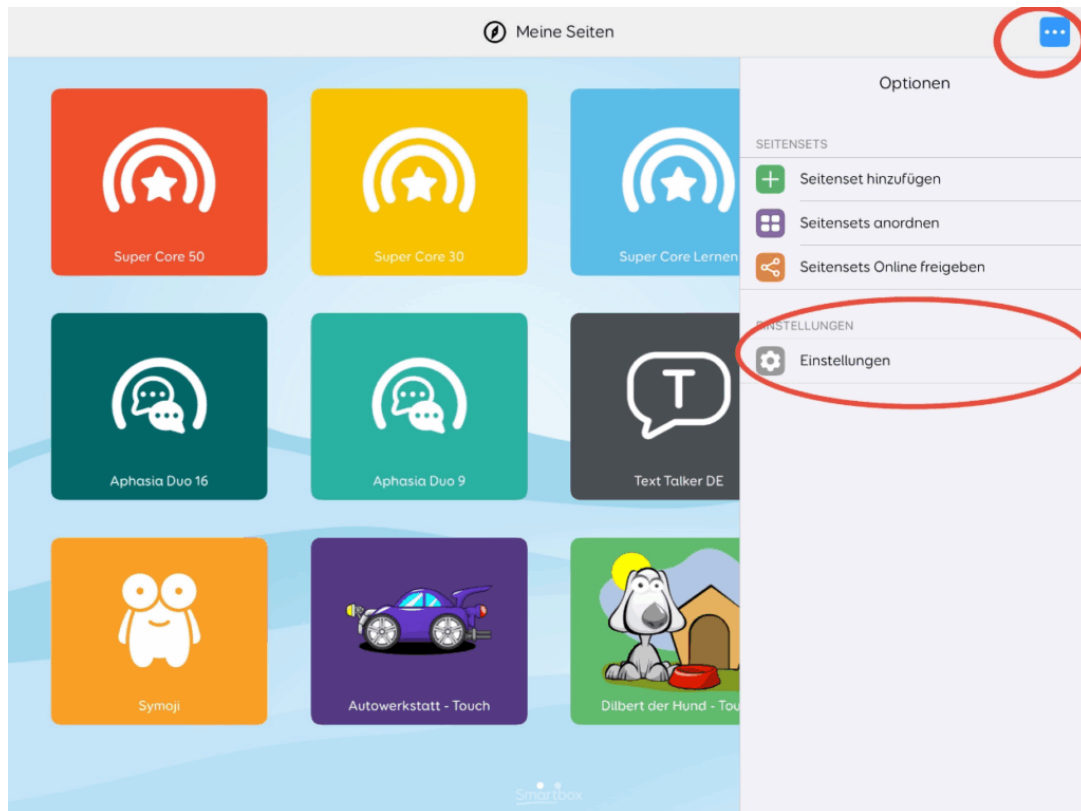


- Tippen Sie auf Ihren Benutzernamen.
- Wählen Sie „Sicherung, Wiederherstellen & Benutzer löschen“.

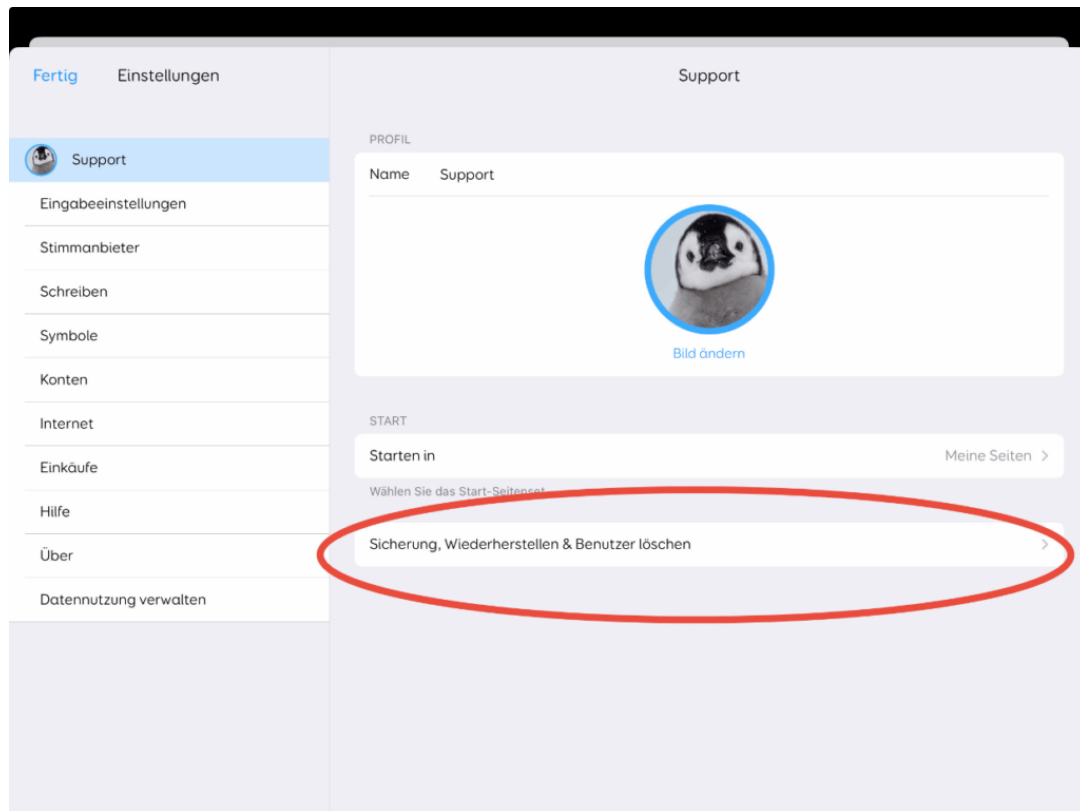

- Tippen Sie auf „Nutzer wiederherstellen“.

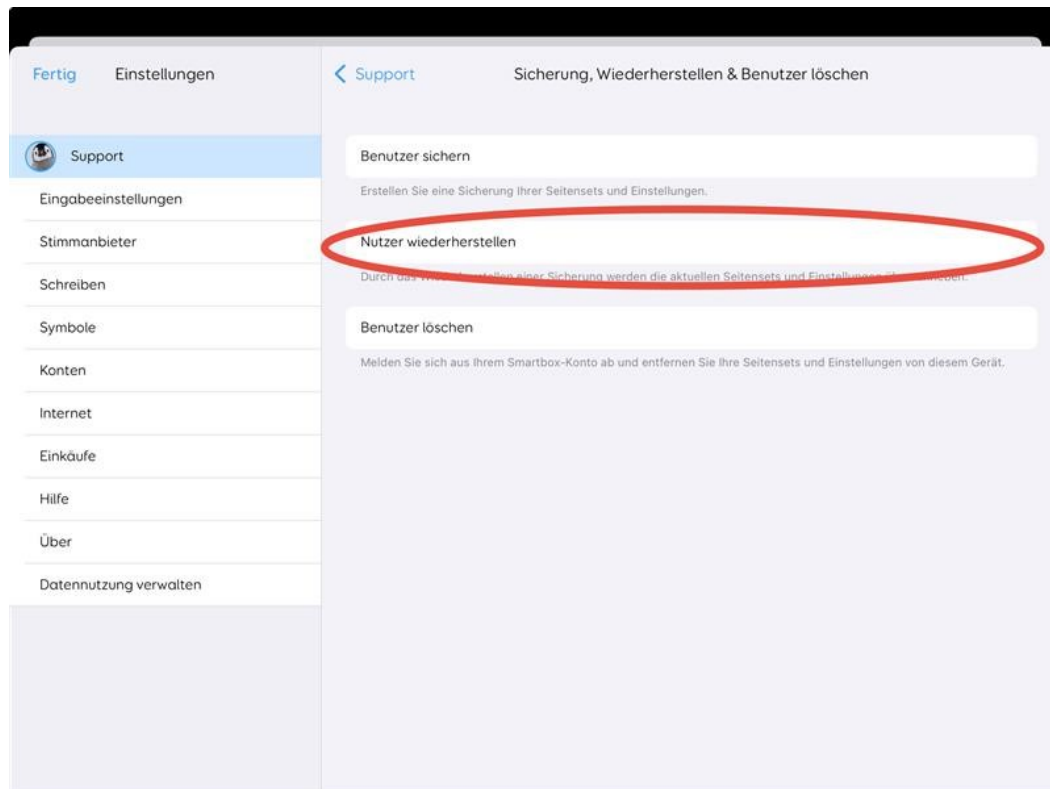

- Wählen Sie den USB-Stick und die entsprechende Sicherungsdatei aus.
- Geben Sie das Passwort zu Ihrem Smartbox-Account ein und tippen Sie auf „Anmelden“.

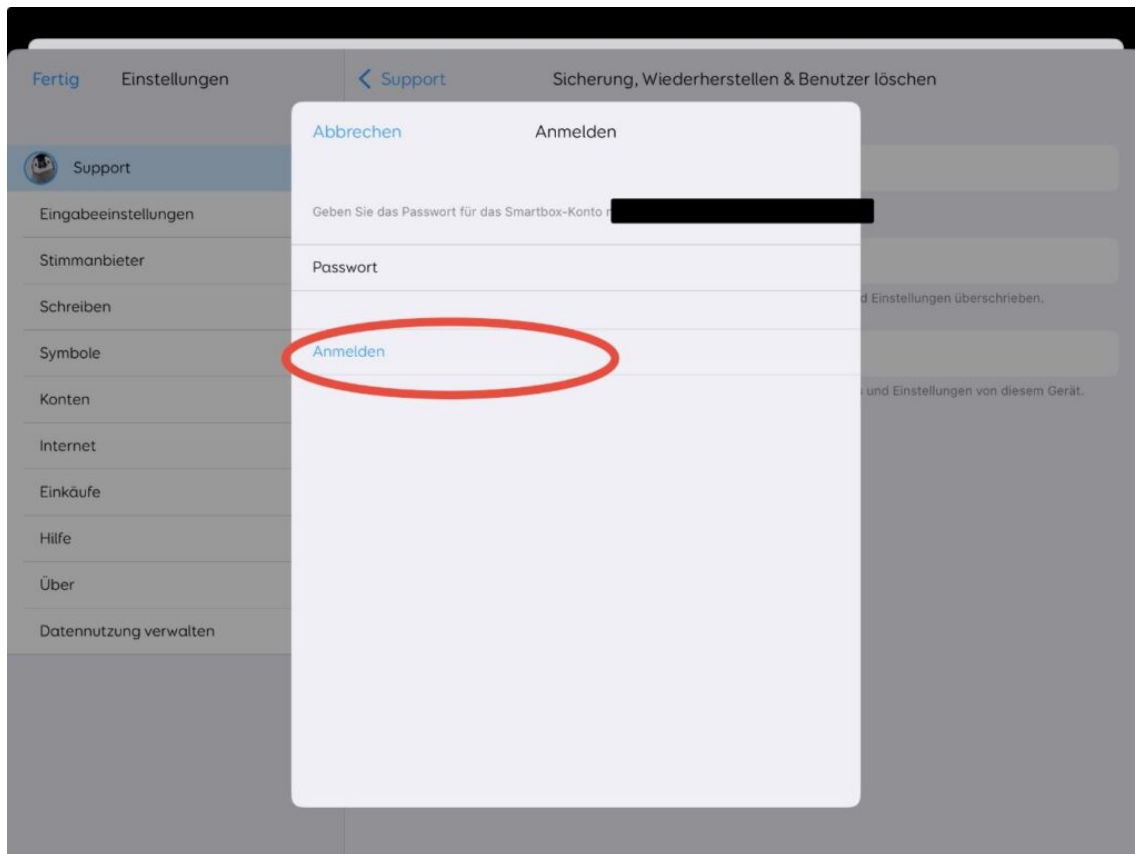

- Bestätigen Sie die Abfrage mit „Sichern“.
- Das Gerät beginnt nun mit dem Laden der Sicherung.