

Grid for iPad – Ersteinrichtung mit Codes


In diesem Spickzettel erklären wir Ihnen, wie Sie Lizenzcodes für Grid for iPad und weitere In-Apps wie z.B. Metacom und AssistUK aktivieren können, um Grid for iPad vollumfänglich nutzen zu können.

Aktivieren eines Grid for iPad-Lizenzcodes

Zuweisen Ihres Lizenzcodes

Beginnen Sie damit, Ihrem Smartbox-Konto Ihren Grid for iPad-Lizenzcode zuzuweisen:

- Besuchen Sie grids.thinksmartbox.com und wählen Sie Log in (Anmeldung mit vorhandenem Konto) oder Sign up (Registrieren), um ein neues Konto zu erstellen.
- Sobald Sie angemeldet sind, wählen Sie My licences (Meine Lizenzen).

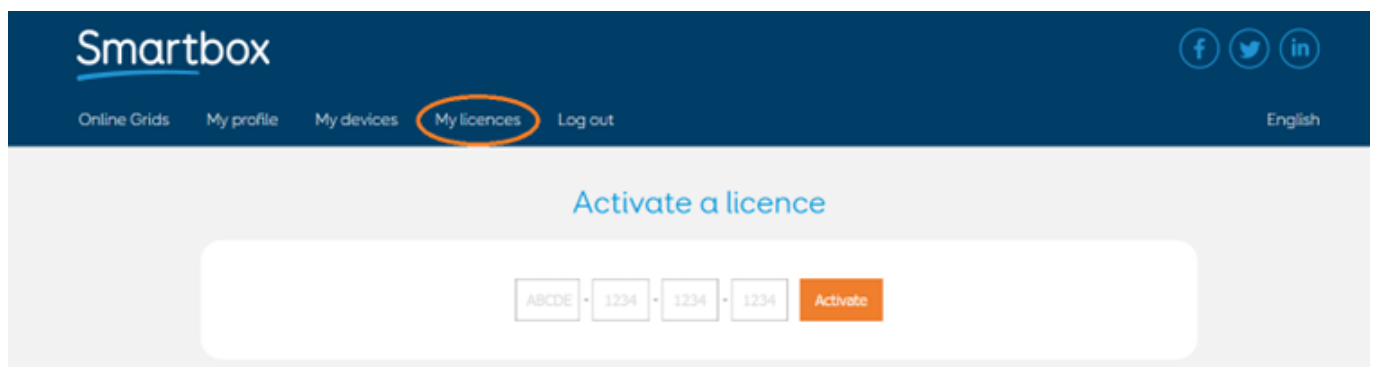

- Geben Sie Ihren Grid für iPad-Lizenzcode ein. Ihr Lizenzcode sieht wie folgt aus: GIPAD-XXXX-XXXX-XXXX
- Wenn Sie einen Lizenzcode für Metacom-Symbole erhalten haben, wiederholen Sie den Vorgang. Lizenzcodes für Metacom sehen so aus: METAS-XXXX-XXXX-XXXX



Aktivieren von Grid for iPad – UK (Unterstützte Kommunikation)

- Wenn Sie es noch nicht getan haben, laden Sie Grid for iPad – UK (grünes Logo) aus dem Apple App Store auf Ihr iPad.
- Öffnen Sie die App.
- Wählen Sie auf der Startseite von Grid for iPad „Anmelden“ aus.
- Melden Sie sich mit demselben Smartbox-Konto an, dem Sie Ihre Lizenz zugewiesen haben.
- Ihre Grid for iPad-UK-App ist jetzt aktiviert.

Verwalten Ihrer Geräte

Sie können die Registerkarte „Meine Geräte“ der Online-Grids verwenden, um die Geräte anzuzeigen, auf denen Ihre Lizenz aktiv ist. Sie können auch alle iPads sehen, auf denen Sie sich angemeldet haben und die im App Store gekauft oder abonniert sind.

Deaktivieren von Grid for iPad

Wenn Sie auf ein anderes iPad wechseln möchten, müssen Sie sich von Grid for iPad abmelden, um die Aktivierung zu entfernen.

Um sich von Grid for iPad abzumelden, tippen Sie auf die drei Punkten (obere rechte Ecke) und wählen Einstellungen – Sichern, Wiederherstellen und Löschen. Sobald Sie Löschen auswählen, werden Ihre Rastersätze und -einstellungen vom Gerät entfernt, wodurch Sie auch von Grid for iPad abgemeldet sind und Ihre Lizenzaktivierung von diesem Gerät freigegeben wird.