

Grid for iPad – Seitenset erstellen

Im Bearbeitungsmodus von Grid for iPad können Sie Ihre Seitensets bearbeiten oder ein neues Seitenset erstellen und zur Startseite hinzufügen. Hier bietet es sich an, mit fertigen Seitensets oder der Kopie eines bestehenden Seitensets zu arbeiten, falls das Aussehen und ein Teil der Inhalte ähnlich sein sollen. Es besteht auch die Möglichkeit, ein komplett neues Seitenset zu erstellen.

Seitenset auswählen und zur Startseite hinzufügen


Wechseln Sie von der Startseite ausgehend zunächst in die Optionen (drei Punkte)

Wählen Sie *Seitenset hinzufügen*.

Hier können Sie aus verschiedenen Bereichen auswählen:

- Smartbox Seitensets: vorgefertigte Seitensets für Symbol- und Schriftsprache für unterschiedliche Nutzergruppen und Kommunikationslevel
- Online Grids: Seitensets, die von andern Nutzern/ Anbietern zur Verfügung gestellt wurden
- Leeres Seitenset: hier können Sie ihr eigenes Seitenset von Grund auf selbst gestalten
- Seitenset kopieren: hier können Sie sich das gewünschte Seitenset als Basis für ihr neues Seitenset aussuchen

Nach Auswahl des gewünschten Seitensets wählen Sie *Hinzufügen*, damit es auf der Startseite angezeigt wird.

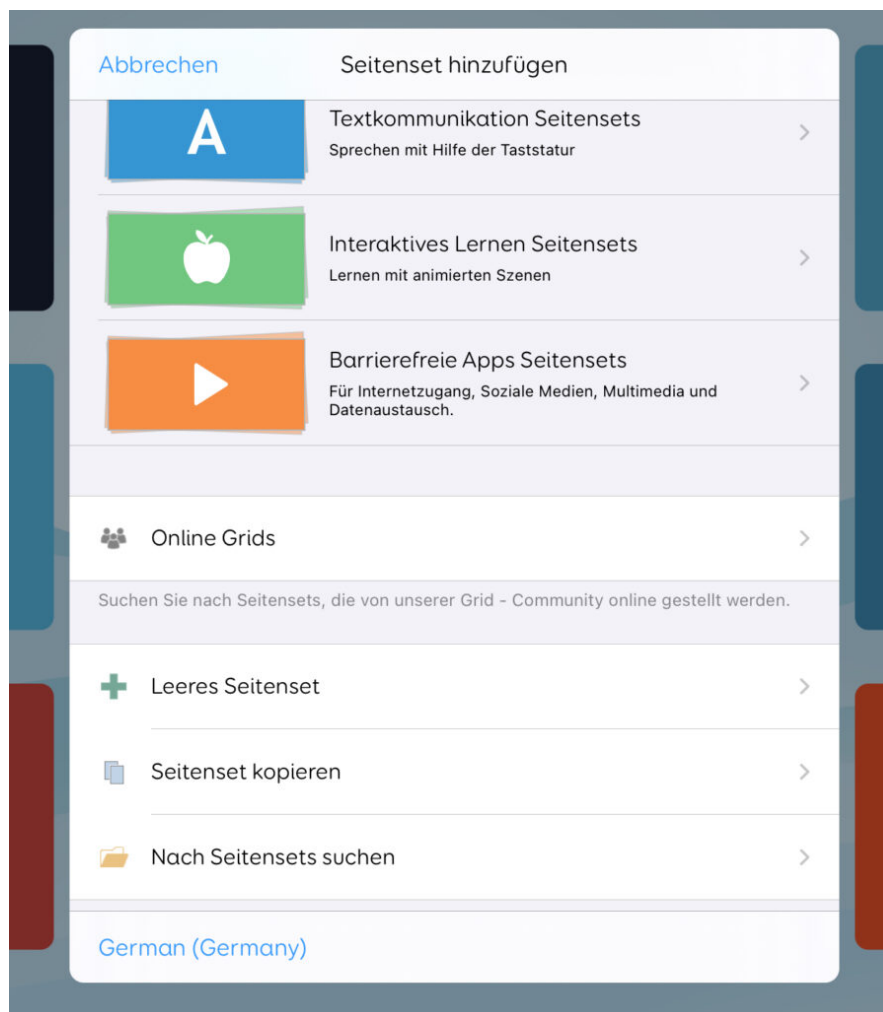

Leeres Seitenset: zusätzliche Schritte


Wenn Sie ein *Leeres Seitenset* erstellen möchten, werden Sie zur Eingabe weiterer Informationen aufgefordert:

- Name für das Seitenset (Pflichtfeld)
- Sprache (hier können Sie bei Bedarf eine andere Sprache auswählen)
- Bild (Vorschaubild des Seitensets auf der Startseite)
- Seitenset-Größe (Anzahl der Zeilen und Spalten)

< Seitenset hinzufügen Leeres Seitenset Fertig

Name Jakob

Sprache German (Germany) >

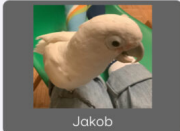
Jakob

Bild 

SEITENSET-GRÖSSE

Spalten 5 >

Zeilen 4 >

Wenn Sie die Informationen eingegeben haben, wählen Sie Fertig oben rechts. das Seitenset erscheint nun auf Ihrer Startseite und Sie können die Inhalte bearbeiten.