

# Hilfreiche Tipps für Augensteuerungen

Die Software Grid 3 bietet viele hilfreiche Einstell- und Anzeigemöglichkeiten, um sicherzugehen, dass die Positionierung zur Augensteuerung so optimal wie möglich ist.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen die entsprechenden Einstellmöglichkeiten im Menü von Grid 3.

In den Eingabeeinstellungen – Augensteuerung gibt es einen dreistufigen Farbcode zur Überprüfung der Position.

Grün – OK

Orange – Akzeptabel

Rot – Schlecht oder problematisch

Umschalten zwischen der Ansicht des Gesichts und der Augen im Trackstatusfenster

- Wenn die Gesichtsansicht ausgewählt ist, zeigt die Farbe des Gesichts die Entfernung zur Kamera an.
- Wenn die Augenansicht ausgewählt ist, zeigt die Farbe der Augen die Sichtbarkeit der einzelnen Augen an. (Wenn Sie eine Kamera verwenden, die die Sichtbarkeit der Augen nicht unterstützt, wird hier standardmäßig die Entfernung angezeigt).

Großer Trackbox-Rahmen

Der Trackbox-Rahmen ist sehr groß dargestellt, so dass man den Bereich der Augenerfassung (Tracking) gut erkennt.

Positionierungshilfe (nur Lumin-i Kamera)

Eine erweiterte Positionierungshilfe gibt detaillierte Informationen die helfen, die Kamera richtig zu positionieren und die Positionierung mit der vorherigen Kalibrierung zu vergleichen.

Entfernungsanzeige (nur Lumin-i Kamera)

Die Entfernungsanzeige zeigt an, wie weit die Lumin-i-Kamera von den Augen des Benutzers entfernt ist.

## ← Positionierungshilfe

☒ Gesicht ☐ Augen ☐ Video



Sichtbarkeit beider Augen beträgt **gut** und Abstand beträgt **gut**

Nah



weit weg

### Trackstatus

Kameraabstand (ungefähr)

75

☒ cm ☐ in

Sichtbarkeit der Augen (%)

100

links

100

rechts

Kopfwinkel

-1°

Kalibrieren

OK

Abbrechen

## Angezeigte Parameter im Trackstatus

Abstand zur Kamera (ungefähr):

Der Abstand zwischen den Augen des Benutzers und der Blickkamera in Zentimetern oder Zoll.

Kopfwinkel

Der Winkel des Kopfes des Benutzers im Verhältnis zur Kamera.

Sichtbarkeit der Augen (%)

Die Lumin-i-Kamera gibt die Sichtbarkeit der einzelnen Augen in Prozent an. Dies zeigt an, wie viel von den Augen des Benutzers die Kamera sehen kann.

Letzte Kalibrierung

Die Position des Benutzers bei der letzten Kalibrierung der Kamera.

Beschreibung des Trackstatus

Eine kurze Beschreibung des aktuellen Trackstatus.

Tipp: Man kann diese Informationen nutzen, um das Gerät genau so zu positionieren, wie es vorher war!

## Befehle für Felder in den Seitensets

### Neue Befehle

Die Positionierungshilfe kann zu jedem Seitensets auf einem Feld hinzugefügt werden.

Man findet alle Befehle in den Eingabeeinstellungen in der Befehlsbibliothek.

Wichtiger Hinweis: Diese Zellen werden nur angezeigt, wenn es sich um ein leeres Feld handelt, da es sich um sogenannte Live-Zellen handelt, die nicht zu einem bestehenden Befehl auf ein Feld hinzugefügt werden können!

### ⌂ Eingabe Einstellungen



### Stiloption

Viele der Befehle verfügen über eine Stiloption:

Wenn Sie die Positionierungshilfe wählen, werden die neuen Stile einschließlich der Farbwarnungen verwendet. Wenn Sie die Option Zellenstil auswählen, können Sie das Aussehen mit den Bearbeitungswerkzeugen anpassen.

### Entfernungsanzeige

Verwenden Sie die Entfernungsanzeige um zu überprüfen, ob Sie sich zu weit oder zu nah an der Kamera befinden, die den Blickkontakt herstellt.

Messung des Kameraabstands (nur Lumin-i)

Zeigt die ungefähre Abstandsmessung der Kamera in Zentimetern oder Zoll an.

Kopfwinkel (nur Lumin-i)

Zeigt den aktuellen Winkel der Blickkamera im Verhältnis zum Kopf des Benutzers an.

Sichtbarkeit des Auges (nur Lumin-i)

Zeigt die aktuelle Sichtbarkeit des ausgewählten Auges (links oder rechts) an.

Beschreibung des Trackstatus (nur Lumin-i)

Zeigt den aktuellen Track-Status in leicht lesbarem Text an.

Trackstatus-Beschreibung vorlesen (nur Lumin-i)

Liest den aktuellen Trackstatus des Geräts vor.

Tipp: Man kann den Befehl *Trackstatus-Beschreibung sprechen* zum Befehl *Beschreibung des Trackstatus* auf einem Feld hinzufügen – so hat man die visuelle und auditive Rückmeldung!

Anzeige des Trackstatusfensters

Man kann die Anzeige auf Gesicht, Augen, Video, Hersteller oder einen Wechsel dazwischen einstellen.

Verwendung der Befehle

Man kann die Befehle verwenden, um z.B. ein individuelles Trackstatus-Seitenset zu erstellen!

