

Einleitung Voco Chat

Voco Chat ist ein Symbolvokabular mit einer geringen Feldanzahl, das es NutzerInnen ermöglicht, eine Vielzahl von kommunikativen Funktionen und Inhalten auszudrücken. Äußern, was man will, eine Frage stellen, jemandem etwas über sich erzählen oder ein Gespräch führen, all das gelingt mühelos.

Voco Chat soll das Zusammenstellen von Nachrichten vereinfachen und baut auf einem Fundament von sechs Mitteilungspfaden auf. Es bietet außerdem Vokabular, das AnwenderInnen bei einer größeren Teilhabe, Gesprächsbeteiligung und Unabhängigkeit unterstützt, aber auch bei Gesprächen über wichtige Themen wie psychische Gesundheit und Wohlergehen unterstützt.

Ein pragmatischer Sprachansatz

Wir kommunizieren alle aus verschiedenen Anlässen, wie z. B. zum Stellen einer Frage, zur Meinungsäußerung oder zum Erzählen von Geschichten. Kommunikation ermöglicht es uns auch, an Aktivitäten teilzunehmen, Beziehungen aufzubauen und unsere eigenen Interessen zu vertreten.

Voco Chat unterstützt dabei u.a, indem es sich nicht nur auf einzelne Wörter konzentriert, sondern auch darauf, warum wir kommunizieren und wie wir mit Sprache interagieren. Dies wird oft als Pragmatik bezeichnet.

Eine entscheidende Ressource bei der Entwicklung von Voco Chat war „The Pragmatics Profile for People who use AAC“ – das Pragmatikprofil für Menschen, die UK verwenden – (Martin, Small

& Stevens, 2017), das einen umfangreichen Überblick über Gründe, gibt, aus denen wir kommunizieren, und wie wir an Gesprächen teilnehmen.

Haupteigenschaften

- Jede Seite hat 12 Felder zur Kommunikation, plus eine Zeile und Spalte für Nachrichtenfenster, Navigations- und hilfreiche Funktionsfelder
- Das Vokabular ist in Spalten organisiert, von links nach rechts jeweils mit den hochfrequenten Wörtern und Phrasen oben links angeordnet

- Mitteilungspfade unterstützen die Bildung von Aussagen ausgehend vom kommunikativen Anlass
- Die Kombination aus Wörtern und Phrasen unterstützt eine schnelle und effiziente Kommunikation: vom Treffen einer Auswahl bis hin zur Kombination komplexer Aussagen ist alles möglich
- Vorlagen-Seiten und leere Felder erleichtern Ihnen, eigenes Vokabular hinzuzufügen
- Altersgemäße Vokabularoptionen für Kinder und Teenager bzw. Erwachsene
- Seiten über Aktivitäten unterstützen Unabhängigkeit und Teilhabe
- Ein Werkzeugkasten unterstützt Kommunikation, psychische Gesundheit und Wohlbefinden
- Eine Auswahl einfacher Apps verbessert Kommunikation und Teilhabe