


Kamera- und Foto-App

Um mit dem Talk Pad ein Foto oder ein Video aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

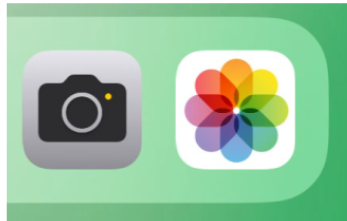

- Öffnen Sie die Kamera-App.
- Wählen Sie den Foto- oder Videomodus aus.
- Foto: Fokussieren Sie das gewünschte Motiv (zoomen Sie ggf. über die eingblendete Leiste näher heran) und tippen Sie auf die weiße Auslösertaste am Bildschirmrand.
- Video: Nehmen Sie ein Video auf, indem Sie zum Starten auf die rot eingefärbte Auslösertaste drücken. Zum Beenden drücken Sie diese Taste erneut.
- Die mit der Kamera-App gemachten Fotos und Videos befinden sich in der Foto-App. Hier können Sie sie betrachten, bearbeiten und löschen.
- Tippen Sie das gewünschte Foto/Video in der Foto-App an, so dass es groß angezeigt wird. Durch Wischen nach rechts und links können Sie durch die Aufnahmen blättern. Bearbeiten und löschen können Sie das aktuell angezeigte Foto/Video über die eingblendeten Menüpunkte am oberen Bildschirmrand.
- Ist ein Foto/Video in der Foto-App gespeichert, können Sie es in Ihre Kommunikations-App einbinden (siehe entsprechende Anleitung der Kommunikations-App).