

Kontrollzentrum

Grundlegende Einstellungen können im Kontrollzentrum vorgenommen werden. Zum Öffnen wischen Sie auf dem Home-Bildschirm mit einem Finger von der Akkuladestand-Anzeige (oben, rechts) nach unten. Zum Schließen des Kontrollzentrums wischen Sie es nach oben weg und tippen 1 x in den freien Bereich des Bildschirms.

Im Kontrollzentrum können Sie u.a. folgendes einstellen/erreichen:

- Grundlautstärke
- Bildschirmhelligkeit
- Ausrichtungssperre
- Kamera-App



Das Dock



Das sogenannte Dock befindet sich am unteren Bildschirmrand und kann von jeder App aus aufgerufen werden, indem mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand kurz nach oben gewischt wird. Nur durch das Einrichten des „Geführten Zugriffs“ wird verhindert, dass das Dock eingeblendet wird.

Das Dock kann individuell gestaltet werden, z. B. indem es ausschließlich mit der Kommunikations-App bestückt wird. Durch Verwendung des Dock kann – wenn gewünscht – einfach zwischen den Apps gewechselt werden.