

Super Core Lernen Seitensets

Für Lernende, die erste Erfahrungen mit Unterstützter Kommunikation sammeln, steht eine Auswahl vereinfachter Seitensets in zwei Größen zur Verfügung, die sie erkunden können

Diese Sets enthalten – analog zu Super Core – den Wortschatz für Alltags- und Spielaktivitäten, ergänzt um eine reduzierte Auswahl an Kernwörtern. Dazu gehören grundlegende erste Wörter, mit denen der Lernende beispielsweise um „mehr“ bitten, mitteilen kann, dass etwas „gestoppt“ werden soll, oder ausdrücken kann, was er „möchte“.





Tipp: In jedem Lernen-Set steht in der Mitte der ersten Zeile ein zusätzliches Kernwort, um den Lernenden zum Erlernen weiterer Kernwörter zu animieren.

Die Einführung des Wortschatzes in dieser Form ermöglicht es, die Bedeutung der Wörter im Kontext verschiedener sinnvoller und motivierender Aktivitäten zu erlernen. Die Zusammenstellung ist darauf ausgelegt, einen schnellen Lernerfolg zu fördern – so kann der Lernende unterschiedliche Aktivitäten erkunden und die Wörter verinnerlichen, indem er erlebt, wie Personen in seiner Umgebung darauf reagieren

Wenn Sie mit den Lernen-Seitensets beginnen, können Sie das Gelernte auf Super Core übertragen, ohne die Vokabeln neu lernen zu müssen.

Die Lernen-Seitensets sind ideal für Personen, die gerade erst damit beginnen, sich mit Symbolkommunikation zu beschäftigen und die Verwendung der Eingabemethode möglicherweise noch üben müssen.

Durch bedeutungsvolle Reaktionen können Sie dazu beitragen, dem Lernenden die Bedeutung der Wörter zu vermitteln und ihm ein Erfolgserlebnis zu verschaffen.

