

MetaTalk Seitenset herunterladen

So geht's:

Seitenimport vom Browser direkt am Talk Pad

Hinweis: Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein und der geführte Zugriff muss beendet sein.

- Rufen Sie am Talk Pad im Safari-Browser die gewünschte Seite auf.
z.B. Schatzkiste MetaTalk – REHAVISTA Hub.
- Klicken Sie auf eine der beigefügten ZIP-Dateien.
- Bestätigen Sie, dass Sie den gewünschten Inhalt laden möchten.
- Tippen Sie nun im Safari-Browser auf den Downloadpfeil oben rechts und wählen Sie die entsprechende Datei aus.
- Es öffnet sich der Bereich Downloads.
- Tippen Sie hier einmal auf die geladene ZIP – Datei. Die Datei entpackt sich automatisch und es erscheint eine MetaTalk-Datei.
- Klicken Sie auf die Datei und wählen Sie am oberen Bildschirmrand rechts das Teilen-Symbol.

(Alternativ können Sie auch lange auf die gewünschte Datei tippen und im dann aufpoppenden Menü „Teilen“ auswählen).

- Wählen Sie die App MetaTalkDE aus; ggf. müssen Sie die angezeigten Apps nach links Wischen, damit MetaTalk angezeigt wird.

Was Sie nun im Programm MetaTalk machen müssen

- MetaTalk öffnet sich und es erscheint die Meldung, dass neue Seiten in der Inbox im Seiten-Manager liegen.
- Wechseln Sie in den Editiermodus. Tippen Sie dazu am unteren Bildschirmrand auf den Stift.
- Es öffnet sich ein Dialogfeld mit Zahlen, die Sie in aufsteigender Reihenfolge (von klein nach groß) eingeben müssen.
- Wählen Sie nun den Seiten-Manager aus
- Tippen Sie rechts auf den Button „Seiten-Import“ und bestätigen Sie über die Schaltfläche „Import“.

- Die Seite ist nun importiert und erscheint im Seitenverzeichnis.
- Verlassen Sie den Seitenmanager und verknüpfen Sie die neu importierte(n) Seite(n) mit einem oder mehreren Feldern in Ihrem Vokabular, so dass die Nutzer:innen auf die neue(n) Seite(n) zugreifen können.

MetaTalkDE – Verknüpfung erstellen

- Öffnen Sie die Seite mit dem Feld, das die neue importierte Seite öffnen soll.
- Falls Sie den Editiermodus verlassen haben – wechseln Sie zurück in den Editiermodus. Tippen Sie dazu am unteren Bildschirmrand auf den Stift.
- Es öffnet sich ein Dialogfeld mit Zahlen, die Sie in aufsteigender Reihenfolge (von klein nach groß) eingeben müssen.
- Wechseln Sie in den Tasteditor (Feld am rechten unteren Bildrand).
- Ziehen Sie z.B. ein weißes Platzhalter-Feld auf der Seite mit langem Tastendruck in den Bereich mit dem Mülleimer.
- Klicken Sie in das Feld mit der Lupe über der Symbolsammlung. Die Tastatur öffnet sich. Geben Sie einen Suchbegriff für Ihr gewünschtes Symbol ein und bestätigen Sie mit „OK“.
- Wählen Sie das gewünschte Symbol aus, halten Sie es lange gedrückt und ziehen Sie es anschließend an die Stelle, an der Sie zuvor ein weißes Feld als Platzhalter entfernt haben.
- Tippen Sie doppelt auf das eingefügte Symbol: Der Tasteditor öffnet sich.
- Wählen Sie die hellblaue Tastenfarbe.
- Passen Sie ggf. den Bildtext über „Bildtext individuell“ an.
- Wählen Sie den Pfeil neben „Funktion“.
- Scrollen Sie durch die sich öffnende Auswahl, bis Sie die Funktion „gehe zu Seite“ erreicht haben.
- Unterhalb öffnet sich das „Seitenverzeichnis“. Hier sind alle Seiten alphabetisch sortiert – scrollen Sie zu Ihrer importierten Seite –in unserem Beispiel „rehavista-mt-eier_faerben“ .
- Bestätigen Sie ihre Auswahl mit „speichern“.
- Verlassen Sie den Tasteditor wieder über das Feld am rechten unteren Bildrand.