

MetaTalk via Airdrop übertragen

Mit dieser Anleitung können Sie eine Datei schnell und einfach bearbeiten und anschließend per AirDrop versenden.


1. Öffnen Sie die gewünschte Datei.

Tippen Sie auf das Stift-Symbol und geben Sie die Zahlen von klein nach groß ein.

2. Export starten (Schritt 1). Tippen Sie auf das Symbol in der Mitte.




3. Export auswählen (Schritt 2). Tippen Sie anschließend auf „Exportieren“.

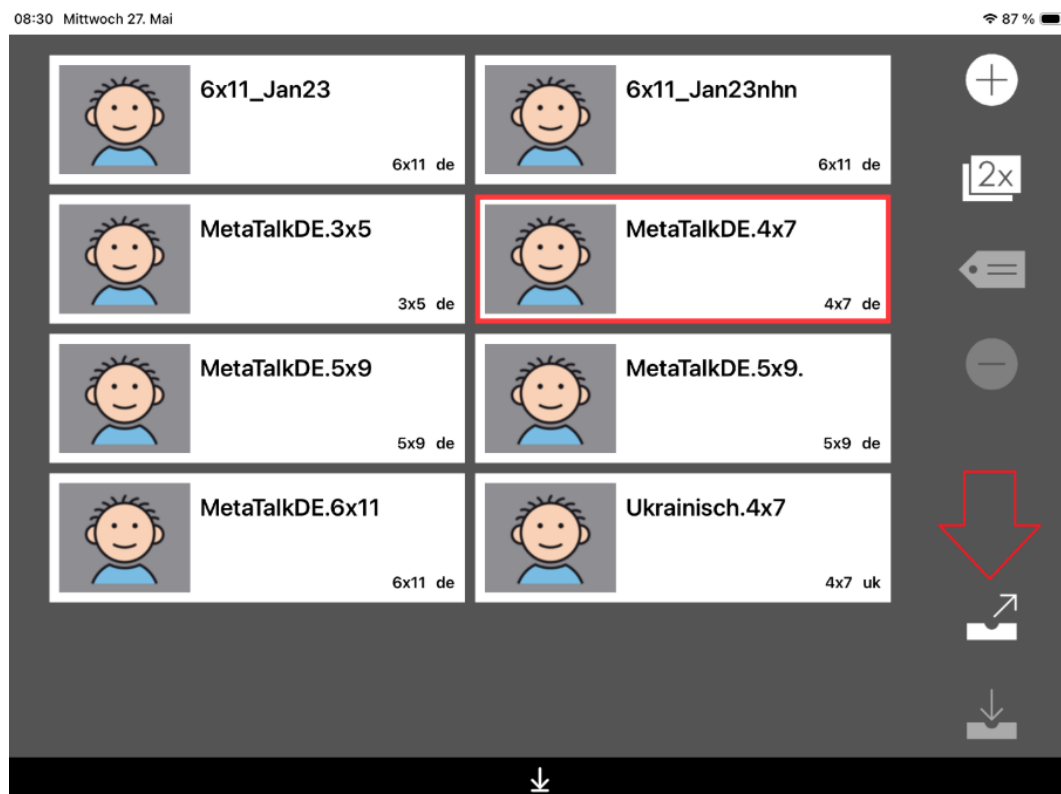

4. Bestätigen. Klicken Sie auf „OK“, um den Export zu bestätigen

5. AirDrop verwenden. Wählen Sie nun AirDrop aus.

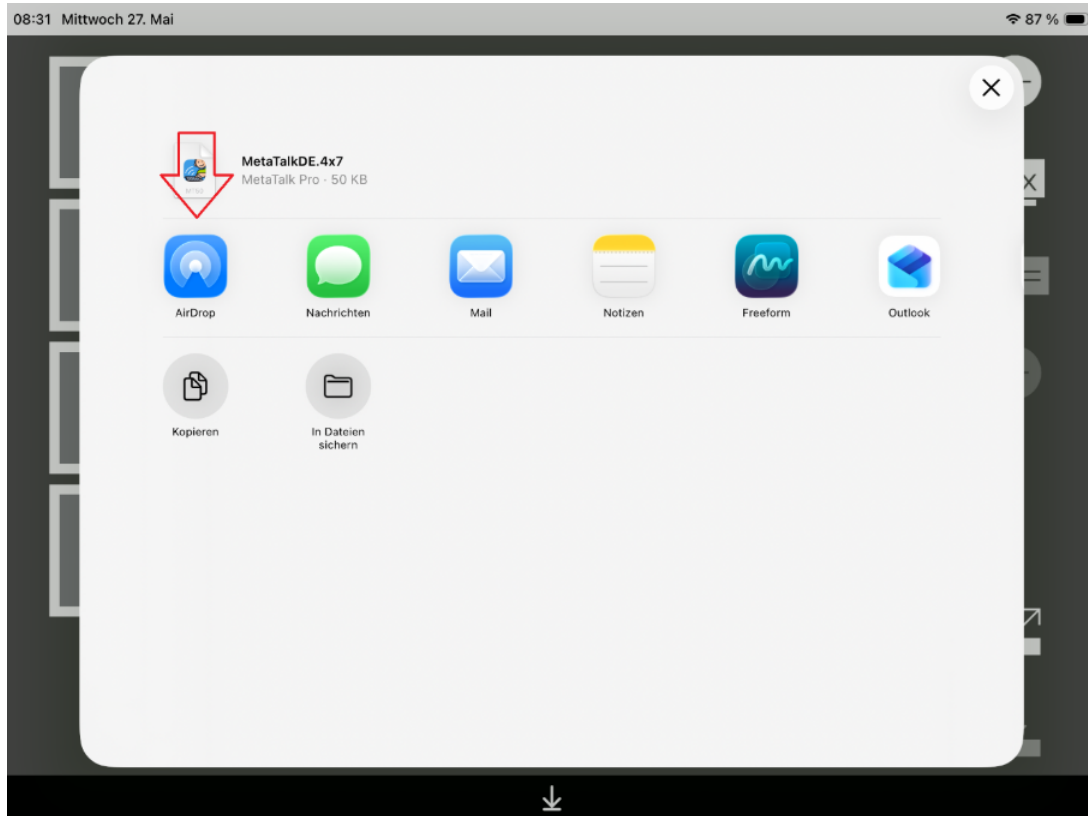

6. Empfänger vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass:

- das Empfängergerät eingeschaltet ist
- AirDrop auf dem Empfängergerät auf „Für 10 Minuten für alle“ eingestellt ist

□ Hinweis:

Informationen zur Nutzung von AirDrop finden Sie im Kontrollzentrum oder unter „Einstellungen → Allgemein → AirDrop“

7. Datei senden

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der AirDrop-Liste aus, um die Datei zu übertragen.