

MetaTalkDE – Datensicherung via E-Mail

Eine Möglichkeit zur Sicherung Ihrer individualisierten Oberflächen in *Metatalk* ist die Sicherung via E-Mail. So können Sie Ihre aktuellen Daten auf einen Computer übertragen, um sie ggf. wiederherzustellen oder mit anderen zu teilen – oder sie belassen die Sicherungsdatei einfach in Ihren E-Mails.


Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Sie können eine Verbindung über WLAN herstellen, indem Sie diese Funktion in den allgemeinen Einstellungen aktivieren.

Mailaccount einrichten

Richten Sie zunächst einen E-Mail-Account in den iPadOS-Einstellungen ein:


- Verlassen Sie die geöffnete Anwendung (ggf. muss hierzu zunächst der „geführte Zugriff“ beendet werden)
- Wählen Sie das Mailprogramm in den iPadOS-Einstellungen
- Folgen Sie den Anweisungen zur Verbindung eines vorhandenen E-Mail-Accounts mit dem Gerät

Export und Import von Vokabularen

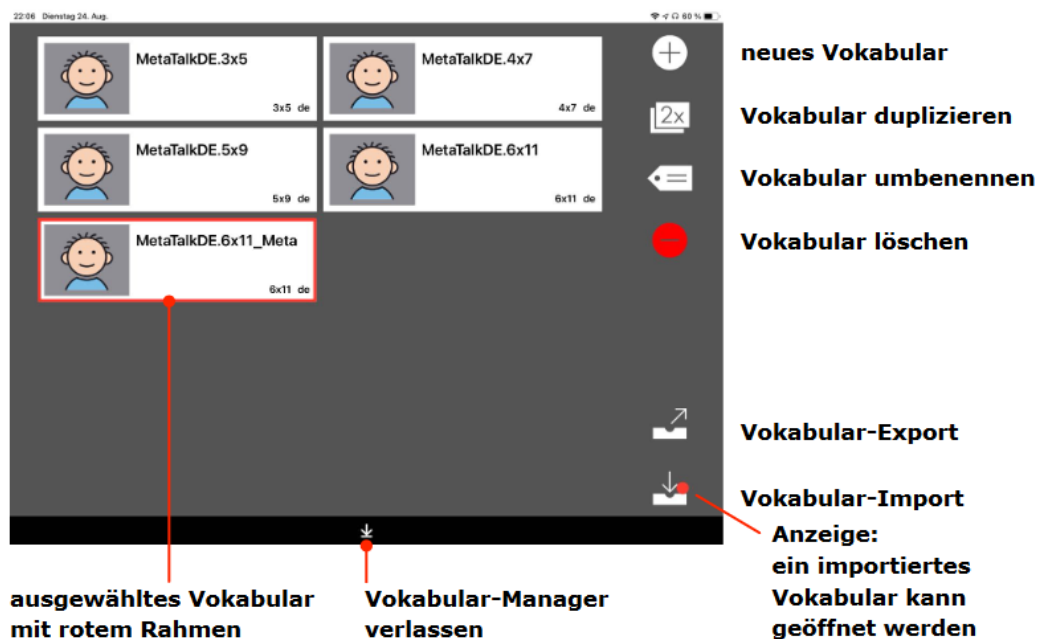

Öffnen Sie MetaTalk und wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus durch Druck auf den Stift unten links und die Eingabe des Pincodes (Zahlenfolge von klein nach groß).

- Wählen Sie nun den Vokabularmanager (Symbol unten in der Mitte)
- Markieren Sie hier das zu sichernde Kommunikationsbuch
- Wählen Sie auf der rechten Seite den Button mit dem Export-Pfeil Vokabular Export
- Wählen Sie die Export-Option E-Mail aus

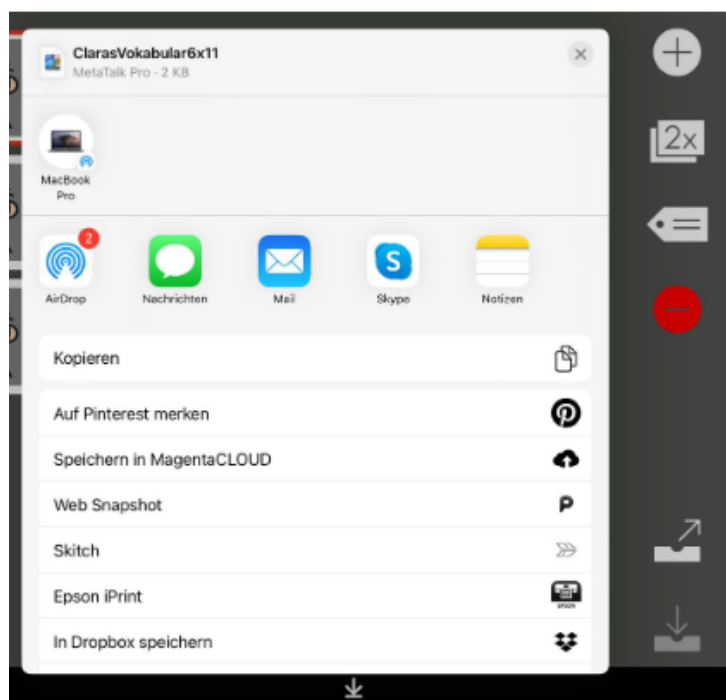

Beim Export per Mail wird eine E-Mail mit einer Exportdatei generiert, die der Empfänger der mail wiederum in MetaTalk importieren kann. Dazu muss die Mail direkt auf dem iPad empfangen und die Exportdatei darin angetippt werden. Im sich öffnenden Fenster muss dann *in MetaTalk öffnen* ausgewählt werden.

Das Vokabular liegt nun im Vokabularmanager und kann über die Import-Taste geöffnet werden. Am Icon des Vokabularmanagers und an der Import-Taste markiert ein roter Punkt, dass ein oder mehrere importierte Vokabulare geöffnet werden können. Nach dem Öffnen erlischt diese Anzeige.

Existiert bereits ein Vokabular mit dem gleichen Namen, wird man beim Import aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben. Erst danach ist der Import möglich.