

MetaTalkDE – Seiten erstellen und verknüpfen

Zur Individualisierung des vorhandenen Vokabulars in MetaTalkDE kann es für bestimmte Themen hilfreich sein, eine komplett neue Seite zu erstellen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine neue, leere Seite (zu dem von Ihnen gewünschten Thema).
2. Erstellen Sie die Verknüpfung (bearbeiten Sie ein vorhandenes Feld, das Ihre neue Seite öffnet).
3. Befüllen Sie die Seite (mit den individuellen Inhalten).

1. Erstellen einer neuen leeren Seite

- Wechseln Sie in den Editiermodus. Tippen Sie dazu am unteren Bildschirmrand auf den Stift.
- Es öffnet sich ein Dialogfeld mit Zahlen, die Sie in aufsteigender Reihenfolge (von klein nach groß) eingeben müssen.
- Hinweis: Bei deaktivierter Passcode-Eingabe ist der Stift im Anwendungsmodus nicht anwählbar. Wechseln Sie dann bitte in die allgemeinen Einstellungen des iPad und schalten Sie die Passcode-Eingabe wieder ein.
- Gehen Sie in den Seitenmanager. Wählen Sie dazu das zweite Feld vom rechten Bildschirmrand.
- Nun können Sie eine leere Seite erstellen, indem Sie
 - oben das „+“ und anschließend „Seite mit leeren Tasten“ wählen.
 - Dann geben Sie der Seite einen Namen (Leerzeichen sind nicht erlaubt) und bestätigen anschließend mit „OK“.
- Verlassen Sie den Seitenmanager durch erneuten Druck auf das Icon für den *Seitenmanager* am unteren Bildschirmrand.

2. Verknüpfung erstellen

- Öffnen Sie die Seite mit dem Feld, das die neue Seite öffnen soll. (In unserem Beispiel soll auf der Sportseite eine Fußballseite verknüpft werden.)
- Wechseln Sie dann in den Tasteneditor (Feld am rechten unteren Bildrand).
- Ziehen Sie den Platzhalter per Drag&Drop in das Feld mit dem Mülleimer.
- Tippen Sie in das Feld mit der Lupe über der Symbolsammlung. Die Tastatur öffnet sich. Geben Sie einen Suchbegriff für Ihr gewünschtes Symbol ein und bestätigen Sie mit „OK“.
- Ziehen Sie dann erneut mit Drag&Drop das Symbol auf den freien Platz.
- Tippen Sie dann doppelt auf das Symbol: Der Tasteneditor öffnet sich.
- Wählen Sie die blaue Tastenfarbe für Felder, die neue Seiten öffnen.
- Passen Sie ggf. den Bildtext über „*Bildtext individuell*“ an.
- Wählen Sie den Pfeil neben „*Funktion*“.
- Scrollen Sie durch die sich öffnende Auswahl, bis Sie die Funktion „*gehe_zu*“ erreicht haben.
- Unterhalb öffnet sich das *Seitenverzeichnis*. Hier sind alle Seiten alphabetisch sortiert – scrollen Sie zu Ihrer neu erstellen Seite.
- Wenn alles korrekt eingestellt ist, wählen Sie „*speichern*“.
- Verlassen Sie den Tasteneditor wieder über das Feld am rechten unteren Bildrand.

3. Seite befüllen

- Befüllen Sie nun mit Hilfe des *Tasteneditors* die neue Seite mit allen gewünschten Inhalten.
- Ziehen Sie den Platzhalter per Drag&Drop in das Feld mit dem Mülleimer.
- Tippen Sie in das Feld mit der Lupe über der Symbolsammlung. Die Tastatur öffnet sich. Geben Sie einen Suchbegriff für Ihr gewünschtes Symbol ein und bestätigen Sie mit „OK“.
- Ziehen Sie dann erneut mit Drag&Drop das Symbol auf den freien Platz.

- Wiederholen Sie dies, bis alle gewünschten Symbole auf Ihrer Seite eingerichtet sind.
- Passen Sie ggf. die gewählten Symbole weiter an:

→ Dafür tippen Sie doppelt auf das Symbol: Der Tasteneditor öffnet sich

→ Passen Sie ggf. den Bildtext über „*Bildtext individuell*“ an.

→ ggf. Aktion anpassen, falls nicht nur der Bildtext vorgelesen werden soll (Funktion „*sprich*“)

→ Soll eine Aufnahme abgespielt werden, legen Sie diese unter „*Audio*“ an.