


Netzschalter

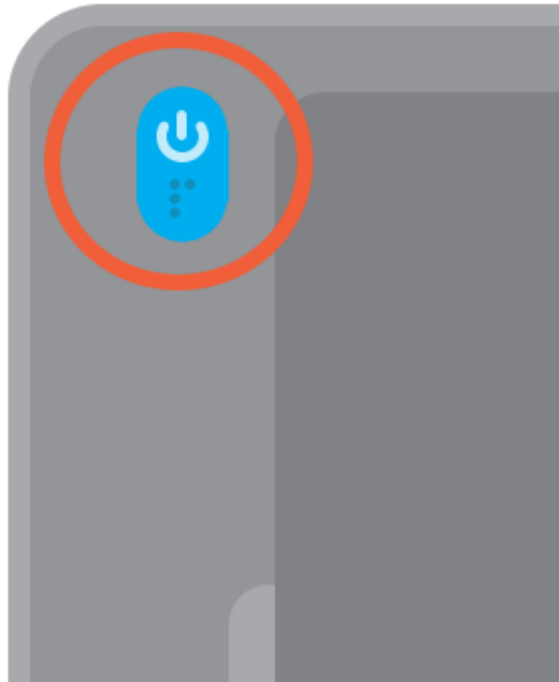

Drücken Sie zum Einschalten des Grid Pads den Netzschalter an der Rückseite des Geräts. Ein weißes Licht an der Vorderseite des Geräts leuchtet auf und das System startet.

Ihr Grid Pad herunterfahren

1. Tippen Sie auf das Startmenü.
2. Wählen Sie das Symbol Ein/Aus.
3. Wählen Sie Herunterfahren.

Sie können das Gerät auch von dort neu starten.

Erzwungenes Herunterfahren

Wenn Sie den Netzschalter fünf Sekunden lang gedrückt halten, wird das Grid Pad heruntergefahren. Bitte beachten Sie, dass dies nur im Notfall empfohlen wird.