

Checkliste: Personalisierung

Wichtige Informationen

Die folgenden Seiten sollten personalisiert werden, wenn Voco Chat für neue Nutzer:innen eingerichtet wird.

- Kann ich dir was sagen → über mich
Persönliche Angaben wie der Name der NutzerInnen, das Geburtsdatum und Vorlieben Es gibt mehr Platz auf der zweiten Seite, um weitere Dinge hinzuzufügen, die NutzerInnen teilen möchten, wie z. B. Hobbys oder besondere Interessen.
- Kann ich dir was sagen → was ich mag
Was NutzerInnen mögen, wie z. B. Dinge, Fernsehsendungen, Sportarten und andere besondere Interessen.
- Kann ich dir was sagen → was ich nicht mag
Was NutzerInnen nicht mögen, wie z. B. laute Geräusche, Fernsehsendungen, neue Situationen usw. .
- Ich will → Meine Dinge
Besondere Objekte, nach denen NutzerInnen vielleicht häufig fragen.
- Leute (Meine Familie, Meine Freunde, Meine Erwachsenen / Pfleger)
Namen von Personen, über die NutzerInnen vielleicht reden möchten, darunter Familienmitglieder, Freunde, PflegerInnen, LehrerInnen, persönliche Assistenten, ÄrztInnen, TherapeutInnen usw..
- Mein Werkzeugkasten → meine Gesundheit
Gesundheitsinformationen von NutzerInnen wie Allergien, Medikamente und andere Hilfen, die sie eventuell brauchen. Entfernen Sie unnötige Beispiele.
- Mein Werkzeugkasten → Mein UK (mehrere Seiten)
Informationen darüber, über mehrere Seiten hinweg, wie NutzerInnen kommunizieren. Unter Mein UK (Bereich Werkzeugkasten) finden Sie weitere Erläuterungen dazu. Löschen Sie ungeeignete Beispiele.
- Mein Werkzeugkasten → Sich beruhigen: Persönliche Beruhigungsstrategien hinzufügen

Spezifische Strategien, die NutzerInnen beruhigen, entweder als Aufforderung für NutzerInnen selbst oder für jene um sie herum. Löschen Sie ungeeignete Beispiele.

- Mein Werkzeugkasten → Ich spreche mit mir selbst:
Persönliche Aussagen für Selbstgespräche, löschen Sie für NutzerInnen ungeeignete oder nicht bevorzugte Aussagen. Siehe Mein Werkzeugkasten für weitere Informationen.
- Orte → Meine Orte
Namen von Orten, die nutzerInnenspezifisch sind, wie z. B. Clubs, örtlicher Park, Lieblingsrestaurant oder -kneipe.
- Mehr Wörter → Körper → Mehr → Geschlechtsteile
Ändern Sie hier, wenn notwendig, die Namen der Geschlechtsteile, falls von AnwenderInnen andere Begriffe genutzt werden. Kleine Kinder wählen z.B. oft Alternativbegriffe.
- Meine Sätze
Dinge, die NutzerInnen gern häufiger sagen, wie z. B. häufig genutzte, wiederholte Aussagen oder lokale Redewendungen und Scherze zwischen Gleichaltrigen. Entfernen Sie ungeeignete Beispiele.

Interessen und Motivation

Die folgenden Abschnitte können angepasst werden, um Nutzer:innen zu helfen, das Beste aus Voco Chat herauszuholen und über die Dinge zu sprechen, über die sie wirklich sprechen wollen.

- Ich will → etwas anschauen (mehrere Seiten): z. B. Lieblingssendung und -sender
- Mehr Wörter → Musik → Meine Musik: z. B. Lieblingslieder, -künstler usw.
- Mehr Wörter → Fernsehen und Film: z. B. Lieblingsprogramme, serien und -filme
- Ich will → etwas machen → Mehr: leere Seiten für zusätzliche Aktivitäten
- Ich will → etwas spielen: leere Seiten für zusätzliche Spiele / Spielaktivitäten
- Kann ich dir was sagen → ein Witz → mehr: Platz für zusätzliche Witze
- Kann ich dir was sagen → meine Neuigkeiten: Information darüber, was NutzerInnen

kürzlich gemacht haben oder andere wichtige Neuigkeiten

- Kann ich dir was sagen → eine Geschichte: Fotos hinzufügen, die NutzerInnen mit anderen teilen können. Siehe Seite 35 für weitere Informationen

Zusätzliche Änderungen

Es gibt in Voco Chat viele Stellen um weiteres Vokabular hinzuzufügen. Dies kann z.B. geschehen, wenn Nutzer:innen beginnen das Vokabular zu nutzen und bemerken, dass notwendige Wörter noch nicht vorhanden sind.

- Etwas stimmt nicht → Mehr: Platz für andere mögliche Probleme, die entstehen könnten
- Etwas stimmt nicht → Ich brauche → Mehr: Platz für andere Dinge, die regelmäßig benötigt werden
- Ich will → Körperpflege → Mehr: Platz für spezifische persönliche Bedürfnisse

Mehr Wörter

- Tiere: in allen Tierkategorien eine zweite Seite für Lieblingstiere
- Körper: Platz für weitere relevante Körperteile
- Getränke: Platz für Lieblingsgetränke
- Essen: Platz für alle Lieblingsgerichte oder Dinge auf Speisekarten
- Gesundheitsprobleme: Platz für spezifische gesundheitliche Problematiken
- Geld: Platz für zusätzliches Vokabular
- Sinnesangebote: Ergänzungsmöglichkeiten für spezifische Sinnesobjekte
- Technologie → Internet: Platz für Lieblingsseiten im Internet
- Mehr: Platz für zusätzliche Themen
- Gespräch → Mehr Begrüßungen/Mehr reden/Mehr Verabschiedungen: Platz für alternative Begrüßungen und Abschiede
- Orte → Gebäude → Schule → Mein Stundenplan (Nur Kindervokabular): Platz für den

Stundenplan

- Orte→ Ausflug→ Mein Ausflug: Vokabular für einen spezifischen Ausflug hinzufügen
- Orte→ Drinnen: Weitere Orte aus dem eigenen Zuhause oder der Umgebung hinzufügen
- Orte→ Geschäft→ Einkaufsliste: Bei Bedarf fürs Einkaufen hinzufügen
- Mehr Wörter → Zeitwörter → Mehr→ Besondere Tage: Für NutzerInnen bedeutende kulturelle / religiöse Anlässe