

Personalisierung von Super Core

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Empfehlungen zur Personalisierung von Super Core:

Leute

Fügen Sie die Namen von Personen hinzu, die für den Lernenden wichtig sind. Das können Familienmitglieder, Lehrer, Freunde und Nachbarn sein.

Auf den Seiten „Freunde“, „Familie“, „Schule“ und „Weitere Personen“ stehen viele freie Felder zur Verfügung. Es ist möglich, Fotos der Personen hinzufügen, die für den Lernenden noch aussagekräftiger sein können als Symbole.

Sie können auch die Namen von Haustieren hinzufügen – sie haben häufig den Stellenwert eines wichtigen Familienmitglieds.



Super Core lässt sich noch motivierender gestalten, indem Sie eigenes Vokabular, z. B. Ihre Lieblingsdinge und -beschäftigungen oder die Namen von Freunden und Familie, hinzufügen.

Botschaften

Auf der Seite „Botschaften“ in Super Core können Sie vollständige Mitteilungen teilen. Dabei kann es sich um wichtige Informationen handeln, die schnell gesagt werden müssen (z. B. wenn es ein Problem gibt), oder um etwas, das Sie regelmäßig sagen möchten (z. B. Ihren Namen).

Sie finden zahlreiche vorformulierte Mitteilungen und eine Reihe von Nachrichten, die Sie personalisieren können, um sie noch aussagekräftiger zu machen:



Wenn es Orte gibt, die Sie gerne regelmäßig aufsuchen, können Sie diese hier hinzufügen (z. B. „Ich möchte zu Tante Kim gehen“ oder „Wann gehen wir zu Tante Kim?“).



Wenn aufgrund des Gesundheitszustandes bestimmte Anforderungen erfüllt werden müssen, können Sie hier bestimmte Wendungen hinzufügen (z. B. „Ich muss abgesaugt werden“ oder „Ich brauche meinen Inhalator“).



Diese Seite eignet sich auch ideal für Hinweise zur verwendeten nonverbalen Kommunikation von Ja oder Nein (z. B. „Ich schaue nach rechts, um Ja zu sagen“ oder „Ich blinzele zweimal für Nein“).



Verwenden Sie diese Mitteilungen, um jemandem schnell etwas über sich zu erzählen, und fügen Sie z. B. Ihren Namen, Ihr Alter und Ihre Lieblingsdinge und -beschäftigungen hinzu.

Besondere Orte

Fügen Sie alle Orte hinzu, die der Lernende gerne besucht und die nicht bereits auf der Seite

„Orte“ enthalten sind. Das kann der Name eines bestimmten Geschäfts oder Restaurants sein oder eine Bezeichnung, die der Nutzer einem Ort gegeben hat (z. B. Vogelpark für Stadtpark).

Meine Lieblingsdinge

Unterstützt kommunizierende Personen sollten unbedingt darin befähigt und unterstützt werden, über ihre Lieblingsdinge und -beschäftigungen zu sprechen, denn dies kann ebenfalls ein wichtiger Motivator für das Erlernen von Sprache sein. Nicht nur die Mitteilungsseiten lassen sich personalisieren – es gibt auch zahlreiche Themenseiten, denen Sie Wörter zu Ihren Vorlieben z. B. aus den Bereichen Essen, Trinken, Spielzeug und Spiele hinzufügen können.

Religion und Kultur

Auf den Themenseiten finden Sie Wörter im Zusammenhang mit Religion und Festen, die Sie persönlich gestalten können, sowie eine Seite für Gebete unter Alltagsaktivitäten.

Mein Körper

In Familien werden unterschiedliche Wörter für intime Körperteile verwendet; unterstützt kommunizierende Personen sollten mit den verwendeten Begriffen vertraut sein. Auf den Themenseiten finden Sie den Bereich „Körper“, der auch eine Seite mit Begriffen für intime Körperteile beinhaltet.

Die Seite für intime Körperteile ist standardmäßig ausgeblendet, damit Sie Zeit haben, sie zu personalisieren, bevor Sie sie für den Benutzer freigeben. Um die Seite sichtbar zu machen, müssen Sie die Zugänglichkeit des Feldes im Bearbeitungsmodus von „versteckt“ in „voll zugänglich“ ändern. Sie können die Inhalte mit Wörtern personalisieren, die dem Lernenden vertraut sind.

Zum Einblenden von Symbolen, die nur für Erwachsene bestimmt sind, navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Schreiben“ > „Symbole“ im Raster und wählen Sie „Symbole für Erwachsene anzeigen“ aus.

Gesundheit

Das Themenseite „Gesundheit“ enthält allgemeines Vokabular. Sie können jedoch auch spezifische Begriffe für die medizinischen Bedürfnisse des Benutzers hinzufügen.

Eingabe

Für Lernende, die eine alternative Eingabemethode verwenden, können Sie im Raster „Einstellungen“ (im Zauberstab) zusätzliche Informationen diesbezüglich hinzufügen.

Wenn der Lernende z. B. eine Brille trägt und die Augensteuerung verwendet, kann z. B. der Satz „Kannst du bitte meine Brille putzen“ hinzugefügt werden.

Witze

Super Core enthält eine Reihe von Witzen. Sie können jedoch gerne weitere hinzufügen. Das Erzählen von Witzen kann ein sehr motivierender Weg für unterstützte kommunizierende Lernende sein, sich mit anderen Kindern und Erwachsenen auszutauschen und sich in Gesprächen aktiv einzubringen.

Tastaturen

Dies soll das Erkunden von Buchstaben und Tönen sowie die Entwicklung von Lese- und Schreibkenntnissen bei Kindern unterstützen und fördern. Es sind auch andere Tastaturen verfügbar, darunter eine ABC-Tastatur, bei der der Buchstabenname gesprochen und kein Ton ausgegeben wird, eine ABC-Tastatur, bei der ein Buchstabe einfach in das Mitteilungsfenster eingefügt wird, ohne dass er gesprochen wird, und eine QWERTZ-Tastatur. Es gibt auch Tastaturen mit einem Feld für die Wortvorhersage, die sich besonders für Lernende eignen, die häufiger buchstabieren.