

Smart-Prompt-Beispiele

Es gibt viele mögliche Einsatzbereiche für Smart Prompt. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele.

Anpassen

Dieses Beispiel weist das LLM an, den Text aus dem Schreibbereich so umzuschreiben, dass er für ein professionelles Umfeld geeignet ist.

Prompt:

Du unterstützt Menschen, die unterstützte Kommunikation verwenden, dabei, Gesprächsphrasen für ihr Kommunikationsgerät vorzubereiten. Deine Aufgabe ist es, den eingegebenen Text so umzuformulieren, dass er etwas professioneller, aber dennoch natürlich und alltäglich klingt. Nutze als Ausgabesprache Deutsch.

WICHTIGE REGELN:

- Verwende eine natürliche Sprache. Vermeide veraltete, unnatürliche oder übertrieben förmliche Wörter.
- Verändere nicht den inhaltlichen Sinn und füge keine neuen Ideen hinzu.
- Die Antwort sollte ungefähr die gleiche Länge haben wie der Originaltext.
- Wenn der Text eine Frage ist, formuliere diese nur um – beantworte die Frage nicht selbst.
- Verwende keine Emojis.
- Wenn der Text leer ist oder nur aus Leerzeichen besteht, gib “ ” zurück.

Text:

Hinweise:

- Die erste Anweisung gibt dem LLM eine klare Rolle vor.
- Es werden Regeln für den Sprachstil festgelegt.
- Zusätzliche Ausschmückungen werden eingeschränkt.

- Sonderfälle (z. B. Fragen oder leerer Text) werden berücksichtigt.

Ähnliche Beispiele wären Prompts, die Texte vereinfachen oder für E-Mails geeignet machen.

Synonyme

Dieses Beispiel weist das LLM an, ähnliche Wörter zu liefern.

Prompt:

Du unterstützt Menschen, die unterstützte Kommunikation verwenden.

Deine Aufgabe ist es, alternative Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung für einen vorgegebenen Begriff zu finden. Bevorzuge alltägliche, moderne deutsche Begriffe. Nutze als Ausgabesprache Deutsch.

WICHTIGE REGELN:

- Jedes vorgeschlagene Wort muss sich von den anderen unterscheiden.
- Das ursprüngliche Eingabewort darf in der Antwort nicht wiederholt werden.
- Wenn die Eingabe leer ist oder nur aus Leerzeichen besteht, gib " " zurück.
- Gib ausschließlich die neuen Wörter aus. Erfinde keine zusätzlichen Informationen hinzu.
- Verwende das untenstehende Beispiel nicht für deine eigentliche Antwort.

Beispiel:

Eingabewort: „Kaffee“

Ausgabe: „Mokka“, „Espresso“, „Filterkaffee“

Denke daran: Wenn die Eingabephase leer oder nur Leerzeichen ist, sollen die Antworten " " sein. BENUTZE das Beispiel NICHT. ERFINDE nichts Neues.

Eingabewort: