


Soziale Medien nutzen

Um sich bei den Sozialen Medien anmelden zu können, müssen Sie einen Account besitzen bzw. auf der entsprechenden Website erstellen.

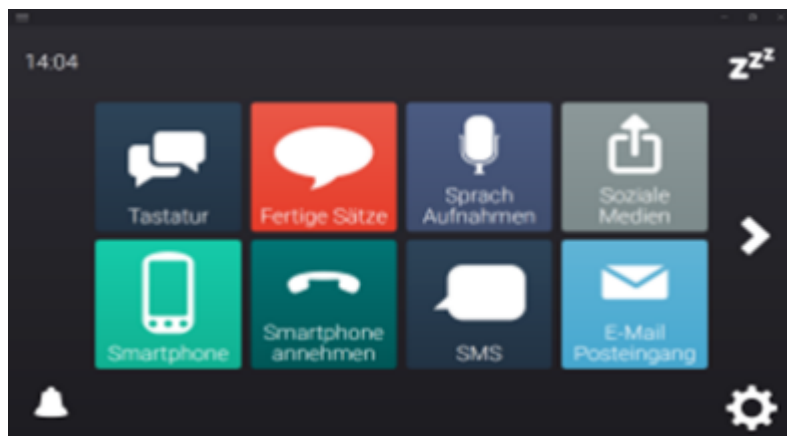

Im Fasttalker haben Sie schnellen Zugriff auf gängige Socialmedia Plattformen. Bei der Anmeldung und Navigation in den einzelnen Rastern werden Sie feststellen das sich einige Elemente wiederholen um die Nutzung zu vereinfachen. In den Seitensets können sie sich mit Hilfe des Infofeldes Tipps zur Navigation innerhalb des Seitensets ansehen.




Facebook: Bei der ersten Nutzung müssen Sie sich mit Ihrem Facebook Account anmelden. Wählen Sie dazu „anmelden“ auf der Startseite aus. Mit den blauen Zellen navigieren Sie zu

den

unterschiedlichen Bereichen von Facebook. Mit den weißen Zellen können Sie Nachrichten verfassen, Bilder hinzufügen etc. Sie können in beiden Spalten „weiteres“ auswählen, um weitere Optionen zu erhalten.


WhatsApp: Erforderlich für die Nutzung ist ein Smartphone, das mit dem Internet verbunden ist und auf dem WhatsApp installiert ist. Bei der ersten Benutzung des Rastersets muss zum Anmelden eine Verbindung mit dem WhatsApp-Konto auf dem Smartphone hergestellt werden: Folgen Sie nach „öffnen des Rastersets“ der Anleitung zum Scannen des QR-Codes. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie WhatsApp in Grid 3 nutzen, solange Ihr Smartphone online ist.

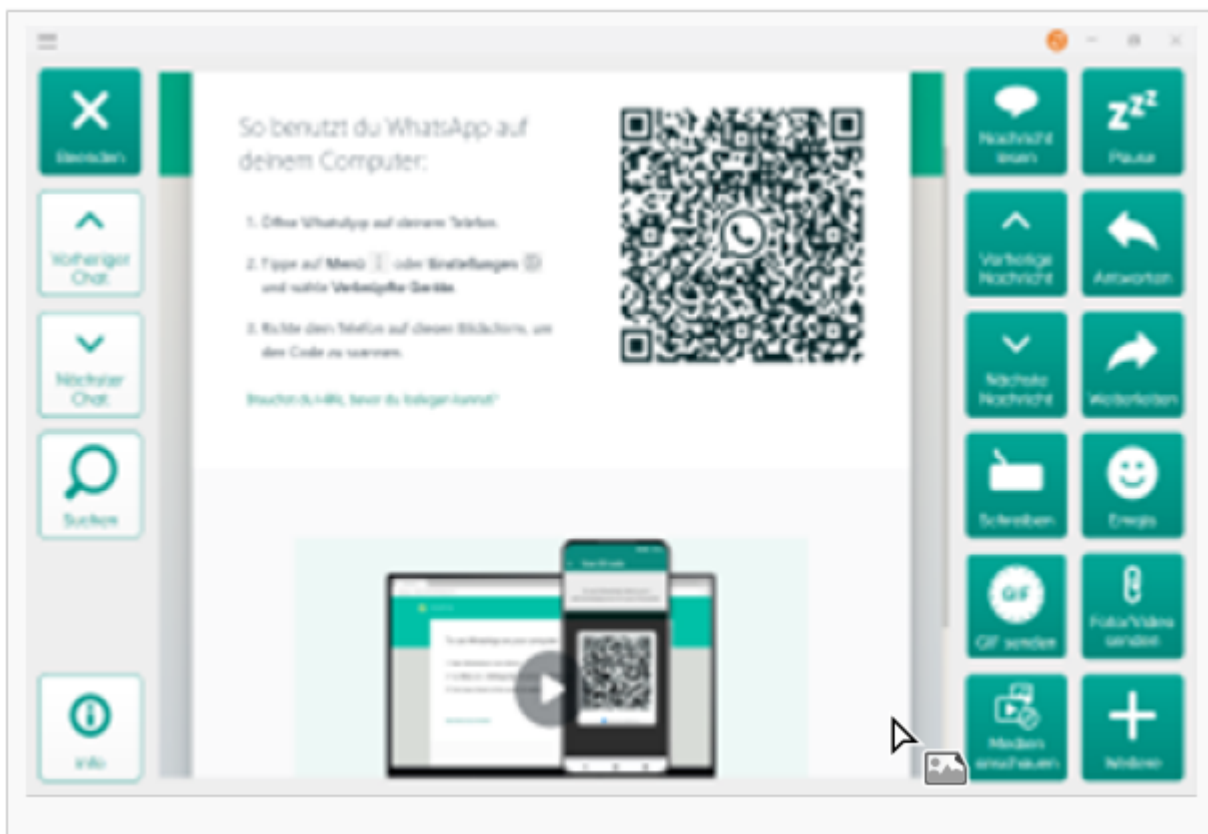

Twitter: Beim ersten Öffnen von Twitter werden Sie gebeten, sich mit Ihrem Account anzumelden.

Anschließend können Sie mit den blauen Schaltflächen durch Twitter navigieren oder einen neuen Tweet verfassen. Die weißen Schaltflächen


helfen Ihnen, die Funktionen von Twitter zu nutzen.

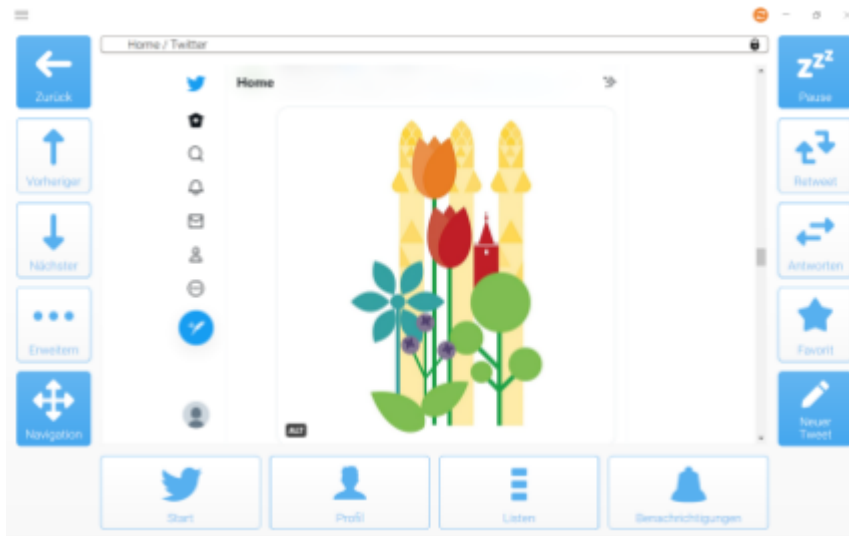

YouTube: Mit dem YouTube-Raster haben Sie schnellen Zugriff zu allen Videos. An der rechten Seite finden Sie dafür die Navigationszeile. Mit den roten Feldern können Sie verschiedene Suchoptionen auswählen. Bei der benutzerdefinierten Suche geben Sie einen Titel oder einen Begriff ein.

Die 1 Click-Suche ist schon mit einigen Begriffen ausgestattet, wie Nachrichten, Musik, Tiere und andere. Hier können Sie auch Ihre Lieblingsthemen als Suchbegriff speichern.

Spotify: Sie können mit Spotify mit Ihrem Grid Pad Musik auf verschiedenen Geräten abspielen, diese müssen dafür mit demselben Account angemeldet sein wie Ihr Gridseitenset. Ebenfalls können Sie auf Ihrem Grid Pad Musik abspielen, dafür müssen Sie Spotify auf ihr Gerät laden und sich dort anmelden. Wenn Sie beim ersten Öffnen des Spotify Gridseitensets nicht zum Anmelden aufgefordert werden, wählen Sie oben links Start -> dann Werkzeuge. Auf der nun offenen Seite wählen Sie unten anmelden (oder abmelden, um sich mit einem anderen Account neu anzumelden).

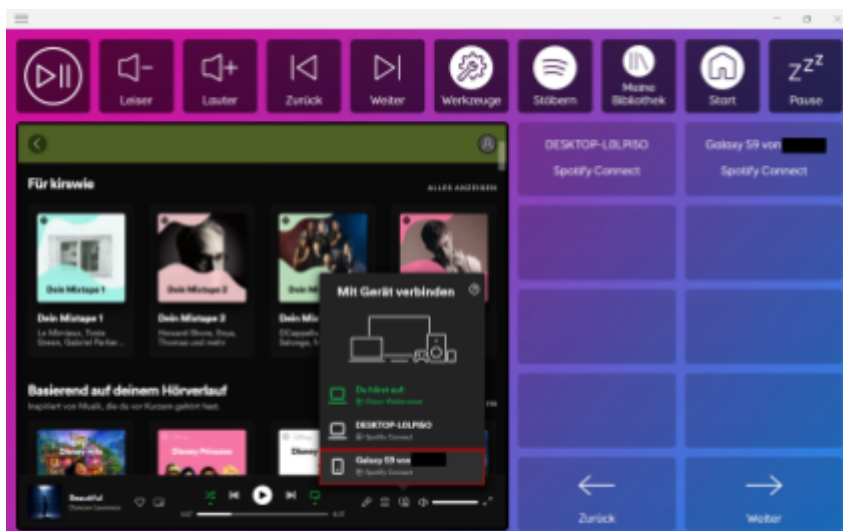

Nun sollte Ihnen angezeigt werden, auf welchen Geräten Sie Ihre Musik abspielen wollen. Wählen Sie das entsprechende Gerät und Navigieren sie anschließend mithilfe der oberen Leiste durch die Funktionen von Spotify und hören Sie, wo und wann Sie wollen, Ihre Lieblingsmusik oder tauschen Sie Ihrem Lieblingspodcast.