


Besondere Funktionen

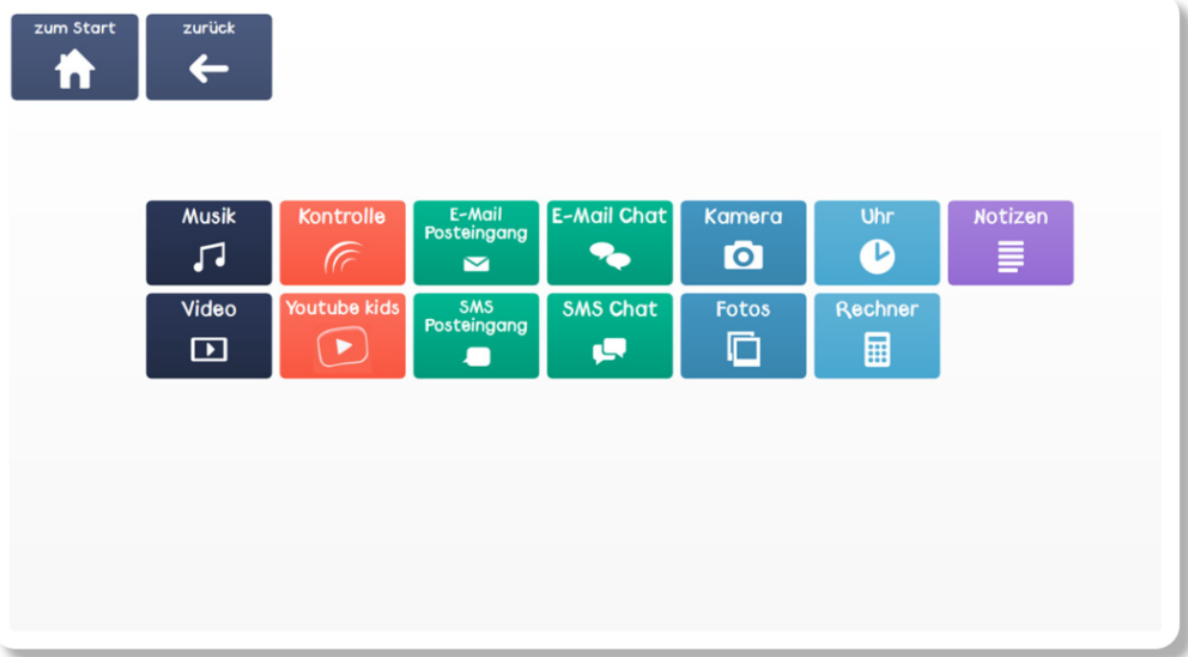


Barrierefreie Apps wie E-Mail und SMS sind im Seitenset enthalten und können symbolbasiert verwendet werden. Der Weg führt über "Zauberstab" > "Apps".

Die Grid 3-spezifischen Programme zur Darstellung von gespeicherten Fotos, Videos und Musik sowie Seiten zur Umfeldsteuerung und für Notizen stehen hier ebenfalls zur Verfügung. Manche dieser Apps müssen zunächst eingerichtet werden.

Kontakte hinzufügen

Um Anrufe zu tätigen und SMS bzw. E-Mails schreiben zu können, müssen Kontakte angelegt werden. Dies geht über die Menüleiste und "Einstellungen" > "Kontakte"

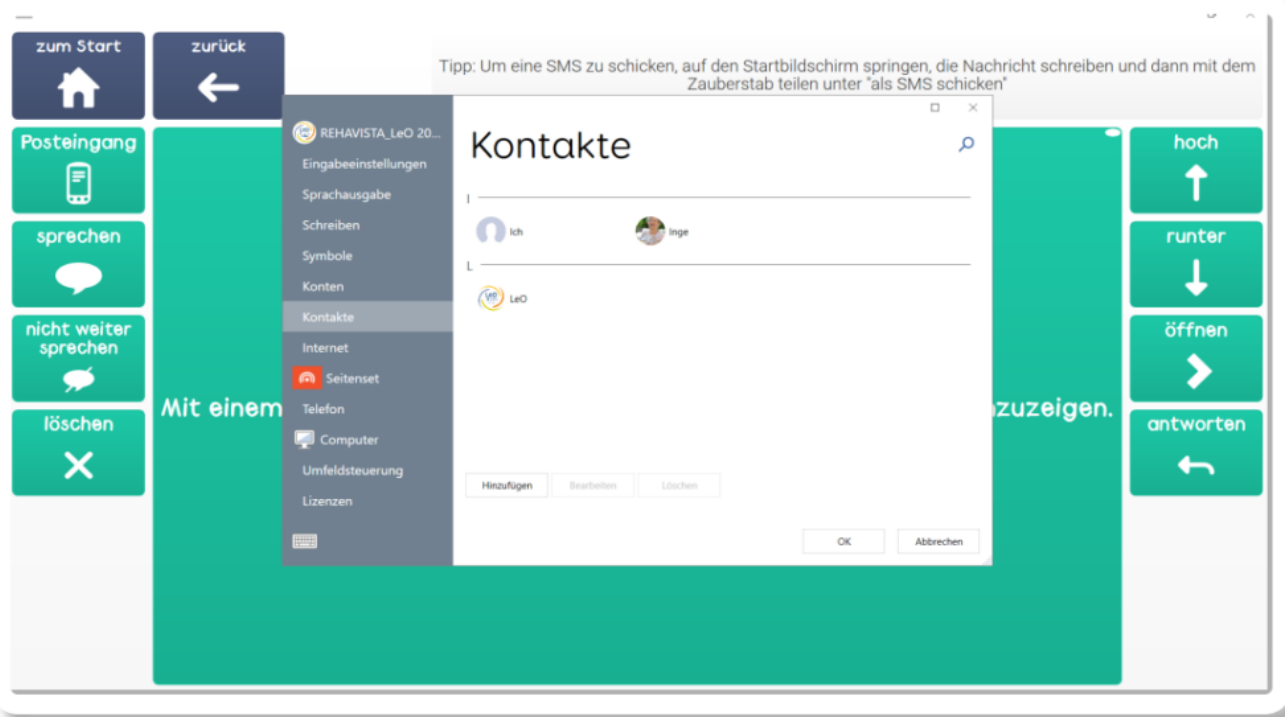


SMS



Auf den "SMS"-Seiten erscheint u.a. die Liste der Nachrichten Ihres Mobiltelefons. "Sprechen"

liest die ausgewählte Nachricht laut vor. "Öffnen" zeigt die komplette Konversation.

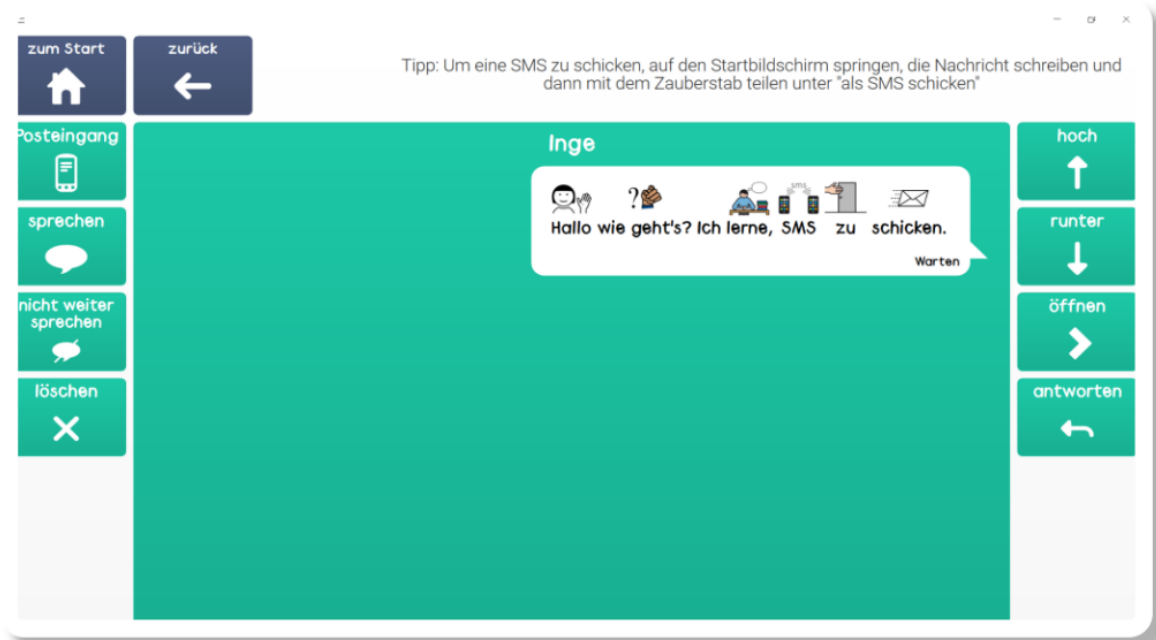


Zum Schreiben von Nachrichten sind Kontakte erforderlich.

E-Mail



Zum Navigieren werden die Felder mit den Pfeilen verwendet. Nach dem Öffnen einer E-Mail sehen Sie den gesamten damit zusammenhängenden Schriftverkehr.

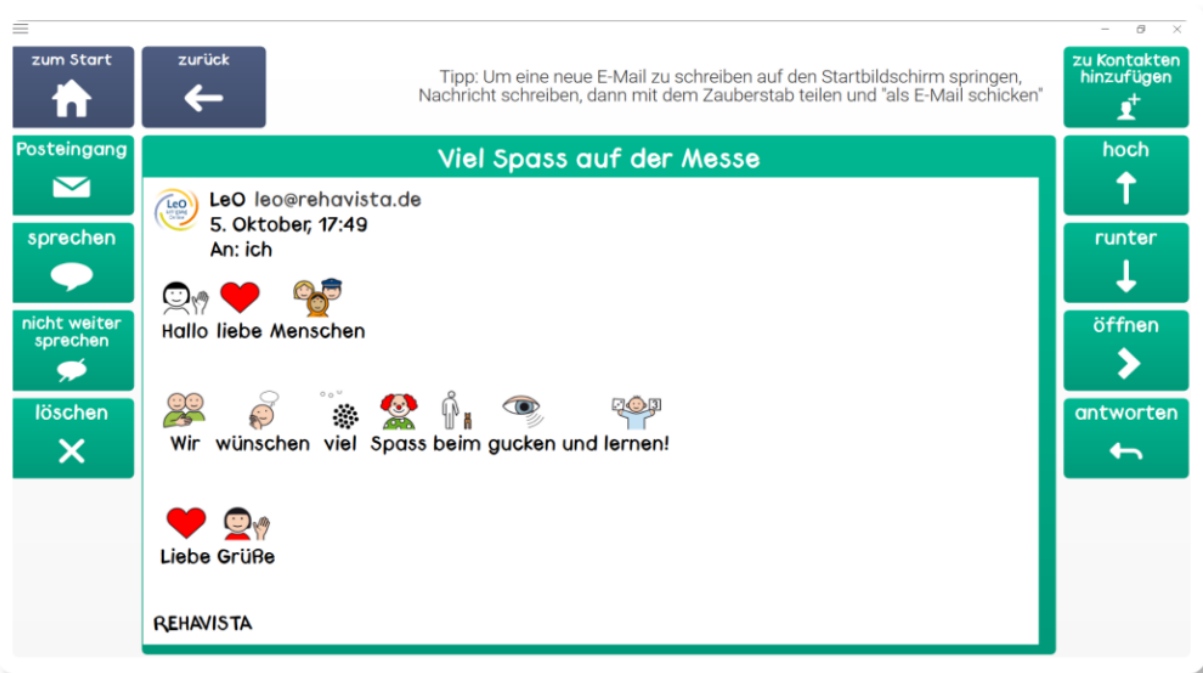

Schreiben Sie den Text für eine neue E-Mail ins Schreibfeld auf der Startseite und gehen Sie dann über den Zauberstab auf "teilen" > "als E-Mail schicken".