


Spickzettel: Grid Pad 13 und 16 mit Augensteuerung

Hier finden Sie einen Spickzettel zum Gerät, zur Positionierung, den Smart Buttons und der Software.

Spickzettel: Grid Pad 13 und 16 mit Augensteuerung

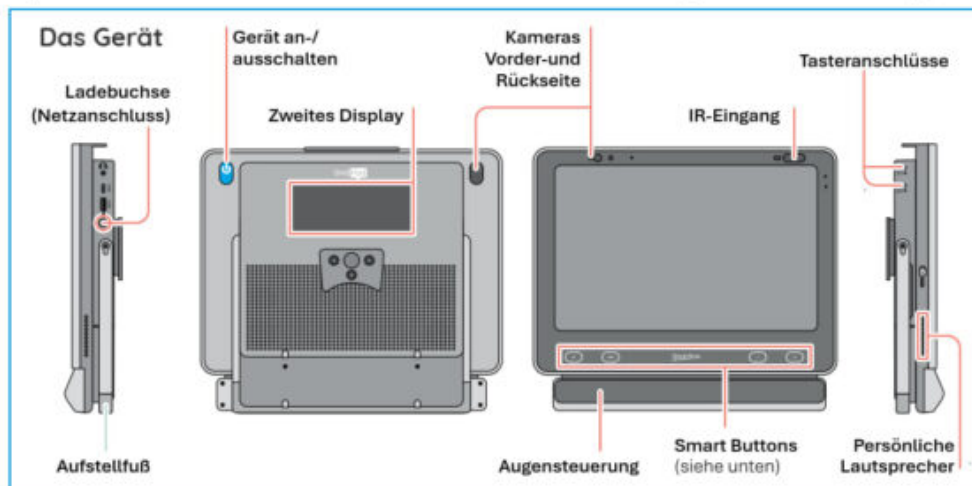

Positionierung



Abstand ca. 50–70 cm, Blickwinkel ca. 90° zur Bildschirmoberfläche

Parallel zu den Augen des Benutzers / der Benutzerin

Bei Benutzer:innen, die zur Seite gelehnt sind oder liegen, muss das Grid Pad ebenfalls geneigt werden, damit die Augen des Benutzers / der Benutzerin parallel zum Bildschirm ausgerichtet sind.

Bequeme Haltung des Benutzers / der Benutzerin

Keine direkte Sonneneinstrahlung auf Bildschirm oder Augen des Benutzers / der Benutzerin

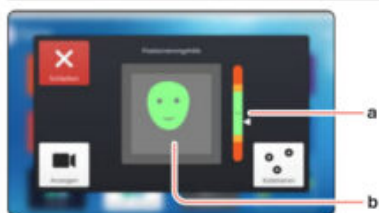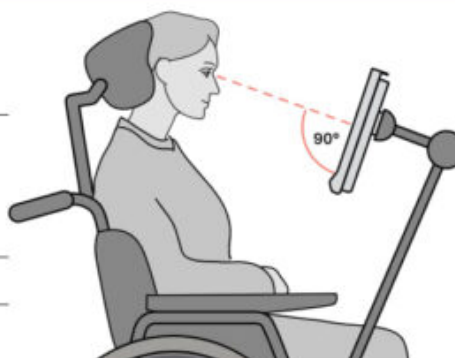


Hinweis: Durch die Anzeige der Positionierungshilfe finden Sie spielend die richtige Position (s. auch „Smart Buttons“). Achten Sie darauf, dass der weiße Pfeil so nah wie möglich am Strich im grünen Bereich ist (a) und das angezeigte Gesicht mittig im Fenster (b) zu sehen ist.

Eine neue Kalibrierung ist nur dann erforderlich, wenn die Augensteuerung noch nicht auf den Nutzer / die Nutzerin eingestellt wurde bzw. die letzte Kalibrierung nicht ausreichend war! Eine reine Änderung der Körperposition bedingt keine Neukalibrierung.

Smart Buttons

Unten am Gerät befinden sich fünf Smart Buttons für wichtige Befehle. Alle Smart Buttons können per Touch und Augensteuerung bedient werden.

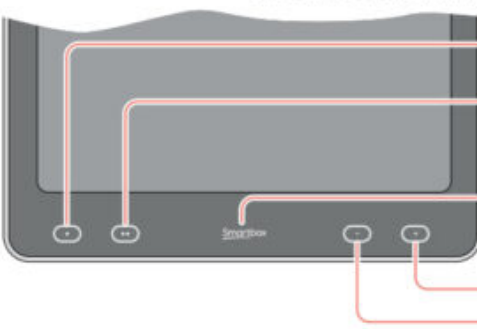

- Smart Button 1:**
Augensteuerungspause an-/ ausschalten
- Smart Button 2:**
Positionierungshilfe für Augensteuerung einblenden
- Smartbox Button:**
öffnet „Meine Seiten“ (Übersicht über Inhalte)
- Button:** Ton leiser
- Button:** Ton lauter

Spickzettel: Grid Pad 13 und 16 mit Augensteuerung


Weitere Augensteuerungseinstellungen

Menü öffnen

(ggf. über F12 einblenden),
dann auswählen:

- Einstellungen
- Eingabeeinstellungen
- Augensteuerung
- Aktivierung

Hier können u. a. die Aktivierungszeit (Dauer, die ein Feld angeschaut werden muss, bis es aktiviert wird) oder visuelle Hervorhebungen eingestellt werden.

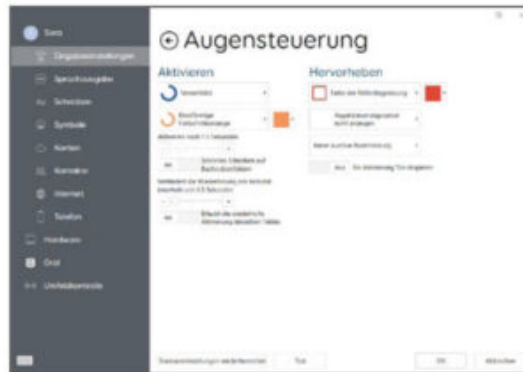

Software

Grid 3

Einstellungen (F10):

- Menü für grundlegende Einstellungen.

Seitensets hinzufügen:

- Neue Inhalte zur Startseite des Nutzers / der Nutzerin hinzufügen, z.B. kostenfreie Inhalte aus den Bereichen Anbahnung, Kommunikation, Training, Lernen und Spiel.

Seitensets anordnen (F11):


- Die Startseite des Nutzers / der Nutzerin neu sortieren und Seitensets entfernen. Zum Beenden F11 drücken.

Hilfe (F1):

- Zugriff auf Wissensdatenbank Smartbox Hub (Inhalte auf Englisch). Deutsche Inhalte finden Sie auf der REHAVISTA Schulungsplattform. Sollten Sie die Login-Daten, die Sie bei der Auslieferung bekommen haben, nicht mehr vorliegen haben, wenden Sie sich bitte an REHAVISTA.

Datensicherung:

- Einstellungen → Benutzername → Benutzer sichern.

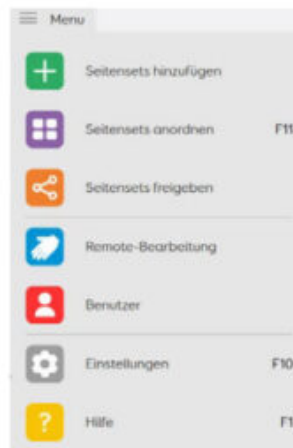

Look to Learn




1. Look to Learn in Grid 3 starten („PC Steuerung für Look to Learn“)
2. Übung per Touchscreen auswählen
3. Zum Verlassen einer Übung auf das „X“ oben rechts klicken
4. Um zu Grid 3 zurückzukehren, „Beenden“ unten rechts oder „Meine Seiten“ wählen



Look Lab



1. Look Lab in Grid 3 starten („PC Steuerung für Look Lab“)
2. Übung aus einer der Kategorien auswählen
3. Zum Verlassen einer Übung auf das Pausenzeichen oben rechts klicken
4. Um zu Grid 3 zurückzukehren, den unten links angezeigten Grid-Button auswählen

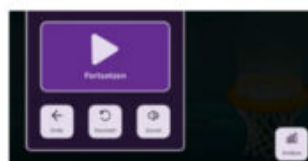

Tipp: Look to Learn und Look Lab bieten eine Blickanalyse in Form einer Heatmap an: Klicken Sie nach dem Spiel auf den angezeigten Analyse-Button.