



Sprachaufnahmen bei MetaTalk hinterlegen

Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie eine Sprachaufnahme auf einem Button in MetaTalk hinterlegen.

- Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus: Tippen Sie auf den Stift in der schwarzen Leiste und wählen Sie die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge aus.

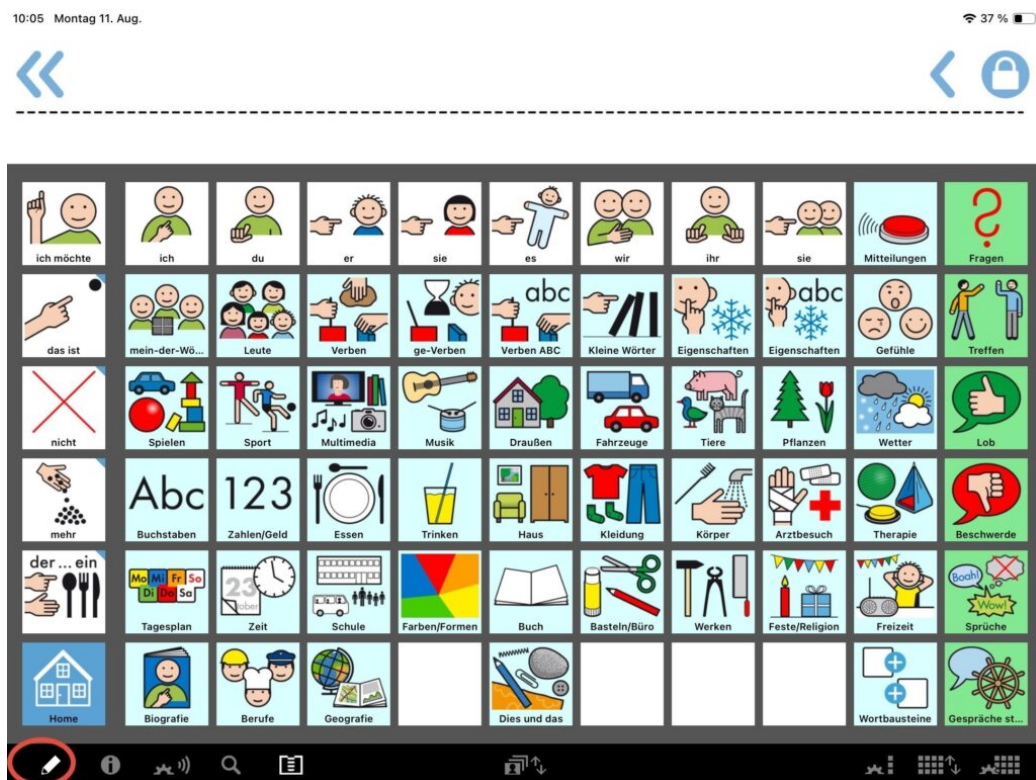

- Button auswählen: Suchen Sie den Button, auf dem die Sprachaufnahme gespeichert werden soll, und tippen Sie zweimal darauf.
- Audio aktivieren: Schieben Sie den Regler bei „Audio“ auf Grün, damit Sie eine Aufnahme machen können.
- Aufnahme starten: Tippen Sie auf das grüne Play-Symbol, um die Aufnahme zu beginnen.

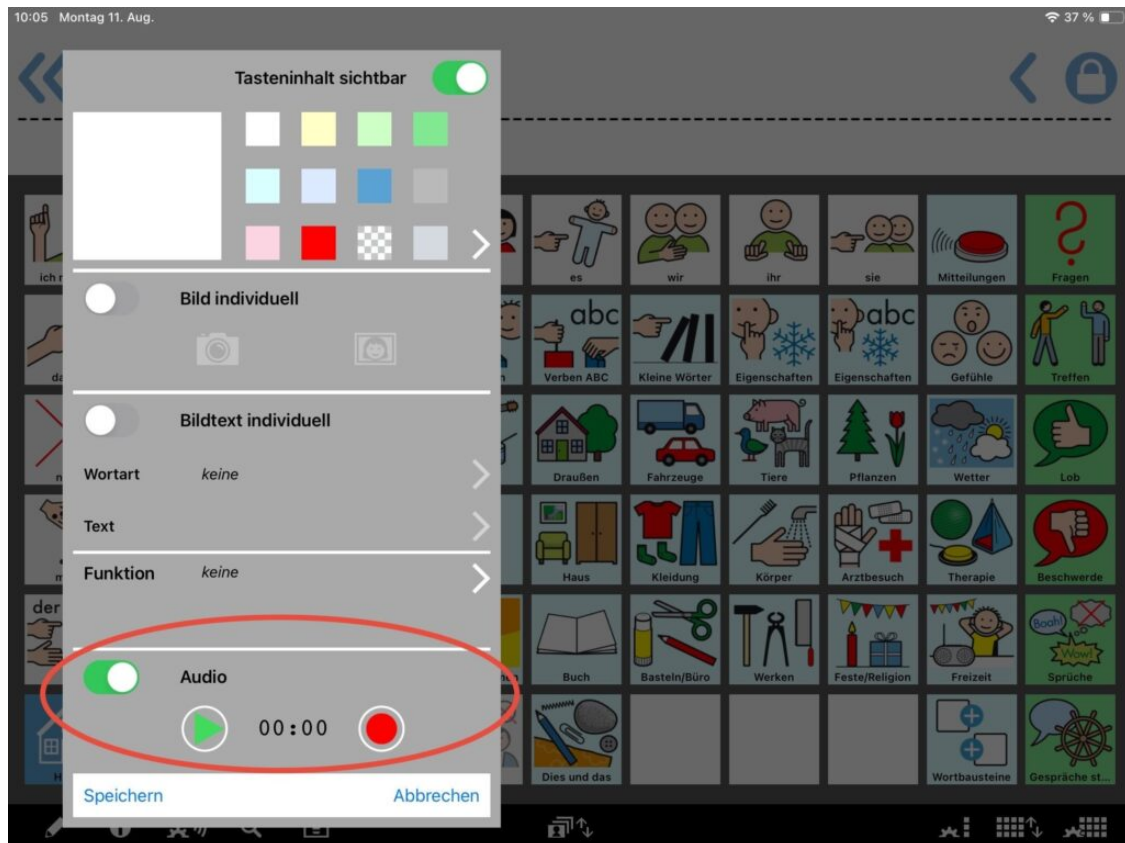

- Aufnahme beenden: Tippen Sie nach der Aufnahme auf das rote, runde Symbol, um die Aufnahme zu beenden.
- Speichern: Tippen Sie unten links auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.