

Feldeigenschaften

Die Eigenschaften eines Feldes in Voco Chat beschreibt, also deren Aussehen, geben Auskunft über die Funktionsweise des Feldes. Es gibt drei Haupteigenschaften:

Sprechen



Eine Feld mit gewöhnlichen Ecken ist ein Vokabularfeld. Das Feld wird ausgesprochen und Wörter werden in das Nachrichtenfenster eingefügt. Dieses Feld springt nicht auf eine andere Seite.

Felder, die so aussehen, werden ausgesprochen.

Verknüpfungen



Ein Feld mit einer abgeschnittenen Ecke ist eine Verknüpfung. Dieses Feld führt auf eine andere Seite mit mehr Vokabular.

Das Feld wird nicht ausgesprochen und es werden keine Wörter in das Nachrichtenfenster eingefügt.

Zellen, die so aussehen, blättern weiter.

Sprechen und Verknüpfung



Ein Feld mit einer bunten Ecke wird ausgesprochen, es werden Wörter in das Nachrichtenfenster eingefügt und sie blättert zu einer Seite, auf welcher der nächste Teil der Nachricht ausgewählt werden kann.

Zellen, die so aussehen, werden ausgesprochen und blättern weiter.

Es gibt außerdem viele Seiten, die einheitlich gestaltet sind und so NutzerInnen unterstützen können, kontextgebunden zu kommunizieren. Diese Gesprächsseiten sind im gesamten Voco

Chat auffindbar. Sie besitzen eine Spalte gelber Felder (links) gefolgt von einem Block aus neun Vokabularfeldern, gegebenenfalls mit Verknüpfungen zu einer zweiten Seite.

Die gelben Felder links auf der Seite heben wichtige Aussagen hervor, die in diesem Kontext verwendet werden können.

Die folgenden Seiten sind auf diese Weise gestaltet:

- Seiten zu Aktivitäten
- Seiten zur Beschreibung
- Seiten zur Körperpflege
- Seiten zu Orten
- Seiten zu Mehr Wörter

Manche Seiten beinhalten zwei Spalten mit hervorgehobenem Vokabular, wie z. B. Seiten zu Spielaktivitäten und zu medizinischen Einrichtungen (Zahnarzt, Arzt, Krankenhaus). Hier gibt es zusätzlich wichtiges Vokabular, welches für dieses Thema wichtig ist.