

Unterstützter Mitteilungsaufbau

Viele Felder in Voco Chat werden ausgesprochen und blättern gleichzeitig auf eine neue Seite. Oftmals sprechen diese Felder mehr als ein Wort aus und unterstützen NutzerInnen beim Aufbau von Mitteilungen in Sätzen. Dank dieser unterstützten Navigation müssen NutzerInnen nicht entscheiden, auf welche Seite sie blättern, wenn sie ihre Nachricht beginnen. Stattdessen können sie sich ganz darauf konzentrieren, was sie sagen wollen.

„Kann ich dich was fragen“ + „Was machst du?“



„Etwas stimmt nicht“ + „Ich will nicht“ + „Ich bin müde“



„Ich will“ + „etwas trinken“ + „Kaffee“



Voco Chat macht es NutzerInnen oft möglich, mittels der Auswahl von nur wenigen Feldern eine komplette Aussage zu übermitteln. Zum Beispiel: „Etwas stimmt nicht“ + „ich fühle mich + aufgeregt“, oder „Ich denke + Ich mag es.“ So eignet sich Voco Chat auch für neue UK-NutzerInnen.

NutzerInnen, denen es möglich ist, können längere Nachrichten mit mehreren Auswahlen erstellen. Ein Hauptziel dieser Aussagenunterstützung in Voco Chat ist es, NutzerInnen dabei zu fördern und zu ermutigen eine Auswahl nach der nächsten zu tätigen und so längere Aussagen aufzubauen.

Wenn einer der sechs Nachrichtenpfade auf dem Startbildschirm ausgewählt wird, leert Voco Chat das Nachrichtenfenster automatisch für NutzerInnen und erleichtert so den Anfang einer neuen Nachricht.