

Tastaturkürzel

In Grid 3 kann man eine Reihe sinnvoller Tastaturkürzel verwenden, die die Nutzung und Bearbeitung der Software vereinfachen und beschleunigen.

Tastaturkürzel für den Nutzermodus

F9: Wort finden

F10: Einstellungen öffnen

F11: In den Bearbeitungsmodus wechseln/ Bearbeitungsmodus beenden

F12: Menüleiste ein- bzw. ausblenden

Tastaturkürzel für den Bearbeitungsmodus

F11: In den Bearbeitungsmodus wechseln/ Bearbeitungsmodus beenden

Strg X: Ein Element ausschneiden

Strg C: Ein Element kopieren

Strg V: Ein Element einfügen

Strg Z: letzte Aktion rückgängig machen

Strg A: Alle Elemente auswählen

Strg D: Alle Elemente abwählen

Strg J: „Gehe zu“ als Aktion zu einer Taste hinzufügen

Strg F: „Gehe zu“ – Aktion ausführen (Seite öffnen)

Strg W: „Schreiben“ als Aktion zu einer Taste hinzufügen (Schreibfeld erstellen)

Pfeiltasten: Navigieren innerhalb der Felder (+ Umschalttaste: markieren von Feldern)

Enter: Feld erstellen (auf leerem Feld)

Einfügen (Einfg): Befehl hinzufügen (oder Feld erstellen bei leerem Feld)

Entfernen (Entf): Feld löschen

F1: Hilfe öffnen

F2: Beschriftung ändern

F3: Bild finden

F4: Bild bearbeiten

F5: Bild löschen

F9: Wort finden (im Nutzermodus)

F10: Einstellungen öffnen

F12: Menüleiste ein- bzw. ausblenden

Alt: blendet Buchstaben ein, so dass man die Menüs per Tastatur bedienen kann