



Die Startseite

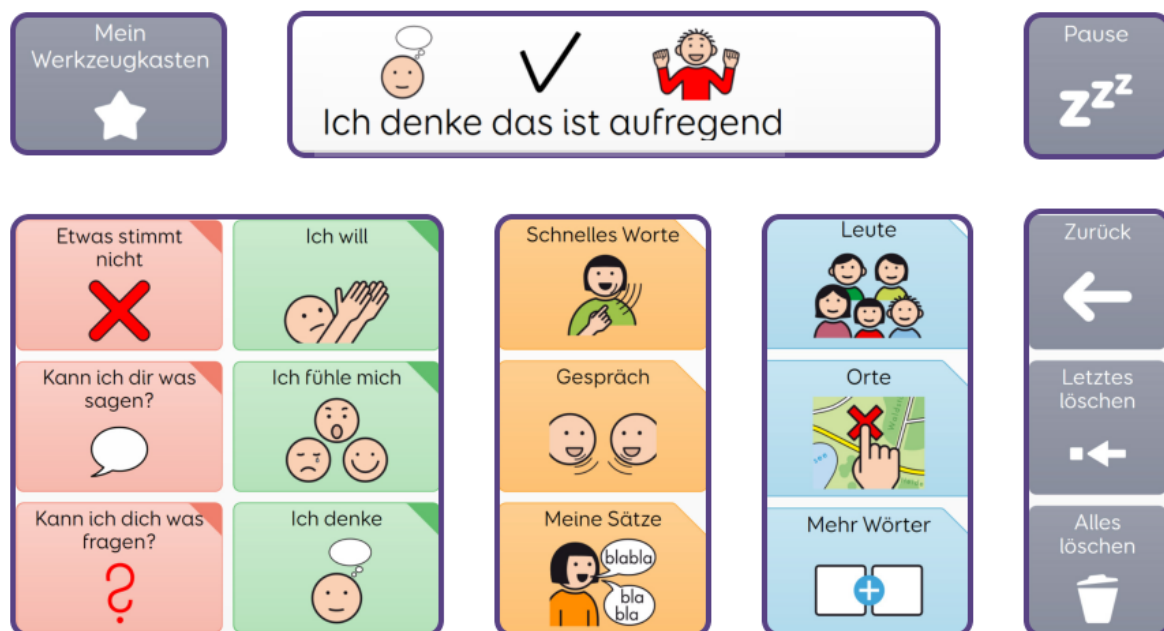

Die Voco Chat Startseite besteht aus 12 Kommunikationsfeldern, der Spalte mit Funktionsfeldern, dem Nachrichtenfenster und einer Verknüpfung zu Mein Werkzeugkasten.

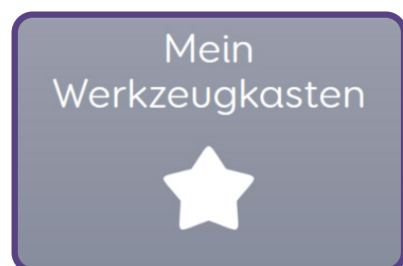


Die oberste Zeile auf der Startseite beinhaltet die Verknüpfung zu Mein Werkzeugkasten. Hier finden Sie viele nützliche Ressourcen zur Unterstützung der Kommunikation und des emotionalen Wohlbefindens sowie Apps zur Förderung von Interaktion und Teilhabe finden.

Das große weiße Feld ist das Nachrichtenfenster. Ausgewählte Felder erscheinen in diesem Nachrichtenfenster. Wählen Sie das Nachrichtenfenster aus wird die ganze Nachricht nochmal ausgesprochen.



Die zwölf Kommunikationsfelder sind in drei Gruppen angeordnet.

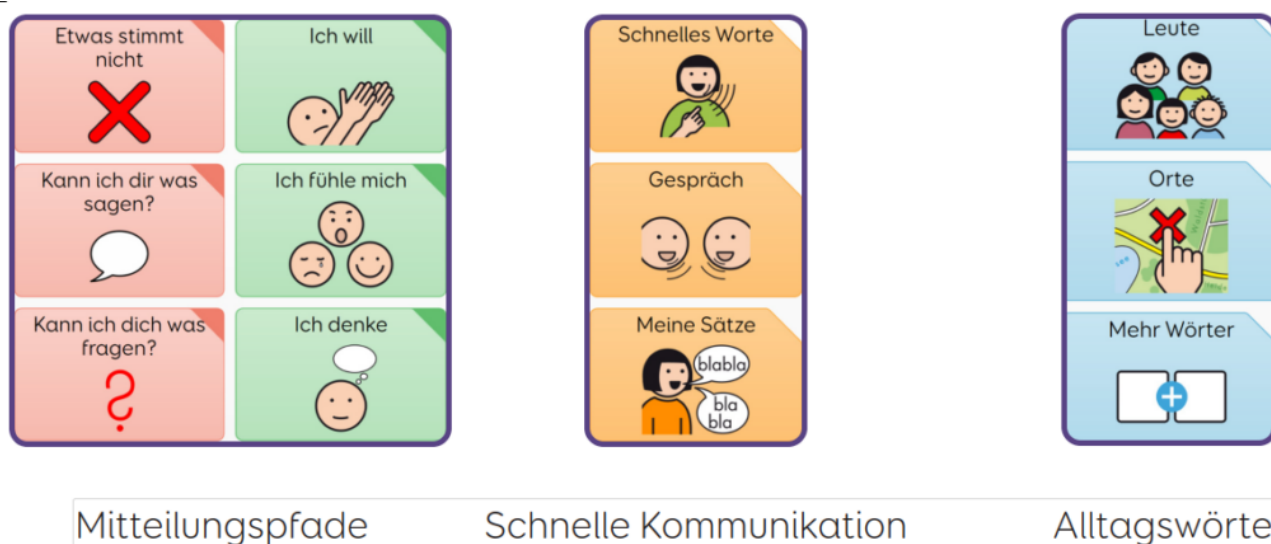

Die sechs Felder links sind die Mitteilungspfade. Sie helfen beim Erstellen der Nachricht, auf Basis des Kommunikationsanlasses. Zum Beispiel, um jemandem zu sagen, dass etwas nicht stimmt, um jemanden etwas zu fragen oder um eine Meinung zu äußern.

Die orangen Schnelle Kommunikation Felder in der nächsten Spalte beinhalten Zusatzvokabular, darunter nützliche Wörter wie „mehr“, „stopp“ und „fertig“, praktische Phrasen für ein Gespräch und Platz für Lieblingsaussagen der Nutzer:innen.

Die blauen Alltagswörter Felder in der vierten Spalte bieten viel nützliches Vokabular wie Namen von Personen, Orte und kategorisiertes Vokabular für eine Reihe anderer Themen. Viele dieser Wörter können über Verknüpfungen ausgehend von den sechs Mitteilungspfaden oder direkt über die Verknüpfungen der Alltagswörter erreicht werden.



Die graue Funktionen Spalte rechts im Bildschirm beinhaltet die Option, auf die vorige Seite zurückzuspringen, einzelne Wörter aus dem bzw. den gesamten Inhalt des Nachrichtenfensters zu löschen.

Bei der Verwendung alternativer Eingabemethoden wie Augensteuerung, Kopfmaus oder Auswahl durch Verweilen erscheint ein Pause-Feld oben in dieser Spalte, über die die Eingabemethode pausiert werden kann. Diese Spalte mit Funktionsfeldern ist auf jeder Seite in Voco Chat vorhanden.