

Tipps und Hinweise zur Aufnahme Ihrer ElevenLabs-Stimme

Die ElevenLabs-Stimmen können entweder durch direktes Erstellen von Audioaufnahmen auf der Website oder durch Hochladen vorhandener Audio- und Video-Dateien erstellt werden.

Die beste Option ist die, die für den Ersteller der Stimme am besten geeignet ist.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, um das Beste aus der Aufnahme Ihrer Stimme herauszuholen, egal ob live aufgenommen oder über aufgezeichnete Dateien.

Beim Erstellen von Audioaufnahmen ist es am besten, folgende Punkte zu beachten:

- Vermeiden Sie laute Umgebungen oder reduzieren Sie Hintergrundgeräusche.
- Möglicherweise müssen Sie ein Headset-Mikrofon verwenden, aber Sie können auch mit einem Smartphone oder Tablet Audioaufnahmen machen. In der Regel haben Smartphones ein besseres Mikrofon als Tablets.
- Halten Sie den Abstand des Mikrofons zu Ihrem Mund konstant, um eine gleichmäßige Lautstärke der Aufnahme zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Aufnahme nicht die Sprache einer anderen Person aufnehmen.
- Achten Sie auf Ihre Sprechgeschwindigkeit und Ihr Tempo. Wenn Sie sehr langsam sprechen, wird die erzeugte Stimme ebenfalls langsam klingen. Versuchen Sie so zu sprechen, wie Sie es in einem normalen Gespräch tun würden.
- Achten Sie auf Ihre Lautstärke. Wenn die Aufnahmen eine sehr niedrige Lautstärke haben, wird die ElevenLabs-Stimme sehr leise klingen.
- Bringen Sie Emotionen in die Aufnahme ein. Sie können ein Buch vorlesen, ein einseitiges Gespräch führen, Fragen beantworten oder eine Geschichte erzählen, z. B. über einen Lieblingsurlaub oder welche Lebensmittel Sie lieben oder nicht mögen.

Wenn Sie Audio- oder Videodateien hochladen, die sie bereits besitzen oder die Sie kürzlich unter Verwendung der oben genannten Tipps aufgenommen haben, gibt es einige zusätzliche Hinweise:

- Ihre Aufnahmen sind möglicherweise nicht perfekt. Es gibt Programme wie das kostenlose Programm Audacity, mit dem Sie Hintergrundgeräusche, andere Sprecher und Hintergrundmusik entfernen können. Auch können Sie die Lautstärke erhöhen, wenn

diese zu niedrig ist. Auf der Website des Boston Children's Hospital gibt es Tutorials, die Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Aufnahmen helfen können:

https://www.youtube.com/playlistlist=PLFWJQxERpRE_lz1mXqYI20ky0YhpFbPrh

- Die Aufnahmen können aus WhatsApp-Sprachnachrichten, Facebook-Chatnachrichten, Voicemail-Aufnahmen usw. stammen.
- Die Aufnahmen müssen mindestens 8 Sekunden lang sein. Wenn Sie viele kurze Aufnahmen haben, können Sie Software wie Audacity verwenden, um diese zusammenzufügen und eine längere Aufnahme zu erstellen, die Sie hochladen können.
- Eine Audiodatei kann auch aus Ihren Videoaufnahmen stammen. Programme wie Audacity ermöglichen es Ihnen, nur die Audiospur aus einem Video zu exportieren, um die Dateigröße zu reduzieren, sodass Sie die Datei auf der ElevenLabs-Website hochladen können.
- ElevenLabs unterstützt wav, mp3, mp4 und opus (von WhatsApp-Videoaufnahmen). Wenn Sie eine Datei in ein anderes Format konvertieren müssen, kann Software wie Audacity Ihnen dabei helfen.
- Beim Hochladen einer Audiodatei für den Professional Voice Clone können Sie die Stimme des Sprechers verbessern, indem Sie die Option „Hintergrundgeräusche aus Audio-Proben entfernen“ aktivieren.