

Tipps und Hinweise zur Verwendung der Fix-Funktion

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit Tipps zur Nutzung des Fix-Tools:

- Vermeiden Sie es, beim Schreiben Fehler sofort zu korrigieren – das Fix-Werkzeug sollte diese für Sie beheben.
- Beenden Sie Ihre vollständige Nachricht, bevor Sie das Fix-Tool verwenden – die Ergebnisse werden in der Regel als vollständige Sätze zurückgegeben.
- Verwenden Sie gängige Abkürzungen, wenn es passt, z. B. „mfg“ für „mit freundlichen Grüßen“ oder „evtl“ für „eventuell“.
- Platzieren Sie eine „Schreiben rückgängig“-Zelle auf derselben Seite wie das Fix-Werkzeug – die Ergebnisse entsprechen nicht immer exakt der von Ihnen beabsichtigten Bedeutung.
- Wenn Fix beim ersten Mal nicht korrekt arbeitet, hilft es manchmal, „rückgängig“ zu wählen und dann erneut Fix zu verwenden – die KI gibt nicht immer dieselbe Antwort zurück.
- Fix dient nicht nur der Fehlerkorrektur – Sie können Tippaufwand sparen, indem Sie absichtlich Buchstaben oder Leerzeichen auslassen.
- Wenn Sie offline sind, wird die Fix-Zelle ausgegraut. Achten Sie darauf, besonders bei instabiler Verbindung (z. B. unterwegs), da Sie Ihren Satz je nach Verfügbarkeit von Fix eventuell anders formulieren würden.
- Verwenden Sie eine größere Ausgabeleiste, um längere Sätze nach der Korrektur mit Fix zu überprüfen.
- Fix funktioniert hervorragend bei bekannten Wörtern und Ausdrücken, hat aber möglicherweise Schwierigkeiten mit Ortsnamen oder lokalem Slang (für häufig verwendete Begriffe können Sie Abkürzungen in den Grid-Einstellungen hinterlegen).
- Fix ist für den Einsatz in Mitteilungsfenstern konzipiert, kann aber auch in anderen Schreibbereichen verwendet werden.
- Fix verwendet die Sprache des Grid-Sets zur Korrektur. Um es in einer anderen Sprache zu nutzen, stellen Sie sicher, dass die Sprache des Grid-Sets entsprechend eingestellt ist.