


Umfeldsteuerung


In Grid 3 finden Sie eine viel Zahl an vorgestellten Rastern für Ihr Umfeld in der „Servus Umfeldsteuerung“. Hier können Sie schnell und unkompliziert Fernbedienungen u.ä. einlernen.



Wählen Sie das Feld, dessen Fernbedienung Sie einlernen wollen aus, zb. Fernseher. Dort finden Sie eine einfach Fernbedienungs-Seitenset zur Steuerung Ihres Gerätes.

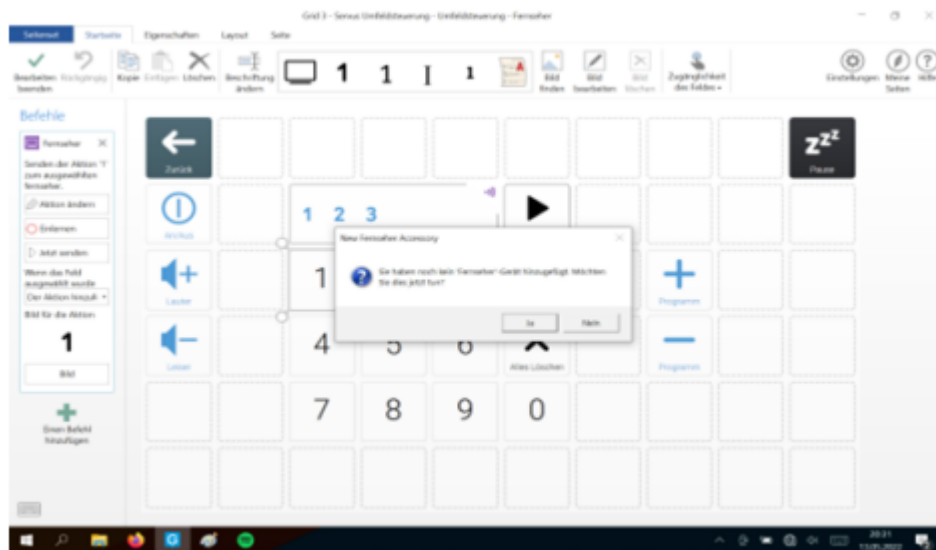

Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus (Menüleiste oder F11). Wählen Sie nun ein vorgefertigtes Feld aus. An der linken Seite, unter Befehle, sehen Sie schon ein Feld mit der Beschriftung Einlernen. Sollte noch keine Fernbedienung in Ihrem Profil angelegt worden sein, werden Sie nun dazu aufgefordert. Bestätigen Sie dieses mit „Ja“.

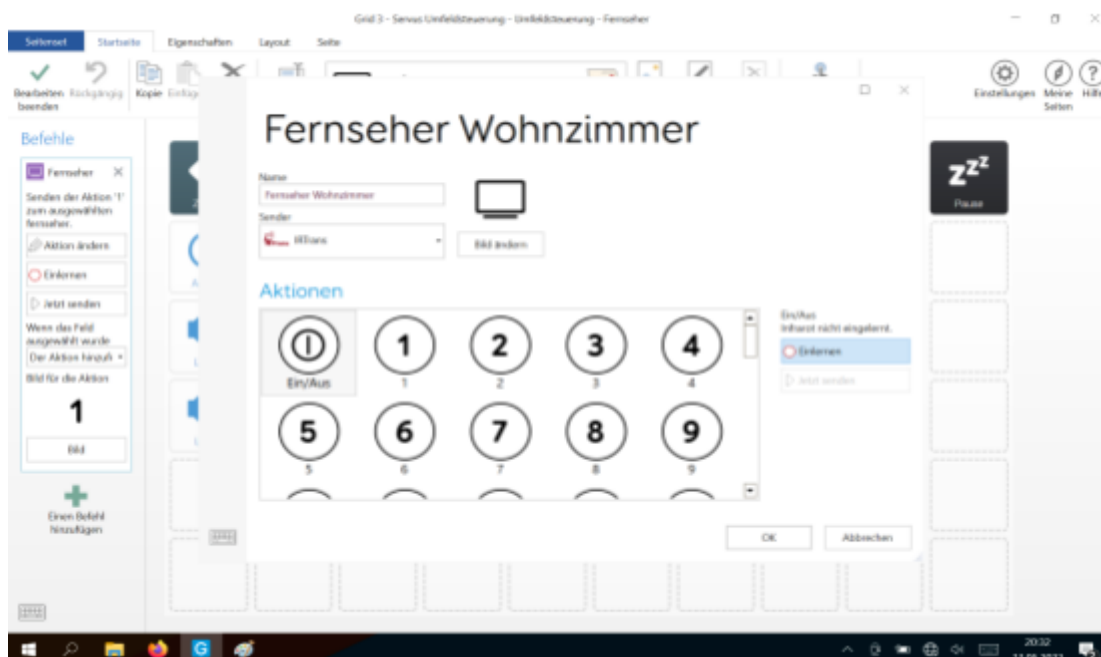

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie ihrer Fernbedienung einen Namen zuweisen können (Im Beispiel: Fernseher Wohnzimmer) und darunter die Sendart auswählen müssen. In diesem Falle ist es eine Infrarotfernbedienung daher wählen wir GEWA aus.

Infrarot einlernen

Einlernen

Halten Sie Ihre Fernbedienung ca. 5 cm vom Sensor entfernt.

Taste auf der Fernsteuerung gedrückt halten. Dies kann bis zu 10 Sekunden in Anspruch nehmen.


Nun können Sie den Einlern-Prozess beginnen. Wählen Sie dazu eine Aktion aus (in unserem Beispiel ist es Aktion Ein/Aus) und wählen Sie an der rechten Seite „einlernen“.

Ein neues Fenster öffnet sich das mit Ihnen den Einlern-Prozess Schritt für Schritt durch geht.

Schritt 1: Halten Sie die Fernbedienung ungefähr 5 cm vom Sensor entfernt.

Schritt 2: Halten Sie die Taste die Sie einlernen wollen gedrückt bis die Anzeige Ihnen sagt: „Lassen Sie die Fernbedienung los

Schritt 3: Drücken Sie die Taste erneut und lassen Sie sie dann wieder los.

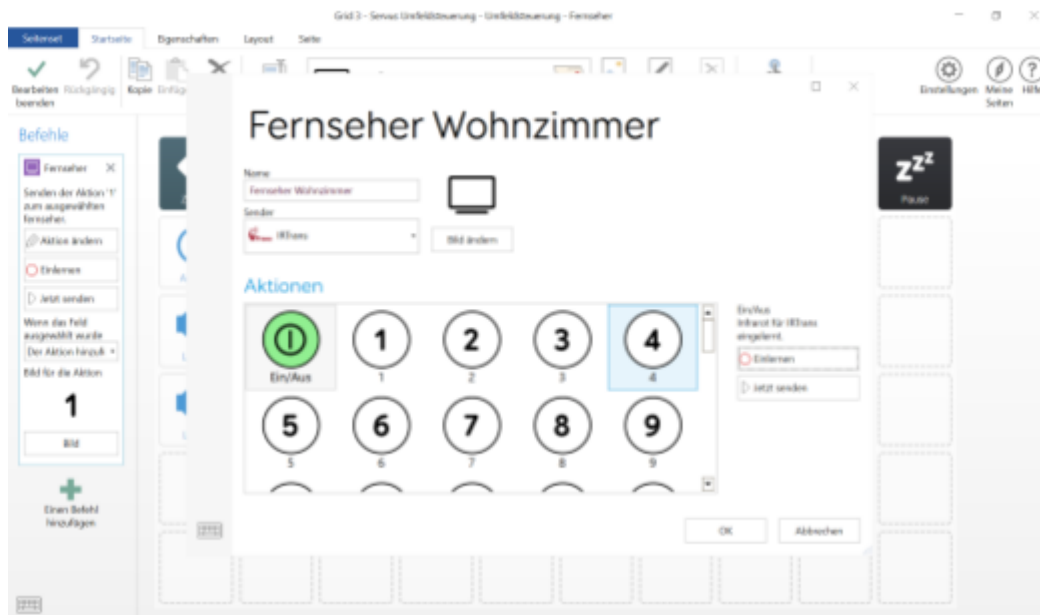

Wenn der Einlernprozess erfolgreich war schließt sich das Fenster und die Aktionstaste die Sie eingelernt haben wird in Grün dargestellt. Unter der Fläche für das Einlernen ist nun auch die Schaltfläche „jetzt senden“ aktiv, mit der Sie die soeben eingelernte Aktion sofort testen können. Wiederholen Sie nun diese Schritte für alle Tasten Ihrer Fernbedienung die Sie benutzen möchten.

Für einige Geräte hat SmartBox eine Liste mit gespeicherten Fernbedienungen angefangen, dort können Sie schauen ob ihr Gerät schon aufgelistet ist und können so einfach die Datei herunterladen und in Ihr Profil aufnehmen, unter <https://thinksmartbox.com/answer/pre-recordedir-remote-files-environment-control> können Sie die stets wachsende Liste finden.

Zum Installieren einer Umfeldsteuerungsdatei schließen Sie Grid 3 und öffnen einen Explorer. Navigieren Sie zu: C:\Benutzer\öffentlich\öffentliche Dokumente\Smartbox\Grid3\Environment Control Accessories Kopieren Sie die Datei für Ihr Gerät in den Ordner und öffnen Sie Grid 3.



Gehen Sie in die Einstellungen und öffnen
Umfeldsteuerung. Dort können Sie die
hinzugefügte Fernbedienung einsehen und bei
Bedarf anpassen und bearbeiten. Nun sind sie in
den Servus Grid Sets nutzbar.