


Verwendung von Super Core

Die Startseite von Super Core besteht aus vier Hauptbereichen.

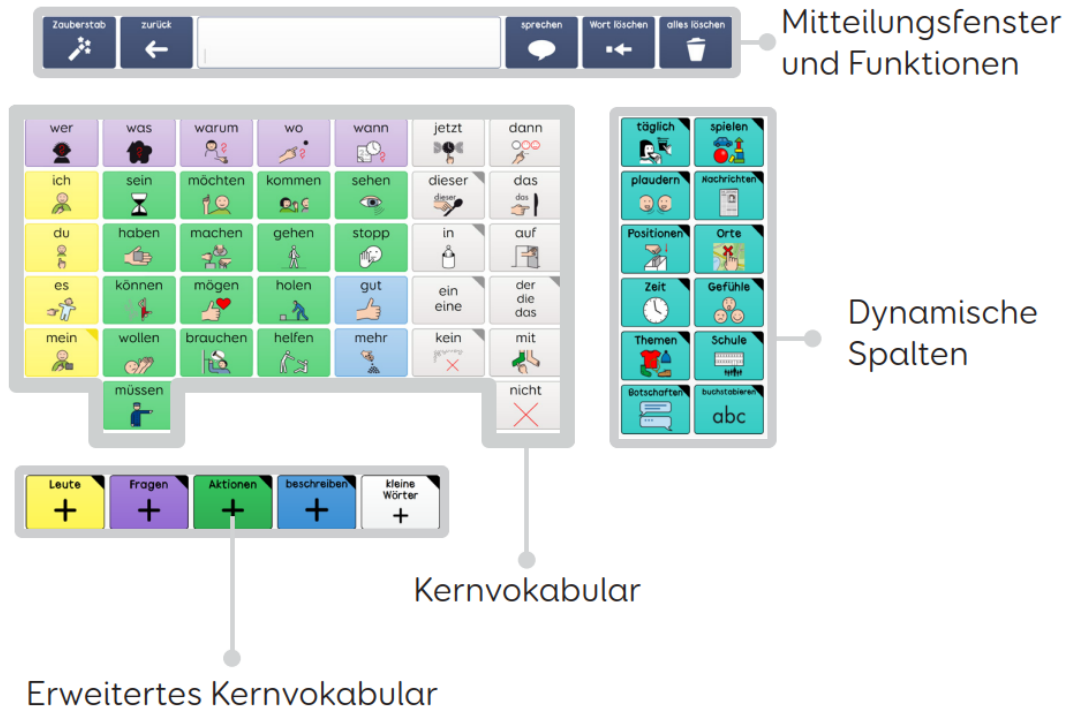

Kernvokabular

Die Startseite mit dem Kernvokabular bietet Zugang zu den wichtigsten und gebräuchlichsten Kernwörtern und unterstützt dadurch eine effiziente Kommunikation. Viele dieser Wörter sind auch auf weiteren Seiten innerhalb von Super Core enthalten.

Erweitertes Kernvokabular

Über die Schaltfläche zum erweiterten Kernvokabular im unteren Bereich des Rasters erhalten Sie Zugriff auf Hunderte weitere Kernwörter. Die Felder am unteren Rand der Startseite führen jeweils zu Seiten mit erweitertem Kernvokabular aus den Rubriken „Leute“, „Fragen“, „Aktionen“ und „kleine Wörter“.

Das Kernvokabular bezieht sich auf Wörter, die wir ständig und in verschiedenen

Situationen verwenden, um über viele unterschiedliche Dinge zu sprechen. Diese Wörter machen etwa 80 % unseres Wortschatzes aus.

Z. B. „ich“, „gehen“, „wollen“, „dieser“, „mich/mir“, „mögen“, „sein“, „auf“.

Der andere Teil unseres Wortschatzes besteht aus Randvokabular. Dabei handelt es sich um spezifischere Wörter, die wir verwenden, wenn wir über bestimmte Dinge sprechen, z. B. „Pferd“, „Wolke“, „Tomate“ oder „Computer“
(Vanderheiden & Kelso, 1987)

Dynamische Spalten

Die dynamischen Spalten führen zu Seiten, die neben Kernwörtern auch themenspezifisches Randvokabular enthalten. Hier finden Sie die Aktivitäten „Alltag“ und „Spielen“ sowie eine Vielzahl weiterer Themen.

Die Aktivitäten „Alltag“ und „Spielen“ erleichtern das Erlernen und Erforschen von Sprache in Zusammenhang mit Aktivitäten, die Spaß machen und vertraut sind, und regen dazu an, Unterstützte Kommunikation alltäglich zu nutzen.

Mitteilungsfenster und Funktionen



Oben auf der Seite befindet sich das Mitteilungsfenster, in dem jedes Wort bzw. jeder Satz, den Sie auswählen, angezeigt wird. Wählen Sie das Feld „Sprechen“ aus, um Ihre Mitteilung per Sprachausgabe wieder zu geben.



Unabhängig davon, wo Sie sich in Super Core befinden, mit der Option „Zurück“ können Sie immer zur vorherigen Seite zurückkehren.



Für Benutzer, die die Augensteuerung oder einen Mausersatz mit Verweilzeit für die Auswahl verwenden, wird das Feld „Pause“ in der obersten Zeile des Rasters angezeigt. Es ermöglicht, eine Pause einzulegen und sich im Raster umzusehen, ohne eine Auswahl zu treffen.



Sie können „Löschen“ auswählen, um den Inhalt des Mitteilungsfensters oder einzelne Wörter zu löschen.



Mit dem Zauberstab können Sie Korrekturen vornehmen und z. B. die Zeitform ändern und Endungen hinzufügen. Hier befindet sich auch die Seite „Einstellungen“.



Mit Hilfe des Feldes „Startseite“ gelangen Sie von jedem Punkt im Seitenset wieder zum Kernwortbereich.



Wenn das Symbol „Hier bleiben“ angezeigt wird, befinden Sie sich auf einer selbstschließenden Seite. Sie können das Symbol auswählen, um zu verhindern, dass die Seite geschlossen wird, wenn Sie z.B. mehr als ein Wort dort auswählen möchten. Alle Seiten mit erweitertem Kernvokabular sind selbstschließend.



Die integrierte Grammatikfunktion passt die Formen nach Auswahl automatisch an. Für fortgeschrittenere Benutzer bietet der Zauberstab weitere Optionen für komplexere Aspekte von Sprache wie Verbzeitformen und Morphologie.

Tipp: Super Core unterstützt Lernende auch dabei, ein Verständnis für ihr UK-Gerät zu entwickeln – beispielsweise, indem es leicht zugängliche Informationen zu Funktionen wie Akkulaufzeit und Lautstärke bereitstellt und einfaches Vokabular für Gespräche darüber anbietet.