

Was ist die Fix-Funktion und wie funktioniert es?

Das Fix-Werkzeug ist ein Befehl in Grid, mit dem Text mithilfe von KI schnell korrigiert werden kann. Es hilft bei Rechtschreib- und Grammatikfehlern, erweitert gängige Abkürzungen und fügt fehlende Buchstaben und Leerzeichen ein.

Forschungen von Smartbox in Zusammenarbeit mit der ALS Association haben gezeigt, dass eine der größten Herausforderungen für Menschen, die schriftsprachbasierte UK nutzen, die Korrektur von Tippfehlern ist.

Unsere Untersuchungen ergaben, dass das Beheben von Fehlern bis zu ein Drittel der Zeit in Anspruch nahm, die Menschen für das Verfassen ihrer Nachrichten benötigten – was die Kommunikation erheblich verlangsamte.


Eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, wie KI hier helfen kann, besteht darin, diese Fehler zu reduzieren, sodass Nutzer*innen schneller kommunizieren können – selbstbewusst sagen was man will.

Wie funktioniert das Fix-Werkzeug?

Wenn du den Fix-Befehl verwendest, wird der gesamte Text, der in der Ausgabeleiste geschrieben wurde, an einen KI-gestützten Dienst gesendet. Rechtschreibfehler und Grammatikfehler werden korrigiert, gängige Abkürzungen werden ausgeschrieben und in der Ausgabeleiste erscheint die überarbeitete Nachricht.

Zwischen der Aktivierung des Fix-Befehls und dem Ersetzen der Nachricht gibt es eine kurze Verzögerung, da die Nachricht an den KI-Dienst gesendet und dort verarbeitet wird. Die Zelle zeigt ein „Beschäftigt“-Symbol an, um zu verdeutlichen, dass eine Korrektur durchgeführt wird.

Eingabe ohne Fix-Funktion

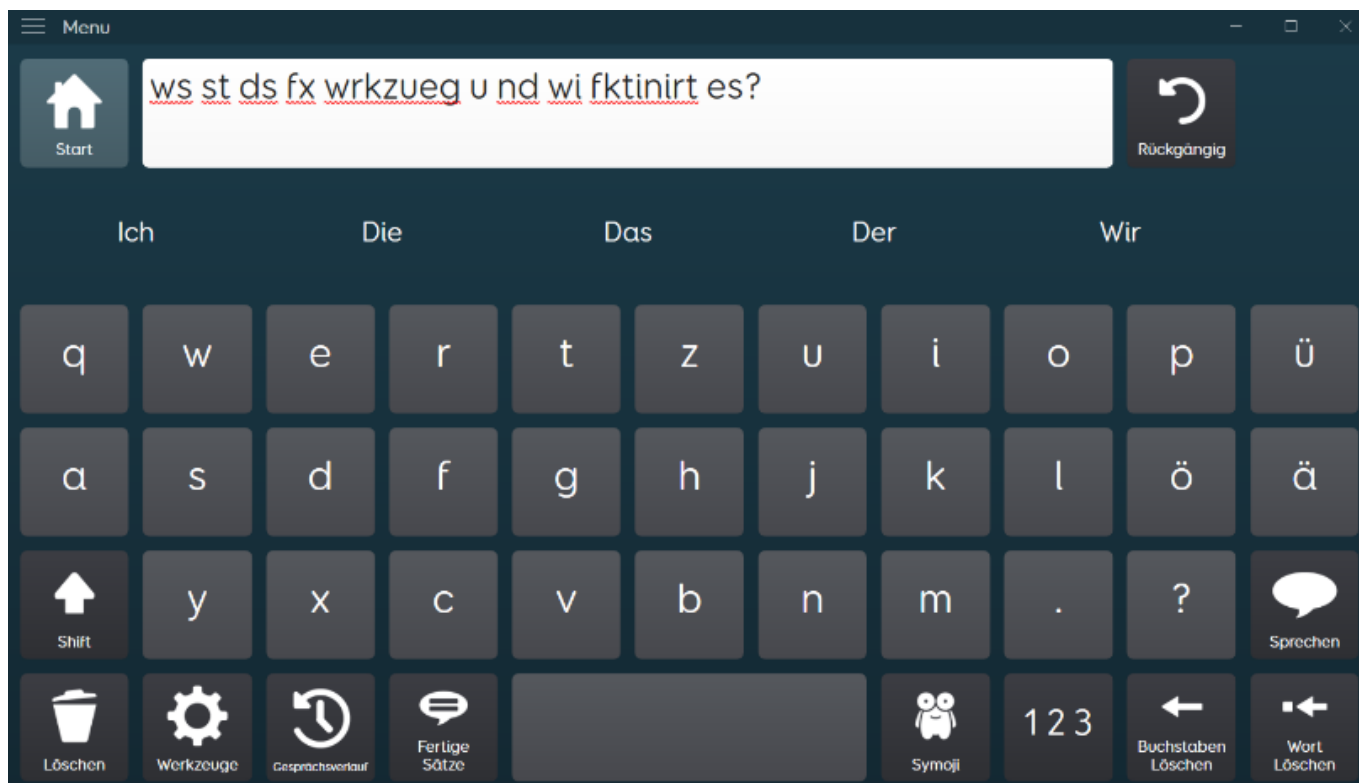

Eingabe mit Fix-Funktion



Anforderungen an das Fix-Werkzeug

Der Fix-Befehl wurde in Grid-Version 97 eingeführt. Die Nutzung dieses Werkzeugs erfordert, dass Grid in dieser oder einer neueren Version verwendet wird.

Das Fix-Werkzeug setzt voraus, dass die *Online-KI-Werkzeuge* in den *Einstellungen* von Grid unter *Datenkontrolle* aktiviert sind.

Das Fix-Werkzeug verwendet Onlinedienste. Dein Gerät muss daher mit dem Internet verbunden sein und über eine stabile Verbindung verfügen. Netzwerk und Gerät müssen Verbindungen zu folgender Adresse zulassen:

<https://smartconnectionapimanagement.azure-api.net/live/>