

Was ist eine Null-Punkt-Kalibrierung?

Die Evo-Augensteuerungskamera bietet die Möglichkeit, die Anzahl der Kalibrierungspunkte auf null zu setzen.

Wenn du eine Null-Punkt-Kalibrierung durchführst, werden alle vorhandenen Kalibrierungsdaten überschrieben und die Werkseinstellungen der Herstellerkalibrierung wiederhergestellt.

So stellst du in Grid 3 eine Null-Punkt-Kalibrierung ein:

1. Öffne das Grid-Menü.
2. Gehe zu Einstellungen.
3. Wähle Eingabeeinstellungen.
4. Gehe zu Augensteuerung.
5. Öffne Kalibrierung.
6. Stelle im Dropdown für die Anzahl der Kalibrierungspunkte auf „Zero targets“ / „Null Ziele“.

Um die Null-Punkt-Kalibrierung zu laden, musst du eine Kalibrierung starten.

Grid-Menü → Einstellungen → Eingabeeinstellungen → Augensteuerung → Kalibrieren

Grid zeigt anschließend sofort die Meldung „Augensteuerungskalibrierung erfolgreich“ an, um zu bestätigen, dass die Standardkalibrierung geladen wurde.