

Für wen ist Super Core geeignet?

Super Core eignet sich für unterschiedlichste Nutzer:innen der Unterstützten Kommunikation, angefangen bei denjenigen, die sich gerade erst mit der Symbolkommunikation vertraut machen, bis hin zu denjenigen, die ein umfassendes Vokabular und leistungsstarke Grammatikhilfen benötigen.


Super Core richtet sich an Nutzer:innen aller Altersgruppen. Es umfasst ein umfangreiches Vokabular zu Alltag, Spiel- und Freizeitaktivitäten, um das Erlernen und Entdecken von Sprache in vertrauten und freudvollen Kontexten zu ermöglichen. Gleichzeitig soll es den Einsatz unterstützter Kommunikation über den gesamten Tag hinweg und an jedem Tag anregen.

Eingabemethoden

Super Core wurde für Nutzer:innengruppen folgender Ansteuerungsarten entwickelt:

- Touchfunktion
- Augensteuerung
- Taster
- Mauszeiger

Benutzer von Tastern können Spalten, Zeilen und Felder durch Scanning auswählen. Das Vokabular ist so angeordnet, dass sich die am häufigsten verwendeten Wörter oben links auf der Rasterseite befinden, um schneller auf sie zugreifen zu können.

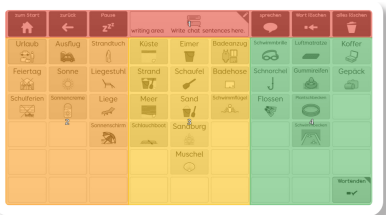

Zudem ist über alle Seiten hinweg Block-Scanning möglich, um die Effizienz bei der Verwendung von Tastern zu erhöhen.

Für Benutzer mit einer Sehbehinderung kann für jedes Feld ein akustisches Feedback aktiviert werden.

Symbolsammlungen

- Widgitsymbole
- PCS Symbole
- Metacom Symbole