

Wie aktualisiere ich die Evo-Firmware?

Updates für die Evo-Augensteuerungskamera werden als Firmware-Updates über Grid 3 bereitgestellt.

Wenn ein Update verfügbar ist, erscheint in der Menüleiste von Grid eine entsprechende Benachrichtigung.

Wichtig:

Das Aktualisieren von Grid 3 aktualisiert nicht automatisch die Evo-Firmware.

Damit dir ein Evo-Firmware-Update angezeigt wird, muss dein Gerät mit dem Internet verbunden sein.

So installierst du das Update:

- Wähle die Benachrichtigung aus – per Touch oder Mausklick.
- Öffne den Bereich „Benachrichtigungen“, suche die Meldung *„Ein Update für Ihre Augensteuerungskamera ist bereit zur Installation“* und wähle Installieren.
- Der Installationsprozess beginnt sofort.
- Der Fortschritt des Updates wird unten im Bereich Benachrichtigungen angezeigt.

Sobald das Update abgeschlossen ist, kannst du den Benachrichtigungsbereich schließen.

Schließe Grid 3 und öffne es erneut, um die Augensteuerung wie gewohnt weiter zu verwenden.