

Wie füge ich die Fix-Funktion zu meinen eigenen Grid-Sets hinzu?


Der Fix-Befehl ist in einigen neu hinzugefügten Grid-Sets (wie *Fast Talker* und *Text Talker*) bereits enthalten, kann aber auch in bestehende und personalisierte Grid-Sets integriert werden.

So fügst du den Fix-Befehl hinzu:

- Öffne das gewünschte Seitenset und wechsle in den Bearbeitungsmodus über Menü → Seite bearbeiten.
- Wähle eine bestehende freie Zelle aus oder erstelle eine neue, um den Fix-Befehl hinzuzufügen. Markiere die entsprechende Zelle und wähle Feld erstellen.

Hinweis: Der Fix-Befehl muss in eine leere Zelle eingefügt werden.

- Suche entweder nach Fix oder navigiere in die Kategorie Mitteilungen und Schreiben, wo du Fix im Abschnitt Online-KI-Werkzeuge findest.

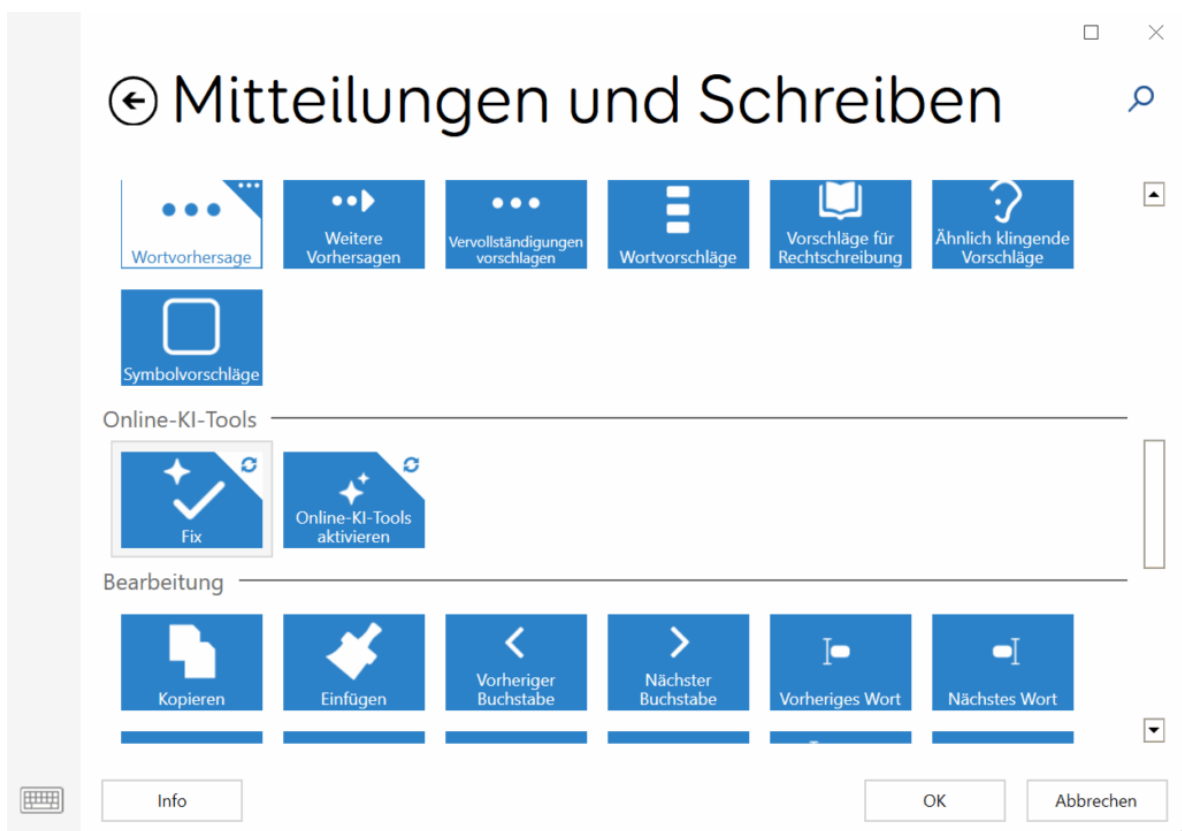

- Wähle Fix aus und klicke auf OK, um den Befehl hinzuzufügen.
- Falls nötig, kannst du das Aussehen der Zelle über den Reiter Eigenschaften anpassen.
- Wähle anschließend Bearbeitung beenden und speichere deine Änderungen.